

Accu-Chek Insight Training Chart

Neue Handhabungshinweise für den Wechsel der Ampulle




Nadel



- Entfernen Sie das Infusionsset vor dem Ampullenwechsel immer vom Körper.
- Benutzen Sie immer einen neuen Adapter, wenn Sie die Ampulle wechseln.
- Eine Nadel befindet sich in der Mitte des Adapterkopfes. Die Insulinversorgung ist nur sichergestellt, wenn die Nadel mittig und in senkrechter Lage in die Ampulle eingeführt wird (**siehe Schritt 11**).
- Wenn eine leere Ampulle in die Pumpe eingesetzt wird (zum Beispiel für das Training), zeigt die Pumpe, auch wenn auf Grund der leeren Ampulle keine Insulinabgabe erfolgt, dennoch die programmierten Einstellungen für die Insulinabgabe an (Infusionsset, Basalrate und Bolusabgabe).
- Das Auswählen des falschen Ampullentyps kann zu einer Insulin Unter- oder Überversorgung führen.


Schritt 1: Entfernen der leeren Ampulle

1

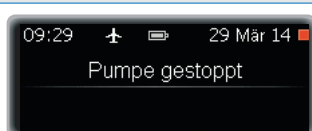


Drücken Sie in der Standardanzeige .

2

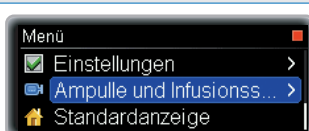


Das (Haupt-)Menü wird angezeigt. Drücken Sie , um zur Option **Ampulle und Infusionsset** zu gelangen. Drücken Sie zum Auswählen die Taste .

3

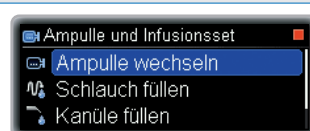

Das Menü **Ampulle und Infusionsset** wird angezeigt. Drücken Sie , um die Option **Ampulle wechseln** auszuwählen.

4

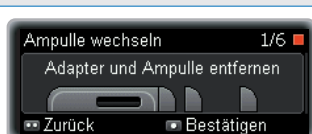

Die Anzeige **Ampulle wechseln** erscheint.

5




Halten Sie die Pumpe senkrecht. Drehen Sie den Adapter mit dem Schlauch gegen den Uhrzeigersinn.

6



Entfernen Sie den Adapter mit der Ampulle, wenn ein Winkel von ungefähr 120° erreicht ist.


7

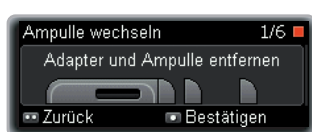


Wichtig: Drücken Sie , um zu bestätigen, dass Sie den Adapter und die Ampulle entfernt haben. Die Pumpe fährt automatisch die Gewindestange zurück.

Die Pumpe oder die Ampulle könnten beschädigt werden, wenn die Gewindestange nicht zurückgefahren ist.

8

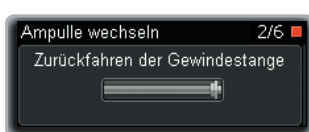

9

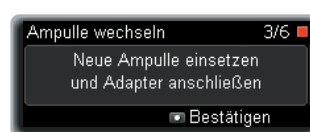

Wenn die Gewindestange vollständig zurückgefahren ist, werden Sie dazu aufgefordert, die neue Ampulle einzusetzen und den Adapter anzuschließen.

Setzen Sie nur dann eine neue Ampulle ein, wenn die Anzeige Neue Ampulle einsetzen und Adapter anschließen erscheint.

Achtung:

- Überprüfen Sie immer die Ampulle, einschliesslich des Gummikolbens am unteren Ende der Ampulle. Sie dürfen sie nicht benutzen, wenn Beschädigungen sichtbar sind oder wenn der Gummikolben bis über das

weisse Band des Etiketts am unteren Ende der Ampulle gezogen ist. Dies kann eine Folge auslaufenden Insulins sein. Falls Sie vermuten, dass die Ampulle beschädigt ist, geben Sie sie in Ihrer Apotheke zurück.

- Sie dürfen die Ampulle nicht nutzen, wenn sie oder die Insulinpumpe, die die Ampulle enthält, fallen gelassen, beschädigt oder zerdrückt wurde.

Schritt 2: Einsetzen einer neuen Ampulle

Stellen Sie sicher, dass die Ampulle und das Insulin Raumtemperatur haben.



Vergewissern Sie sich, dass Sie die Pumpe senkrecht halten. Setzen Sie die Ampulle mit dem Stopfen zuerst in das Ampullenfach ein.



Vergewissern Sie sich, dass die Ampulle korrekt eingesetzt ist. Wenn die Ampulle nicht wie angezeigt eingesetzt ist, **prüfen Sie noch einmal die Schritte 1 bis 7.**



Drücken Sie die Ampulle nicht in die Pumpe, wenn die Ampulle hervorsteht. Die Pumpe oder die Ampulle könnte dadurch beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Gewindestange vollständig zurückgefahren wurde. Wenn die Gewindestange nicht vollständig zurückgefahren wurde, wenden Sie sich an das Accu-Chek Kunden Service Center.



Setzen Sie einen neuen Adapter auf den Bajonettverschluss des Ampullenfachs. Achten Sie darauf, dass Sie die Nase des Adapters in einem rechten Winkel (90°) in die Aussparungen des Pumpengehäuses einführen. Anderenfalls könnte sich die Nadel verbiegen.




Setzen Sie den Adapter **nur** wie in **Schritt 10** beschrieben auf den Bajonettverschluss des Ampullenfachs.




Setzen Sie den Adapter **nicht** auf den Bajonettverschluss des Ampullenfachs, wenn der Adapter nicht wie in **Schritt 10** beschrieben positioniert wurde.



Drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Der Adapter ist korrekt ausgerichtet, wenn er bündig mit dem Pumpengehäuse abschliesst. Drücken Sie anschliessend zur Bestätigung .

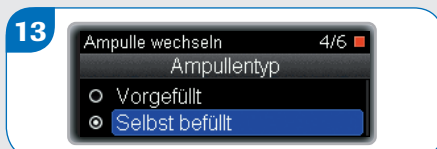


Die **Anzeige Ampullentyp** erscheint. Drücken Sie oder um zum korrekten Ampullentyp zu gelangen. Drücken Sie zum Auswählen .

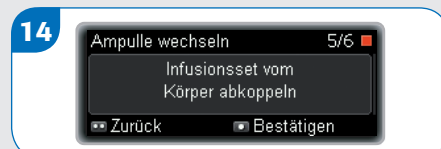


Sie werden aufgefordert, das Infusionsset von Ihrem Körper abzukoppeln. Drücken Sie zur Bestätigung .



Die Pumpe erkennt die Position des Stopfens in der Ampulle.

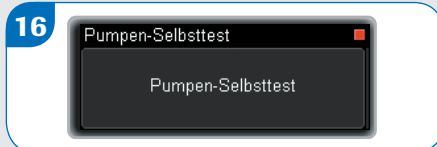

Anschliessend führt die Pumpe einen Selbsttest durch. Siehe Kapitel 2.1, Seite 19.

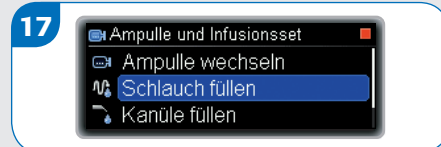

Nach dem Selbsttest kehrt die Pumpe zum Menü Ampulle und Infusionsset zurück. Standardmässig ist die Option Schlauch füllen ausgewählt. Fahren Sie mit dem nächsten Kapitel fort.

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK INSIGHT sind Marken von Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

www.accu-check.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz



ACCU-CHEK®