

Accu-Chek Insight modalità d'utilizzo

Nuovi istruzioni per il cambio della cartuccia



Ago


- Prima di cambiare la cartuccia, scollegare sempre il set d'infusione dal corpo.
- Usare sempre un adattatore nuovo quando si sostituisce la cartuccia.
- Al centro della testina dell'adattatore c'è un ago. L'erogazione di insulina è garantita solo se l'ago nella cartuccia è inserito al centro in modo perpendicolare (**vedere punto 11**).

- Se nel microinfusore è inserita una cartuccia vuota (p. es. a scopo di addestramento), il microinfusore visualizza comunque le erogazioni d'insulina programmate (riempimento del set d'infusione, velocità basale e erogazioni del bolo), anche se non viene erogata alcuna insulina dato che la cartuccia è vuota.
- La selezione del tipo di cartuccia errato può comportare un'erogazione di insulina insufficiente o eccessiva.


Punto 1: Rimuovere la cartuccia vuota

1 

Dallo schermo di stato premere .

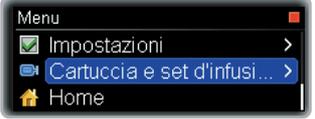2 

Appare il **Menu** principale. Premere  per passare a **Cartuccia e set d'infusione**. Premere  per selezionare.

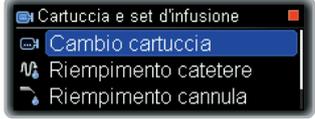3 

Appare il menu **Cartuccia e set d'infusione**. Premere  per selezionare **Cambio cartuccia**.

4 

Appare lo schermo **Cambio cartuccia**.


5 


Tenere il microinfusore in posizione verticale. Ruotare l'adattatore con il catetere in senso antiorario.

6 

Quando si raggiunge un angolo di circa 120°, rimuovere l'adattatore con la cartuccia.

7 

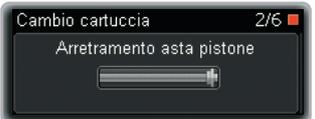8 

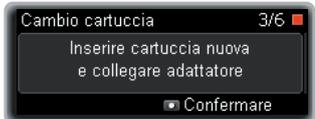9 

Importante: Premere  per confermare di avere rimosso l'adattatore e la cartuccia. Il microinfusore inizia automaticamente ad arretrare l'asta del pistone.

Se l'asta del pistone non viene arretrata, si potrebbero danneggiare il microinfusore o la cartuccia.

Inserire la nuova cartuccia solo quando appare lo schermo Inserire cartuccia nuova e collegare adattatore.

Avvertenza:

- Controlli sempre la cartuccia, incluso lo stantuffo di gomma alla base della cartuccia. Non la usi se vedi qualsiasi tipo di perdita o danneggiamento o se lo stantuffo è oltre la

banda bianca posta alla base della cartuccia. Ciò potrebbe causare la perdita di insulina. Se sospetti che la cartuccia sia danneggiata, la riconsegna al fornitore.

- Se la cartuccia o il dispositivo contenente la cartuccia gocciola, presenta dei danni o delle spaccature.

Punto 2: Inserimento di una nuova cartuccia

Assicurarsi che cartuccia ed insulina siano a temperatura ambiente.



Assicurarsi di tenere il microinfusore in posizione verticale. Inserire la cartuccia – per primo il lato con lo stantuffo – nel vano portacartuccia.



Assicurarsi che la cartuccia sia inserita correttamente. Se la cartuccia non è inserita come illustrato qui sopra, **rivedere i punti da 1 a 7.**



Non spingere la cartuccia nel microinfusore se la cartuccia spunta fuori. Si potrebbero danneggiare il microinfusore o la cartuccia. Assicurarsi che l'asta del pistone sia completamente arretrata. Se l'asta del pistone non è arretrata completamente, **contattare il Servizio Assistenza.**



Posizionare un adattatore nuovo sulla presa a baionetta del vano portacartuccia. Assicurarsi di inserire ad angolo retto (90°) la testina dell'adattatore nell'incavo del microinfusore. In caso contrario si potrebbe piegare l'ago.




Posizionare l'adattatore sulla presa a baionetta del vano portacartuccia **solo** come descritto al **punto 10.**




Non porre l'adattatore sulla presa a baionetta del vano portacartuccia se l'adattatore non è posizionato come descritto al **punto 10.**




Ruotare l'adattatore in senso orario fino a quando si ferma. L'adattatore è posizionato correttamente quando è allineato al microinfusore. Premere quindi  per confermare.

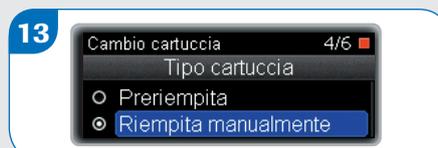

Appare lo schermo Tipo cartuccia. Premere  o  per passare al tipo di cartuccia appropriato. Premere  per selezionare.

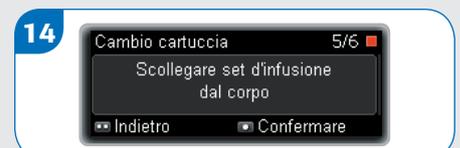


Il microinfusore invita a scollegare il set d'infusione dal corpo. Premere  per confermare.

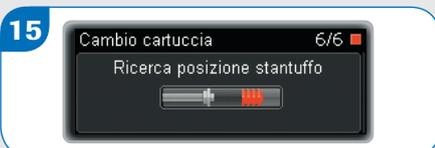

Il microinfusore individua la posizione dello stantuffo nella cartuccia.



Il microinfusore esegue quindi un autotest. Vedere capitolo 2.1, pagina 19.

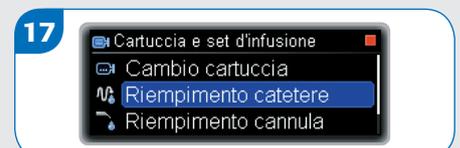

Terminato l'autotest, il microinfusore torna al menu **Cartuccia e set d'infusione**. **Riempimento catetere** è selezionato per impostazione predefinita. Continuare con il capitolo seguente.

ACCU-CHEK e ACCU-CHEK INSIGHT sono marchi di Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Tutti i diritti riservati.

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz



ACCU-CHEK®