



«Company»  
Alla cortese attenzione di «Full\_Name»  
«Mailing\_Address»

Telefono: +49 (0) 81 52 / 38 - 0  
Fax: +49 (0) 81 52 / 38 - 202  
E-mail: info@heine.com

12/03/2018/TSA

**Informazioni di sicurezza urgenti circa i HEINE manici per laringoscopio SP F.O.  
N° art.: F-001.22.815**

Gentile «Title» «Last\_Name»,

Di seguito le trasmettiamo delle urgenti informazioni di sicurezza circa i HEINE manici per laringoscopio SP F.O.

In casi specifici molto rari, durante l'uso del manico per laringoscopio SP F.O. con lama metallica, in speciale modo in caso di incompatibilità con la norma ISO 7376, sussiste la possibilità di mancata stabilità della connessione ad innesto. Al momento attuale, non abbiamo ricevuto informazioni circa il ferimento di pazienti.

Questo tipo di utilizzo del prodotto non corrisponde alla descrizione fornita nella documentazione di vendita di HEINE.

Poiché la sicurezza dei suoi pazienti è la nostra priorità assoluta, abbiamo deciso di agire volontariamente in prima persona e di ampliare le istruzioni d'uso e di manutenzione con un'avvertenza in merito e la durata del ciclo di vita prevista.

La preghiamo, di sincerarsi della trasmissione di queste informazioni urgenti a tutti gli utenti della sua struttura che adoperano il manico per laringoscopio SP F.O. e a tutte le persone di competenza.

In caso di domande circa le informazioni di sicurezza, da parte sua o dei suoi clienti, il team di HEINE è a sua completa disposizione ai seguenti recapiti:

Stuart Coates, telefono: +49815238-418, e-mail: SCoates@heine.com  
Andreas Muha, telefono: +49815238-290, e-mail: AnMuha@heine.com.

HEINE Optotechnik si scusa per l'inconveniente e La ringrazia per la sua collaborazione.

Distinti saluti,  
HEINE OPTOTECHNIK GmbH & Co. KG

Bettina Seim  
Vicepresidente vendite e marketing  
addetto alla sicurezza

Thomas Sauerer  
Direttore responsabile della qualità e