



Stryker Osteonics SA • Burgunderstrasse 13 • 4562 Biberist


Stryker Osteonics SA

Burgunderstrasse 13
4562 Biberist / Schweiz
t: +41 32 641 69 50
f: +41 32 641 69 55
www.stryker.com

Frau Yrida Baldus
t: +49 2065 837-124
f: +49 2065 837-120
Yrida.Baldus@stryker.com

Datum: 26. November 2018

PRODUKTSICHERHEITSINFORMATION / PRODUKTKORREKTUR

Produktbeschreibung: EMS – Power-LOAD® Tragenbefestigung 
Hergestellt zwischen dem 1. Januar und dem 16. August 2017
Artikelnummer: 6390-000-000
Chargennummer: sh. Anlage
Unsere Referenz-Nr.: RA2018-1724060

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten diesen Brief, da wir den Umfang dieser Maßnahme auf alle zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 16. August 2017 hergestellten Einheiten erweitern.


Bitte ermitteln Sie die betroffenen Einheiten an Ihrem Standort, füllen Sie das Antwortformular aus und schicken Sie es an uns zurück, um zu bestätigen, daß Sie diese Mitteilung erhalten haben.

Wenn Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, kontaktieren Sie mich bitte per Telefon oder E-Mail.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser wichtigen Angelegenheit.

Freundliche Grüsse

Stryker Osteonics SA

i.A. 

Yrida Baldus
Senior RAQA Specialist
Germany – Switzerland – Austria

Anlage

Betroffene Seriennummern

160139750	160340212	160541112	160740616	160840851	160940813
160139751	160340213	160541113	160740617	160840852	160940814
160139917	160340214	160541114	160740618	160840853	160940815
160139918	160340215	160541115	160740619	160840854	160940816
160139919	160340216	160541116	160740620	160840855	160940817
160139920	160340217	160541117	160740621	160840856	160940818
160139921	160340302	160541118	160740622	160840857	160940819
160139922	160340303	160541119	160740623	160840858	160940820
160139923	160340307	160541120	160740624	160840859	160940821
160139924	160341017	160541121	160740625	160840860	160940822
160139925	160341018	160541122	160740626	160840861	160940823
160139926	160341019	160541123	160740627	160840862	160940824
160139927	160341020	160541124	160740628	160840863	160940825
160139928	160341021	160541125	160740629	160840864	160940826
160139929	160341022	160639112	160741650	160840865	160940827
160139930	160341023	160639330	160741651	160840866	160940828
160139931	160341024	160639331	160741652	160840867	161039084
160140836	160341025	160639332	160741653	160840868	161039085
160140837	160341026	160639333	160741654	160840869	161039086
160140878	160341027	160639334	160741655	160840870	161039087
160140967	160341028	160639335	160741656	160840871	161039088
160140968	160341029	160639336	160741657	160840872	161039089
160140969	160341030	160639337	160741658	160840873	161039090
160140970	160341031	160639338	160741659	160840874	161039091
160140971	160341032	160639339	160741660	160940585	161039092
160140972	160341033	160639340	160741661	160940586	161039093
160140973	160341034	160639341	160741662	160940587	161039094
160140974	160341035	160639342	160741663	160940588	161039095
160140975	160341036	160639343	160741664	160940589	161039096
160140976	160439285	160639344	160742186	160940590	161039097
160140977	160440279	160639853	160742187	160940591	161039098
160140978	160440941	160639854	160742188	160940592	161039200
160240507	160540680	160639855	160840060	160940593	161039201
160240508	160540681	160639856	160840061	160940594	161039202
160240614	160540682	160639857	160840062	160940595	161039203
160340193	160540683	160639858	160840063	160940596	161039204
160340194	160540684	160639859	160840064	160940597	161039205
160340195	160540685	160639860	160840065	160940598	161039206
160340196	160540686	160639861	160840066	160940599	161039207
160340197	160540687	160639862	160840067	160940600	161039208
160340198	160540688	160639863	160840068	160940601	161039209
160340199	160540689	160639864	160840069	160940602	161039210
160340200	160540690	160639865	160840070	160940603	161039211
160340201	160540691	160639866	160840071	160940604	161039212
160340202	160540692	160639867	160840072	160940809	161039213
160340209	160540693	160640515	160840073	160940810	161039214
160340210	160540694	160739066	160840074	160940811	161039215
160340211	160541111	160740615	160840850	160940812	161039216

161039217	161141043	170340706	170439174	170541765	170741511
161039218	161141044	170340707	170439175	170541766	170741512
161039219	161141045	170340708	170439176	170541767	170741513
161039281	161141046	170340709	170439177	170541768	170741514
161039282	161141047	170340710	170439178	170541769	170741515
161039283	161141635	170340711	170439179	170541770	170741516
161039284	161141636	170340712	170440410	170541771	170741517
161039285	161141637	170340713	170440411	170541772	170741518
161039286	161141638	170340714	170440850	170541773	170741519
161039287	161141639	170340715	170440851	170541774	170741520
161039288	161141640	170340716	170440852	170541775	
161039289	161141641	170340717	170440853	170541776	
161039290	161141642	170340718	170440854	170541777	
161140112	161141643	170340719	170440855	170541778	
161140113	161141644	170340720	170440856	170541779	
161140114	161141645	170340721	170440857	170541780	
161140115	161141646	170340722	170440858	170541781	
161140116	161141647	170340723	170440859	170541782	
161140117	161141648	170340724	170440860	170541783	
161140118	161141649	170340725	170440861	170541784	
161140119	161141815	170340726	170440862	170641361	
161140120	161141816	170340727	170440863	170641362	
161140121	161141817	170340728	170440864	170641363	
161140122	161141818	170340729	170440865	170641364	
161140123	161141819	170439150	170440866	170641365	
161140124	161141820	170439151	170440867	170641366	
161140125	161141821	170439152	170440868	170641367	
161140126	161141822	170439153	170440869	170641368	
161140127	161141823	170439154	170440870	170641369	
161140128	161141824	170439155	170440871	170641370	
161140129	161141825	170439156	170440872	170641371	
161140130	161141826	170439157	170440873	170641372	
161140131	161141827	170439158	170440874	170641373	
161140132	161141828	170439159	170440875	170641374	
161140133	161141829	170439160	170440876	170641375	
161140134	161239393	170439161	170440877	170739574	
161140135	161239881	170439162	170440878	170740192	
161140136	170240214	170439163	170440879	170741151	
161141033	170240215	170439164	170541755	170741501	
161141034	170240216	170439165	170541756	170741502	
161141035	170240217	170439166	170541757	170741503	
161141036	170240218	170439167	170541758	170741504	
161141037	170340700	170439168	170541759	170741505	
161141038	170340701	170439169	170541760	170741506	
161141039	170340702	170439170	170541761	170741507	
161141040	170340703	170439171	170541762	170741508	
161141041	170340704	170439172	170541763	170741509	
161141042	170340705	170439173	170541764	170741510	

RÜCKANTWORT**PRODUKTSICHERHEITSINFORMATION / PRODUKTKORREKTUR**

Produktbeschreibung: EMS – Power-LOAD® Tragenbefestigung
Hergestellt zwischen dem 1. Januar und dem 16. August 2017



Artikelnummer: 6390-000-000
Chargennummer: sh. Anlage
Unsere Referenz-Nr.: RA2018-1724060

Kunden-Nr. _____
 Krankenhaus _____
 PLZ, Ort _____
 Ansprechpartner (Name, Position) _____
 Telefon-Nr. _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- Ich habe die Benachrichtigung von Stryker Medical über eine freiwillige Produktmaßnahme für oben aufgeführte Produkte erhalten.
- Ich habe unseren Bestand überprüft und bestätige, dass wir keine betroffenen Produkte im Bestand haben.
- Ich habe unseren Bestand überprüft. Die aufgelisteten Produkte sind in unserem Bestand. Wir bitten um Terminvereinbarung für den Austausch der Befestigungswinkel.

Seriennummer(n), die an Sie verkauft wurde(n)	Einheit befindet sich an folgendem Ort	Seriennummer(n) vernichtet/weiter veräußert

Wir haben Artikel an folgende Einrichtungen weitergeleitet/verkauft:

 Name, Adresse, Ansprechpartner und Tel-Nr. der Einrichtung

Bitte füllen Sie dieses Formular in jedem Fall vollständig aus, auch wenn Sie vorgenanntes Produkt bereits verbraucht/vernichtet haben sollten, und faxen Sie es an die unten angegebene Nummer.

 Datum / rechtsgültige Unterschrift einer Person der medizinischen Einrichtung

Bitte faxen Sie dieses Antwortformular an: +41 (0)32 641 69 55
 Stryker Osteonics SA, Burgunderstrasse 13, CH 4562 Biberist