



Alpnach Dorf, 10. April 2018

## Dringlicher Sicherheitshinweis

### Potentielles Risiko, das Raster verkehrt herum einzusetzen

Arcoma 17-0007-2018-03-16



Wir haben von der Firma Arcoma AB den folgenden, wichtigen Sicherheitshinweis bekommen, der auch Ihr Röntgengerät vom Typ **Arcoma Precision T3** betrifft.


### Beschreibung des Problems

Arcoma AB erhielt Beschwerden bezüglich der Tatsache, dass in einigen Modellen von Detektorhaltern für Tisch- und Wandstativ die Raster falsch eingesetzt werden können. Ein falsches Einsetzen des Rasters kann die Bildqualität beeinträchtigen und zusätzliche Röntgenaufnahmen bei Patienten verursachen.

Die Raster haben ein Typenschild und eine Mittellinie, welche die korrekte Seite zur Röntgenröhre in der Bucky anzeigt.

### Massnahmen

Die erhaltene Reklamation hat zu einer klareren Anleitung in der Bedienungsanleitung geführt. Ebenfalls wurde in der Produktion eine mechanische Vorrichtung zur Vermeidung von Fehleinschüben implementiert. Siehe Bild unten.

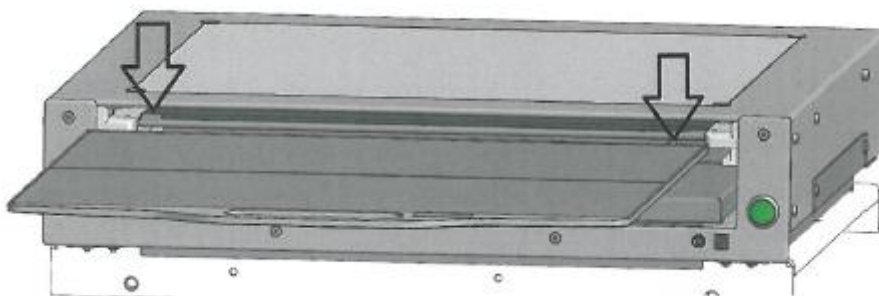

Die Leuag AG hat für alle betroffenen Systeme in der Schweiz den Upgrade Kit bestellt. Wir werden uns nach Erhalt des Materials mit Ihnen in Verbindung setzen, um diesen Upgrade Kit an Ihrem System so bald wie möglich zu installieren. Ebenfalls wird die entsprechende Bedienungsanleitung ersetzt.

In der Zwischenzeit bitten wir Sie, alle Ihre Mitarbeiter entsprechend dieser Mitteilung zu informieren sowie den Erhalt dieser Mitteilung mittels Rücksendung des unterzeichneten Formulars an uns zu bestätigen.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Leuag AG

Hansjörg Aeberhard



Leiter Technik

## **Bestätigung:**

Ich bestätige hiermit, die oben aufgeführte Mitteilung betreffend dem Arcoma Sicherheitshinweis 17-0007-2018-03-16 bekommen zu haben und an die betroffenen Mitarbeiter weitergeleitet zu haben.

Spital:

System:

Name:

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_