

Radiometer RSCH GmbH  
Postfach 124  
Zürcherstrasse 66  
8800 Thalwil  
Tel: +41 (44) 723 11 60  
Fax: +41 (44) 723 11 70  
www.radiometer.ch  
info@radiometer.ch  
Credit Suisse AG  
IBAN: CH38 0483 5273 8812 3100 0  
Geschäftsführer:  
Henrik Brandborg  
Didier Gaillard  
Sitz der Gesellschaft: Thalwil  
UID-Nr./IDE-No.: CHE-106.826.915 MWST

Ihre Zeichen/Nachricht vom  
Votre réf./Message de

Unsere Zeichen  
Notre réf.

Datum  
Date

**DIDGA/GUYBR**

**Mai 2019**

**Dringende Sicherheitsmeldung:  
Gefahr der Patientenverwechslung bei ABL800 Analysatoren**

Sehr geehrter Kunde

Im Juni 2018 hatte Radiometer Sie informiert, dass bei den Analysatoren der Serie ABL800 die Gefahr von Patientenverwechslungen besteht, wenn die Funktion "Bestätigung Patientenprofil" im Rahmen der Abfrage an AQUIRE, Radiance oder ein HIS/LIS-System aktiviert ist (Standardeinstellung deaktiviert).

Wie bereits früher mitgeteilt, hat Radiometer an der Lösung dieses Problems in Form einer Neugestaltung der Analysatoren-Software gearbeitet.

**Betroffenes Produkt:**

Alle Analysatoren der ABL800-Serie mit den Software-Versionsnummern 6.14 bis 6.18.

**Von Radiometer bereitgestellte, endgültige Abhilfemassnahme:**

Radiometer kann nun vermelden, dass in der Software-Version 6.18 MR1 eine dauerhafte Abhilfemassnahme für dieses Problem implementiert wurde. Ihr(e) Analysator(en) wurde(n) auf diese Software-Version aktualisiert.

Das bedeutet, dass die vorläufigen Abhilfemassnahmen nicht mehr erforderlich sind:

Vorläufige AM Nr. 1: Deaktivieren Sie "Bestätigung Patientenprofil"

Oder

Vorläufige AM Nr. 2: Weisen Sie alle Bediener des Analysators/der Analysatoren an, bei Anzeige des Menüs "Bestätigung Patientenprofil" keine neue Probe einzusetzen.

Die Funktion "Bestätigung Patientenprofil" kann nun wieder verwendet werden.

**Bitte beachten Sie:**

Sollten Sie nicht der Endbenutzer des betroffenen Produktes sein, so stellen Sie bitte sicher, dass dieses Schreiben an den Endbenutzer weitergeleitet wird.

Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Freundliche Grüsse

Radiometer RSCH GmbH

**Didier Gaillard**  
General Manager