

Radiometer RSCH GmbH
Postfach 124
Zürcherstrasse 66
8800 Thalwil
Tel: +41 (44) 723 11 60
Fax: +41 (44) 723 11 70
www.radiometer.ch
info@radiometer.ch
Credit Suisse AG
IBAN: CH38 0483 5273 8812 3100 0
Geschäftsführer:
Henrik Brandborg
Didier Gaillard
Sitz der Gesellschaft: Thalwil
UID-Nr./IDE-No.: CHE-106.826.915 MWST

Ihre Zeichen/Nachricht vom
Votre réf./Message de

Unsere Zeichen
Notre réf.

Datum
Date

DIDGA/GUYBR

Mai 2019

**Urgent, avis relatif à la sécurité:
Analyseurs ABL800, risque de confusion des patients**

Chère cliente,
Cher client,

Au mois de juin 2018, Radiometer vous informait que les analyseurs de la série ABL800 pouvaient potentiellement induire une confusion entre patients lorsque la «Confirmation des données démographiques» était activée (désactivée par défaut) dans le cadre d'une requête à AQUIRE, Radiance ou d'un système HIS LIS.

Comme communiqué précédemment, Radiometer a travaillé sur une solution impliquant une refonte du logiciel de l'analyseur.

Produit affecté:

Toutes les séries de l'analyseur ABL800 travaillant sous versions logicielles 6.14 à 6.18.

Contre-mesure permanente fournie par Radiometer:

Radiometer peut maintenant annoncer qu'une solution permanente à ce problème a d'ores et déjà été introduite dans la version 6.18 MR1 du logiciel. Votre ou vos analyseur(s) a/ont été mis à niveau avec cette version du logiciel.

Cela signifie que les contre-mesures temporaires ne sont plus nécessaires:

CM temporaire #1: Désactiver «Configuration des données démographiques»

Ou

CM temporaire #2: Demander à tous les opérateurs de l'analyseur de ne pas introduire de nouvel échantillon lorsque le menu «Confirmation des données démographiques» est affiché.

Par conséquent, le menu «Confirmation des données démographiques» peut maintenant de nouveau être utilisé.

Veillez noter:

Si vous n'êtes pas l'utilisateur final du produit concerné, merci de vous assurer que le présent courrier sera bien remis à cette personne.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.

Cordialement,

Radiometer RSCH GmbH

Didier Gaillard
General Manager