

Servona GmbH | Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | GERMANY

**Servona GmbH**

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | GERMANY  
Postfach 31 09 | 53831 Troisdorf | GERMANY  
Tel. +49 (0)2241 9322-0  
Fax +49 (0)2241 9322-277  
info@servona.de | www.servona.de

[Ihre Nachricht]      [Gesprächspartner]      [Telefon/]      [Fax]      [E-Mail]      [Datum]  
MD/NW                -339      sb-mp@servona.de      25. Juni 2018

**Sicherheitshinweis (FSN) – SERVONA Silberkanüle (REF div.)**

Sehr geehrter Kunde,

in der Anlage erhalten Sie eine aktualisierte Gebrauchsanleitung (GBA) für Ihre **Servona Silberkanüle**. Diese musste auf Grund eines dringenden Sicherheitshinweises angepasst werden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die **Servona Silberkanüle** weiter verwenden und achten Sie besonders auf folgenden Inhalt:

**Achtung!**

**Nach der Reinigung, ggf. Desinfektion, kann die Servona Silberkanüle wieder eingesetzt werden. Um Gesundheitsrisiken auszuschließen, dürfen sich keinerlei Rückstände des Reinigungs- oder Desinfektionsmittels mehr auf der Kanüle befinden, wenn diese in das Tracheostoma/Trachea eingesetzt wird.**

**Auf keinen Fall Kanülen benutzen, deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist oder die Schäden, wie z. B. scharfe Kanten oder Risse aufweisen, da es sonst zu Verletzungen der Schleimhäute in der Luftröhre kommen könnte.**

**Schadhafte Kanülen dürfen nicht zur Anwendung kommen und müssen durch Hersteller oder Lieferanten wieder aufgearbeitet werden.**

**Eine regelmäßige Kontrolle vermeidet Gefahren!**

**Eine halbjährliche Wiederaufarbeitung durch die Servona GmbH oder nachweislich eingewiesenes Fachpersonal wird empfohlen.**

Bitte füllen Sie das Antwortschreiben vollständig aus und senden Sie es unterschrieben an die Servona GmbH zurück. Ein entsprechendes Rücksende-Kuvert liegt bei.

Sollten Sie Fragen zu der Benachrichtigung oder zu diesem Schreiben haben, können Sie sich ebenfalls an uns wenden.

Geschäftsführer: Dr. Thomas Bednarczyk  
Handelsregister: Amtsgericht Siegburg, HRB 9940  
IK-Nr. 33 053 0944  
USt.-IdNr. DE 122950345  
WEEE-Reg-Nr. DE21209435

Bankverbindung  
Commerzbank AG Köln  
IBAN:DE40 3704 0044 0500 2167 00  
SWIFT-Code: COBADEFF370

Bankverbindung  
Deutsche Bank AG Köln  
IBAN: DE38 3707 0060 0244 0030 00  
SWIFT-Code: DEUTDEKXXX

Mit freundlichen Grüßen  
**Servona GmbH**

i. A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Drolshagen', written in a cursive style.

Dr. Marcel Drolshagen  
SB-MPG/Regulatory Affairs

i. A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Norbert Wiegand', written in a cursive style.

Norbert Wiegand  
Produktmanagement

