

31 luglio 2018

A: Chirurghi/ospedali

Oggetto: AVVISO URGENTE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL CAMPO DI DISPOSITIVI MEDICI - RICHIAMO

Riferimento: ZFA 2018-00344

Prodotto interessato: Chiodo per fratture dell'anca Affixus

Consultare l'Allegato 2 per un elenco dei prodotti interessati



Zimmer Biomet sta conducendo un'azione sul campo per dispositivi medici (richiamo) riguardante specifici lotti del chiodo per fratture dell'anca Affixus a causa dell'impossibilità di far avanzare o retrarre la vite di bloccaggio dalla rispettiva posizione originale nel chiodo.

Rischi		
Descrivere le conseguenze immediate per la salute (lesioni o patologie) che potrebbero derivare dall'uso del prodotto in questione o dall'esposizione allo stesso.	Alta probabilità	Massima gravità
	Ritardo nei tempi dell'intervento chirurgico < 30 minuti per procurarsi un componente sostitutivo	Ritardo nei tempi dell'intervento chirurgico > 30 minuti per procurarsi un componente sostitutivo
Descrivere le conseguenze a lungo termine per la salute (lesioni o patologie) che potrebbero derivare dall'uso del prodotto in questione o dall'esposizione allo stesso.	Alta probabilità	Massima gravità
	Nessuno	Unione ritardata o non unione che rende necessario un intervento chirurgico.

Secondo la documentazione in nostro possesso, potreste aver ricevuto uno o più dei prodotti in questione. Le unità interessate sono state distribuite tra il 12 febbraio 2018 e il 25 giugno 2018 (distribuzione del fabbricante).

Responsabilità del chirurgo/dell'ospedale:

1. Leggere attentamente la presente notifica e accertarsi che il personale interessato sia a conoscenza del relativo contenuto.
2. Se la struttura ospedaliera ha a disposizione i prodotti interessati, fornire ai rappresentanti di vendita di Zimmer Biomet la necessaria assistenza alla messa in quarantena di tutti i prodotti interessati. Il rappresentante Zimmer Biomet collaborerà al ritiro del prodotto in questione dalla struttura interessata.
3. Compilare l'**Allegato 1 – Certificato di conferma** e inviarlo a fieldaction.ch@zimmerbiomet.com Il presente modulo deve essere restituito a Zimmer Biomet anche se presso la struttura ospedaliera non sono più presenti i dispositivi interessati.
4. Conservare una copia del modulo del Certificato di conferma negli archivi delle azioni sul campo ai fini di una eventuale verifica di conformità della documentazione presso la propria struttura.
5. Qualora dopo aver letto il presente avviso desideriate porre ulteriori domande o abbiate dubbi, contattare il rappresentante di vendita Zimmer Biomet.

Altre informazioni


Il presente avviso relativo alla sicurezza sul campo dei dispositivi medici è stato inoltrato a tutte le necessarie Autorità Competenti e al relativo Organismo Notificato in base a quanto previsto dalle normative per dispositivi medici applicabili, in conformità a MEDDEV 2.12-1 in Europa.

Vi chiediamo di informare Zimmer Biomet di eventuali eventi avversi associati a questo prodotto o ad altri prodotti Zimmer Biomet inviando una e-mail a winterthur.per@zimmerbiomet.com o al referente Zimmer Biomet locale.

Vi informiamo che secondo la prassi consueta, i nomi delle strutture utilizzatrici che hanno ricevuto le notifiche sono trasmessi alle Autorità Competenti a fini di controllo. Il sottoscritto conferma che il presente avviso è stato consegnato agli enti normativi appropriati.

Ringraziamo anticipatamente della gentile collaborazione e ci scusiamo degli eventuali disagi causati dalla presente azione sul campo.

Cordiali saluti

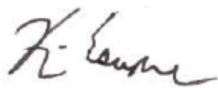

Kevin W. Escapule
Direttore Sorveglianza Post-Marketing e Conformità Normativa

ALLEGATO 1
Certificato di conferma**SI RICHIEDE RISPOSTA IMMEDIATA – SI RICHIEDE UN'AZIONE TEMPESTIVA****Prodotto interessato: Chiodo per fratture dell'anca Affixus****Riferimento dell'Azione sul Campo: ZFA 2018-00344**

Apponendo la firma sottostante confermo di aver intrapreso le azioni richieste secondo le specifiche della presente notifica di richiamo.

Nome in stampatello: _____ Firma: _____

Qualifica: _____ Telefono: _____

Data: ___/___/___

Nome della struttura:
_____Indirizzo della struttura:

Città: _____ CAP: _____ Paese: Italia

Nota: Il presente modulo deve essere restituito a Zimmer Biomet prima che questa azione possa ritenersi conclusa in relazione alla sua struttura. È importante compilare il presente modulo e inviarne una copia per e-mail a: fieldaction.ch@zimmerbiomet.com

Il presente modulo deve essere compilato, firmato e restituito a Zimmer Biomet anche se presso la struttura ospedaliera non sono più presenti i prodotti interessati.

Selezionare una delle opzioni seguenti:

In base ai controlli effettuati su tutte le scorte dei prodotti interessati devono essere restituiti i seguenti prodotti:

Codice del prodotto	Numero di lotto	Quantità di prodotti restituiti

OPPURE

Tutti i prodotti ricevuti sono stati scartati o sono andati perduti da parte della clinica/dell'ospedale

Note (se necessario): _____

ALLEGATO 2 - Elenco dei prodotti interessati

Codice: 814309180		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 9 mm x 180 mm			
Numeri di lotto:	017090	017100	017110	017120	063130
063190	188050	188080	188090	219720	219730
219740	219750	290520	290550	331360	371020
371060	455870	455890	530040	530060	530080
541100	559250	559260	559270	559290	688160
706780	899800	944420	530030	530090	
Codice: 814309280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 280 mm			
Numeri di lotto:	331370	500240			
Codice: 814309300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 300 mm			
Numeri di lotto:	017130	052890	052910		
Codice: 814309320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 320 mm			
Numeri di lotto:	789980				
Codice: 814309360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 360 mm			
Numeri di lotto:	050830	052950	417420		
Codice: 814309380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	814250				
Codice: 814309420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 420 mm			
Numeri di lotto:	151830	886880			
Codice: 814309440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 440 mm			
Numeri di lotto:	814090	899810			
Codice: 814309460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 460 mm			
Numeri di lotto:	097120	767700			
Codice: 814311180		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 11 mm x 180 mm			
Numeri di lotto:	017190	017200	017210	017240	017260
063270	063330	063360	063370	063400	087850
087870	097080	132740	153330	153470	153490
153510	153540	219770	219780	290570	290580
290620	500680	500710	500740	503300	503350
519650	565790	565800	585690	601380	628190

645550	645580	688170	688190	688200	688210
707670	741680	741690	741700	899820	899840
899850	899870	899880	900000		

Codice: 814311280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 280 mm			
Numeri di lotto:	500770				

Codice: 814311300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 300 mm			
Numeri di lotto:	132800				

Codice: 814311320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 320 mm			
Numeri di lotto:	900040				

Codice: 814311340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 340 mm			
Numeri di lotto:	152960	331460	456050		

Codice: 814311360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 360 mm			
Numeri di lotto:	132900	150870	331470	773070	

Codice: 814311380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	132920	188120	331480	688320	814070

Codice: 814311400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 400 mm			
Numeri di lotto:	097130	245980	417450	519300	854260
645620	645650				

Codice: 814311420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 420 mm			
Numeri di lotto:	060900	331520	417460	645670	688350

Codice: 814311440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 440 mm			
Numeri di lotto:	050850	155250	500840	541270	559240

Codice: 814311460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 460 mm			
Numeri di lotto:	017290	063450	155220	500860	

Codice: 814313180		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 180 mm			
Numeri di lotto:	060870	063550	063560	063570	114480
645700	900100	900250	944470		

Codice: 814313260		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 260 mm			
Numeri di lotto:	053670				

Codice: 814313280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 280 mm	
Numeri di lotto:	053750		
Codice: 814313300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 300 mm	
Numeri di lotto:	645720		
Codice: 814313320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 320 mm	
Numeri di lotto:	331530	971020	
Codice: 814313340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 340 mm	
Numeri di lotto:	133040	188240	645750
Codice: 814313360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 360 mm	
Numeri di lotto:	050870	501210	
Codice: 814313380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 380 mm	
Numeri di lotto:	482620	501270	
Codice: 814313400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 400 mm	
Numeri di lotto:	501350		
Codice: 814313420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 420 mm	
Numeri di lotto:	017300	097020	559190
Codice: 814313440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 440 mm	
Numeri di lotto:	155200	502270	
Codice: 814313460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 460 mm	
Numeri di lotto:	083760		
Codice: 814409260		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 260 mm	
Numeri di lotto:	971030		
Codice: 814409280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 280 mm	
Numeri di lotto:	707700		
Codice: 814409300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 300 mm	
Numeri di lotto:	133160		
Codice: 814409320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm	

		x 320 mm			
Numeri di lotto:	114560	133170			
Codice: 814409340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 340 mm			
Numeri di lotto:	212940	503520	565820		
Codice: 814409360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 360 mm			
Numeri di lotto:	097140	133190	144070		
Codice: 814409380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	053790	155180	762720	790780	813530
Codice: 814409400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 400 mm			
Numeri di lotto:	051130	053810	133200	153200	813940
Codice: 814409420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 420 mm			
Numeri di lotto:	503570				
Codice: 814409440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 440 mm			
Numeri di lotto:	503610				
Codice: 814409460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 460 mm			
Numeri di lotto:	097160	133230			
Codice: 814411260		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 260 mm			
Numeri di lotto:	503640				
Codice: 814411320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 320 mm			
Numeri di lotto:	155130				
Codice: 814411340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 340 mm			
Numeri di lotto:	530180	585810			
Codice: 814411360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 360 mm			
Numeri di lotto:	503700	646540	707750		
Codice: 814411380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	053940	813860	886990		
Codice: 814411400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 400 mm			

Numeri di lotto:	053980	053990	646590	768010	
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--

Codice: 814411420	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 420 mm				
Numeri di lotto:	155120	245960	472890		

Codice: 814411440	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 440 mm				
Numeri di lotto:	151870	155110	646620	960600	

Codice: 814411460	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 460 mm				
Numeri di lotto:	054000	097060			

Codice: 814413260	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 260 mm				
Numeri di lotto:	814090				

Codice: 814413280	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 280 mm				
Numeri di lotto:	559130				

Codice: 814413300	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 300 mm				
Numeri di lotto:	331610				

Codice: 814413320	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 320 mm				
Numeri di lotto:	245830	331620			

Codice: 814413340	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 340 mm				
Numeri di lotto:	482730				

Codice: 814413360	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 360 mm				
Numeri di lotto:	054030	054040	312200	312210	

Codice: 814413380	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 380 mm				
Numeri di lotto:	417480	646660			

Codice: 814413400	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 400 mm				
Numeri di lotto:	054100				

Codice: 814413420	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 420 mm				
Numeri di lotto:	155080	156070	156150	482640	

Codice: 814413460	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 460 mm				
Numeri di lotto:	155070				

Codice: 814509180		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 9 mm x 180 mm			
Numeri di lotto:	054130	085710	144520	150790	156740
	156750	219790	245740	245820	287290
	456140	482650	707780	900280	944590
	944640	970640			944630

Codice: 814509260		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 260 mm			
Numeri di lotto:	813650				

Codice: 814509280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 280 mm			
Numeri di lotto:	768020				

Codice: 814509300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 300 mm			
Numeri di lotto:	212980				

Codice: 814509320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 320 mm			
Numeri di lotto:	530190	887000	971580		

Codice: 814509340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 340 mm			
Numeri di lotto:	503940	646730			

Codice: 814509360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 360 mm			
Numeri di lotto:	813470				

Codice: 814509380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	628920	646790	773060		

Codice: 814509400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 400 mm			
Numeri di lotto:	646830				

Codice: 814509420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 420 mm			
Numeri di lotto:	153010	159190	707830		

Codice: 814509440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 440 mm			
Numeri di lotto:	054150	054170	130740	130750	188310
	519480				

Codice: 814509460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 460 mm			
Numeri di lotto:	254720				

Codice: 814511180		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 11 mm x 180 mm			
Numeri di lotto:	072620	130760	130770	130780	130790
	130800	130810	130820	130840	130850
	130900	130920	131030	156770	157000
	219800	219810	219820	219910	245570
	287090	287120	287130	371170	456160
	530110	530120	530130	558980	565870
	601390	707920	768050	772730	854270
	901330	901350	901360	901370	901380
	901410	944660	944720	970790	970810
	970830	970840	970850	970860	970870
	970890				970880

Codice: 814511260		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 260 mm			
Numeri di lotto:	791640	813460			

Codice: 814511280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 280 mm			
Numeri di lotto:	155000	483480	646910	646930	646950

Codice: 814511300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 300 mm			
Numeri di lotto:	558960				

Codice: 814511320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 320 mm			
Numeri di lotto:	331650				

Codice: 814511340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 340 mm			
Numeri di lotto:	054180	483490	519590	558900	558910
	586640				

Codice: 814511360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 360 mm			
Numeri di lotto:	107830	107850	152910	154990	482740
	519610	565900	707960	762780	773410
	812330				812310

Codice: 814511380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	054200	054210	054220		

Codice: 814511400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 400 mm			
Numeri di lotto:	054240	054250	154980	472860	773390
	798600	798610			

Codice: 814511420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 420 mm			
Numeri di lotto:	154960	558870	558880	628930	707860
Codice: 814511440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 440 mm			
Numeri di lotto:	213000	558850			
Codice: 814511460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 460 mm			
Numeri di lotto:	157130	558840	710910		
Codice: 814513180		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 180 mm			
Numeri di lotto:	063590	063600	220020	245510	290720
	371210	482750	482760	482770	523410
Codice: 814513260		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 260 mm			
Numeri di lotto:	901420				
Codice: 814513280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 280 mm			
Numeri di lotto:	213010	707970	944730		
Codice: 814513300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 300 mm			
Numeri di lotto:	944850				
Codice: 814513340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 340 mm			
Numeri di lotto:	017700				
Codice: 814513380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	587670	707980	711060		
Codice: 814513400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 400 mm			
Numeri di lotto:	152980	482780	530160	798520	798530
	798540				
Codice: 814513420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 420 mm			
Numeri di lotto:	060800	060820	397280	397290	397300
	812970	901490			
Codice: 814513440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 440 mm			
Numeri di lotto:	154920	711080			
Codice: 814513460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 460 mm			

Numeri di lotto:	558790	711090			
Codice: 814515320	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 320 mm				
Numeri di lotto:	154900	818440			
Codice: 814515360	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 360 mm				
Numeri di lotto:	154890	814740			
Codice: 814515400	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 400 mm				
Numeri di lotto:	364250				
Codice: 814515440	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 440 mm				
Numeri di lotto:	154880				
Codice: 814609260	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 260 mm				
Numeri di lotto:	157170				
Codice: 814609280	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 280 mm				
Numeri di lotto:	107860	558680	791850		
Codice: 814609320	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 320 mm				
Numeri di lotto:	055260	154870			
Codice: 814609360	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 360 mm				
Numeri di lotto:	287140				
Codice: 814609400	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 400 mm				
Numeri di lotto:	055360	055510	157290	917700	972060
Codice: 814609420	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 420 mm				
Numeri di lotto:	762840				
Codice: 814609460	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 460 mm				
Numeri di lotto:	055580	154820	154830		
Codice: 814611260	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 260 mm				
Numeri di lotto:	091610	558640	629150		

Codice: 814611280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 280 mm			
Numeri di lotto:	711150	711170			

Codice: 814611320		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 320 mm			
Numeri di lotto:	331940	558590			

Codice: 814611340		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 340 mm			
Numeri di lotto:	154800	154810	155350	629170	

Codice: 814611360		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 360 mm			
Numeri di lotto:	017730	085400	154660	154670	154680
	157450	558510	565960	694270	711210
	812730	818350	945040		812570

Codice: 814611380		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 380 mm			
Numeri di lotto:	152900	154610	901540	901550	901560
	901570	901580	901590	901600	565970

Codice: 814611400		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 400 mm			
Numeri di lotto:	060780	154560	482790	530170	759190
	797000	797020	812460	812540	

Codice: 814611420		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 420 mm			
Numeri di lotto:	154540	155340	712170	791890	

Codice: 814611440		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 440 mm			
Numeri di lotto:	558490	759400			

Codice: 814611460		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 460 mm			
Numeri di lotto:	171830	712290			

Codice: 814613260		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 260 mm			
Numeri di lotto:	171820	972190			

Codice: 814613280		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 280 mm			
Numeri di lotto:	688510	763000			

Codice: 814613300		Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 300 mm			
--------------------------	--	--	--	--	--

Numeri di lotto:	818430	960660			
Codice: 814613320	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 320 mm				
Numeri di lotto:	245390	287180			
Codice: 814613340	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 340 mm				
Numeri di lotto:	331960				
Codice: 814613360	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 360 mm				
Numeri di lotto:	816070				
Codice: 814613380	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 380 mm				
Numeri di lotto:	712320				
Codice: 814613400	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 400 mm				
Numeri di lotto:	055730	060770	154510	558410	712370
Codice: 814613420	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 420 mm				
Numeri di lotto:	154480				
Codice: 814613440	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 440 mm				
Numeri di lotto:	157490	482830			
Codice: 814613460	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 460 mm				
Numeri di lotto:	055760	154460	503740	558390	712400
Codice: 814615360	Descrizione articolo: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 15 mm x 360 mm				
Numeri di lotto:	154450				