



URGENTE: Avviso di sicurezza

[GIORNO MESE], 2018

[NOME UTENTE CARROZZINA PERMOBIL]

[INDIRIZZO]

[CITTÀ, STATO, CAP]

Egregio utente della carrozzina TiLite,

Con la presente, la informiamo che TiLite ha avviato volontariamente la modifica di determinati dispositivi antiribaltamento TiLite. La modifica riguarda i seguenti modelli:

TRA
Aero T
ZRA
Aero Z
2GX
Aero X
Twist
Aero R

La modifica si è resa necessaria a causa di un potenziale difetto al dispositivo antiribaltamento. In caso di cedimento di uno oppure di entrambi i dispositivi di ribaltamento, l'utente potrebbe cadere all'indietro con conseguente rischio di lesioni personali.

Questo avviso le è stato inviato in quanto dai nostri registri risulta che sia in possesso di una delle carrozzine interessate. TiLite ha individuato il problema e sta provvedendo alla riparazione di questi dispositivi.

Il suo rivenditore provvederà a contattarla al più presto per l'ispezione e la sostituzione dei dispositivi antiribaltamento e per ulteriori istruzioni.

La preghiamo di contattare **Angelica Maki** in TiLite per eventuali domande o dubbi in merito al presente avviso oppure alla sicurezza e alle prestazioni della sua carrozzina:

Telefono (USA): 1-800-545-2266, extension 213, 8:00 AM - 5:00 PM American Pacific Time, Lunedì – Venerdì, *oppure*

E-mail: angelica.maki@permobil.com.

Non esiti a contattarci in caso di eventuali domande.

Cordiali saluti,
TiLite