



# Dringender Sicherheitshinweis

## FMI-Kit für Getriebe

GMM hat im Rahmen einer Überprüfung zur Haltbarkeit und Zuverlässigkeit seiner Produkte Maßnahmen zur Verbesserung einiger Komponenten beschlossen.

Betroffene Produkte: Tische mit der Seriennummer 010/313 (Systemnummer 01/135) bis zur Nummer 33130 (Systemnummer 00819) ausgeschlossen, entsprechend den folgenden Produktnamen:

<i>Name</i>	<i>Marke</i>
Clisis (Vers. 90-90)	Mecall
Clisis access (Vers. 90-90)	Mecall
Clisis exel (Vers. 90-90)	Mecall
Clisis (Vers. 90-90) exel DRF	Mecall
Clisis DRF (Vers. 90-90)	Mecall
Clisis access DRF (Vers. 90-90)	Mecall
OPERA SOUND (vers. 90-90)	GMM
OPERA SOUND DRF (vers. 90-90)	GMM
Clisis Verso (vers. 90-90)	Mecall
Nikaia classic (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia access (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia exel (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia access DRF (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia exel DRF (vers. 90-90)	Primax International
Connexity	General Electric

### Beschreibung:

Ein Getriebe für die Übertragung des ferngesteuerten Kippens des Tisches könnte mit der Zeit eine Verringerung der Zuverlässigkeit aufweisen; beispielsweise verursacht durch Kollision während der Kippphase, durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Vorrichtung oder durch die Belastung mit zu hohem Gewicht, durch nicht, nur teilweise oder fehlerhaft durchgeführte vorbeugende Wartung oder durch eine bestimmte außergewöhnlich intensive Nutzung.

### Korrigierende Maßnahme:

Es wurde der Code 81744 – Getriebe-Kit – für den Einsatz auf der gesamten installierten Basis geschaffen. Das Kit enthält alle für den Ersatz von Komponenten nötigen Teile und Anleitungen.

### Achtung!

**Die Anweisungen müssen vollständig ausgefüllt und per E-Mail oder Fax an den Hersteller, an die folgende Adresse, zurückgesandt werden**

**GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.**

**Schicken Sie eine E-Mail an [luca.bianchessi@gmmspa.com](mailto:luca.bianchessi@gmmspa.com) oder [service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com) oder ein Fax an die Nummer +39 035 29 77 87**

General Medical Merate S.p.A.

Werk, Rechts- und Verwaltungssitz:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIEN - Tel.: +39 035 4525311 - Fax: +39 035 299537/297787

Werk: Viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel.: +39 080 775340 - Fax: +39 080 764306

Büro: Via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROM - Tel.: +39 06 8274437 - Fax: +39 06 8274455

USt.-Nr. Steuernr. und Unternehmensregister von BG N° 00225500164

MinComEs Nr. BG 12002139 - Gesellschaftskapital € 4.850.883,00

IHK R.E.A. Bergamo 138291 - Postkonto 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Batterien-Register: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) - [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) - Zertifizierte E-Mail: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Zert. Nr.  
9120.GNM1



Zert. Nr.  
9124.GNM2

Wir weisen darauf hin, dass bis heute kein Ereignis gemeldet wurde, das Sachschäden oder Verletzungen von Personen verursacht hat, die auf die in dieser Mitteilung beschriebenen Punkte zurückzuführen sind. Dennoch müssen die beschriebenen Maßnahmen ergriffen werden, um potenzielles Risiko, das die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen könnte, zu mindern.

Aus diesem Grund muss der mitgelieferte Bausatz während der ersten ordentlichen oder außerordentlichen Wartung und in jedem Fall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung eingebaut werden; sukzessive beginnend mit den zuerst gelieferten/installierten Geräten.

GMM übernimmt keinerlei Verantwortung, falls die oben beschriebenen Maßnahmen nicht innerhalb der in dieser Mitteilung angegebenen Frist durchgeführt werden.

Der technische Kundendienst von GMM steht für weitere Informationen und zur Unterstützung zur Verfügung.

[service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com)

## General Medical Merate S.p.A.

Werk, Rechts- und Verwaltungssitz:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIEN - Tel.: +39 035 4525311 - Fax: +39 035 299537/297787

Werk: Viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel.: +39 080 775340 - Fax: +39 080 764306

Büro: Via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROM - Tel.: +39 06 8274437 - Fax: +39 06 8274455

USt.-Nr. Steuernr. und Unternehmensregister von BG N° 00225500164

MinComEs Nr. BG 12002139 - Gesellschaftskapital € 4.850.883,00

IHK R.E.A. Bergamo 138291 - Postkonto 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Batterien-Register: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) - [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) - Zertifizierte E-Mail: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Zert. Nr.  
9120.GNM1



Zert. Nr.  
9124.GNM2