

Dringende Sicherheitsinformation **Medtronic Conexus™ Telemetrie: Aktualisierung unserer Kommunikation** **vom März 2020**

Software Update

Produkt Name	Modellnummer
CareLink™ 2090 Programmer	2090; alle Seriennummern
CareLink Encore™ 29901 Programmer	29901; alle Seriennummern

Juni 2020

Medtronic Referenz: FA844 Phase IV

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über Verbesserungen der Cybersecurity, die mit Schwachstellen in der Medtronic Conexus™ Telemetrie zusammenhängen. Medtronic hat die behördliche Genehmigung dafür eine Reihe von Updates herauszugeben, die diese Schwachstellen beheben.

Die Conexus-Telemetrie ist ein firmeneigenes drahtloses Hochfrequenz-Kommunikationsprotokoll zwischen Medtronic-Programmiergeräten und bestimmten Medtronic ICDs (implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren) und CRT-Ds (implantierbare Defibrillatoren für die kardiale Resynchronisationstherapie).

Am 21. März 2019 veröffentlichte Medtronic ein Security Bulletin zu diesen Schwachstellen und im März 2020 wurden Kunden über die geplanten Updates, die diese Schwachstellen beheben, informiert.

Hintergrundinformationen, einschliesslich einer Liste der Geräte, die Gegenstand dieser Mitteilung sind, finden Sie im Security Bulletin unter <http://www.medtronic.com/security>.

Der für Ihre Einrichtung zuständige Medtronic Repräsentant kann Sie bei der Installation des Conexus™ Telemetrie Updates auf die Programmiergeräte Ihres Hauses unterstützen.

Der Abschluss der Programmiergeräte-Updates kann sich aufgrund von Restriktionen in Ihrer Einrichtung, bedingt durch die COVID 19 Pandemie, verzögern.

Während einer Geräte-Abfrage mit einem aktualisierten Programmiergerät im Rahmen der Implantation oder des nächsten regulären Klinikbesuchs, erhält das Implantat des Patienten automatisch die aktualisierte Software.

Es ist nicht notwendig, Patienten ausserhalb ihrer geplanten Termine einzubestellen, da es keine Berichte darüber gibt, dass Patienten aufgrund des beschriebenen Sachverhalts geschädigt wurden.

Nachfolgend sind die Software Updates für die Conexus Telemetrie aufgeführt:

Software Updates für Conexus Telemetrie
Viva-Brava-Evera (SW016) v8.3
Evera MRI (SW033) v8.4
- einschliesslich Primo MRI, Mirro MRI
Visia AF, Visia AF MRI (SW035) v8.2

Weitergabe der hier beschriebenen Informationen

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anwender der genannten Produkte und sonstige zu informierende Personen in Ihrer Organisation Kenntnis von dieser dringenden Sicherheitsinformation erhalten. Sofern Sie die Produkte an Dritte abgegeben haben, leiten Sie bitte eine Kopie dieser Information weiter oder informieren Sie die unten angegebenen Kontaktpersonen. Bitte bewahren Sie diese Information zumindest solange auf, bis die Massnahme abgeschlossen wurde.

Swissmedic – das Schweizerische Heilmittelinstitut hat eine Kopie dieser dringenden Sicherheitsinformation erhalten.

Wenn Sie Fragen zu dieser Aktion haben, wenden Sie sich bitte an den für Ihre Einrichtung zuständigen Medtronic Repräsentanten.

Freundliche Grüsse
Medtronic (Schweiz) AG