

Dräger Schweiz AG, CH-3097 Liebefeld

À l'attention de nos clients et des utilisateurs de
Fabius équipés d'une sortie externe de gaz
frais commune (ACGO)

Date
13.11.2018

Notre référence
PR81259

Tél.
+41 58 748 74 74

Fax
+41 58 748 74 01

E-Mail
quality.ch@draeger.com

Station d'anesthésie Fabius

Ajout d'une étiquette autocollante supplémentaire par appareil – sortie externe de gaz frais/sortie externe de gaz frais commune

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à la consigne de sécurité importante, émise par Dräger au mois d'octobre 2017, dont l'objet était que la sortie externe de gaz frais (avec commutateur)/la sortie externe de gaz frais commune au niveau de la station d'anesthésie n'a dans certains cas pas été utilisée conformément à la notice d'utilisation. Pour cette raison, Dräger avait décrit le fonctionnement des systèmes de réinhalation, et avait de nouveau mis l'accent sur les recommandations relatives à la sécurité lors de l'utilisation de la sortie externe de gaz frais (avec commutateur)/la sortie externe de gaz frais commune dans les stations d'anesthésie Fabius, telles qu'elles se trouvent dans la notice d'utilisation.

Nous avons par ailleurs déjà indiqué dans notre premier courrier que nous avons l'intention de créer une étiquette autocollante en tant que rappel supplémentaire afin que l'utilisateur vérifie la configuration d'acheminement du gaz frais au début de la ventilation automatique ou de la ventilation ManSpont, (c'est-à-dire, en utilisant le système de réinhalation COSY).

Selon nos informations vous utilisez «Anzahl_Geräte» appareils avec cette configuration.

Le nombre nécessaire de cette nouvelle étiquette ainsi qu'un complément à la notice d'utilisation sont joints au présent courrier.

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
CH-3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74 phone
+41 58 748 74 01 fax
+41 58 748 75 75 Service

Dräger Schweiz AG
Brandbachstrasse 10
CH-8305 Dietlikon

Dräger Suisse SA
Rue du Grand-Pré 4
CH-1007 Lausanne

www.draeger.com
info.ch@draeger.com
CHE-105.927.413 MWST
ZAZ 3649-1
PC 30-3106-0

UBS AG, 3000 Bern 94
BIC: UBSWCHZH80A
CHF IBAN: CH31 0023 5235 3763 0101 V
EUR IBAN: CH22 0023 5235 3763 0161 D
USD IBAN: CH10 0023 5235 3763 0163 T

L'étiquette comporte une illustration et une description écrite, elle doit être apposée au niveau du panneau de commande du ventilateur, à savoir à côté des touches de réglage des modes ventilatoires. Il existe une étiquette pour chaque option de sortie externe de gaz frais :

	Option Sortie externe de gaz frais	Sortie externe de gaz frais avec commutateur supplémentaire
<p><i>Description dans la notice d'utilisation</i></p> <p><i>Aufkleber</i></p>	<p>En mode de ventilation automatique (VC, PC, Aide Inspiratoire, VACI/AI) ou de ventilation Man / Spont,.....</p> <p>...raccorder le tuyau de gaz frais court à la sortie externe de gaz frais.</p> 	<p>...mettre le commutateur de la sortie externe de gaz frais en position COSY.</p> 

Veuillez choisir l'étiquette correspondant à la configuration de votre appareil ainsi qu'à votre langue et les apposer sur le panneau de commande du ventilateur, conformément aux instructions qui se trouvent sur l'étiquette autocollante.

Nous vous prions de nous confirmer la bonne réception de ce courrier au moyen du formulaire ci-joint ou par un bréf E-Mail à quality.ch@draeger.com.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Meilleures salutations
Dräger Schweiz AG



Jürg Kaltenrieder
Service Manager



Claudia Tschannen
Quality Manager

Annexes:

«Anzahl_Geräte» Sets Etiquettes et compléments à la notice d'utilisation