

## Medtronic (Suisse) SA

Talstrasse 9  
3053 Münchenbuchsee  
www.medtronic.ch

Tél. 031 868 01 00  
Fax 031 868 01 99  
E-Mail swisscontact@medtronic.com

## **Information Urgente de Sécurité** **Pour un sous-ensemble de pacemakers double chambre Medtronic** Rappel de produit et recommandations de prise en charge des patients

Janvier 2019

### **Référence Medtronic : FA857**

Cher médecin ou professionnel de la santé,

Cette lettre a pour but de vous informer d'un rappel volontaire et d'une suspension de distribution affectant un sous-ensemble de pacemakers double chambre Medtronic distribués dans le monde entier entre le 10 mars 2017 et le 7 janvier 2019 sous les noms de marque **Adapta™, Versa™, Sensia™, Relia™, Attesta™, Sphera™ et Vitatron™ A, E, G, Q Série**. Veuillez noter que seule une partie de ces dispositifs sont affectés par ce rappel. Cette lettre contient une description du problème ainsi que des recommandations de programmation.

Les dispositifs du sous-ensemble affecté, lorsqu'ils sont programmés en mode double chambre avec détection auriculaire, peuvent être sujet à une erreur de circuit qui affecte les fonctionnalités du dispositif. Pour que cette erreur se produise, une unique combinaison d'événements doit avoir lieu pendant que le dispositif traite un événement de détection auriculaire. Si cette erreur se produit, le dispositif sera incapable de fournir une stimulation jusqu'à ce qu'un événement de détection ventriculaire (VS) soit détecté. Une fois un VS détecté, la fonctionnalité de stimulation normale est restaurée immédiatement. Si aucun VS n'est détecté, le dispositif suspendra à la fois la stimulation auriculaire et ventriculaire. De plus, le dispositif sera incapable d'initier une session avec un programmateur, de démarrer une session à distance avec un moniteur CareLink™, ou de répondre à un aimant et ce, jusqu'à ce qu'un VS soit détecté. Les modes de stimulation simple et double chambre qui ne détectent pas les activités auriculaires ne sont pas susceptibles de rencontrer cette erreur de circuit (Voir tableau 1).

**Tableau 1:** Identification des modes susceptibles de présenter ou non l'erreur de circuit

<b>Modes susceptibles de présenter l'erreur de circuit</b>	<b>Modes NON susceptibles de présenter l'erreur de circuit</b>
DDD, DDDR	VVI, VVIR
DDI, DDIR	DVI, DVIR
VDD	AAI, AAIR
ADI, ADIR	VOO, VOOR
VDI, VDIR	AOO, AOOR
ODO	DOO, DOOR
OAO	OVO
MVP-lors de l'utilisation en mode DDD, DDDR, DDI ou DDIR	VVT, AAT

A la date du 4 Janvier 2019, Medtronic avait connaissance de quatre (4) occurrences signalées chez deux (2) patients où une pause dans la thérapie de stimulation est apparue cliniquement en raison de cette erreur de circuit. Ces événements signalés se sont produits pour trois (3) dispositifs sur un total de 156,957 dispositifs vendus dans le monde entier. Aucun décès n'a été signalé à la suite de ce problème.

Le risque patient est déterminé par le rythme cardiaque sous-jacent du patient et la programmation du dispositif dans un mode de stimulation susceptible de présenter l'erreur comme décrit ci-dessus. Après analyse, Medtronic estime qu'en moyenne, un dispositif dans un mode de stimulation susceptible de présenter l'erreur a une probabilité de 2,8% par mois de présenter une pause de 1,5 secondes ou plus. Le risque est minimisé chez les patients qui ont un rythme d'échappement adéquat pour éviter une syncope lors d'une perte de stimulation ventriculaire, jusqu'à ce qu'un VS restaure la fonctionnalité complète du dispositif. Aucun risque de pause dû à cette erreur de circuit n'existe pour les patients programmés dans un mode de stimulation non susceptible de présenter l'erreur.

La cause de ce problème est liée à une modification de conception d'un circuit intégré dans un sous-ensemble de dispositifs qui ont été distribués entre le 10 mars 2017 et le 7 janvier 2019.

Medtronic développe une mise à jour logicielle qui pourra être installée dans les dispositifs concernés pour corriger ce problème. Medtronic estime la soumission de cette mise à jour logicielle aux agences réglementaires d'ici la deuxième moitié de 2019. Après l'approbation réglementaire, Medtronic informera les clients de sa disponibilité. En attendant, Medtronic fournit les recommandations de prise en charge des patients décrites ci-dessous et représentées à l'annexe A.

Les patients et les médecins peuvent déterminer si un dispositif spécifique est affecté en saisissant le numéro de série sur le site de Performance Produit de Medtronic :

<http://wwwp.medtronic.com/productperformance/>.

Les dossiers de Medtronic indiquent que votre établissement peut avoir des dispositifs en stock potentiellement concernés par ce problème. Par conséquent, Medtronic vous demande de prendre immédiatement les mesures suivantes :

1. Isolez et retirez tous les dispositifs affectés non utilisés de votre inventaire.
2. Retournez tous les dispositifs affectés inutilisés de votre inventaire à Medtronic. Votre représentant Medtronic peut vous assister pour le retour et le remplacement de ce produit si besoin.

## Recommandations de prise en charge des patients

Nous réalisons que le cas de chaque patient a besoin d'être considéré cliniquement de manière individuelle. En accord avec notre panel qualité indépendant de praticiens, **Medtronic recommande la programmation dans un mode de stimulation non susceptible de présenter l'erreur comme première mesure d'atténuation du risque pour les patients implantés avec un dispositif affecté jusqu'à ce que la mise à jour logicielle ait été installée.** L'évaluation spécifique des risques patients et les recommandations de programmation sont décrites ci-dessous et fournies dans l'annexe A.

- **Pour les patients dont le dispositif est programmé dans un mode non susceptible de présenter l'erreur (voir tableau 1), aucune action n'est nécessaire pour le moment. Continuer la surveillance clinique de routine.**
- **Pour les patients dont le dispositif est programmé dans un mode susceptible de présenter l'erreur et qui sont continuellement en fibrillation auriculaire persistante, la reprogrammation du dispositif dans un mode VVI ou VVIR non susceptible de présenter l'erreur est recommandée pour éliminer le risque lié à ce problème jusqu'à ce que la mise à jour logicielle ait été installée. Continuer la surveillance clinique de routine.**

- **Pour les patients dont le dispositif est programmé dans un mode susceptible de présenter l'erreur et qui se trouvent dans l'un ou l'autre des cas suivants : *n'ont pas de rythme d'échappement ventriculaire sous-jacent ; ou ont un risque de pause symptomatique jusqu'à ce qu'un battement d'échappement ventriculaire se produise*, la programmation dans un mode non susceptible de présenter l'erreur est recommandée pour éliminer le risque lié à ce problème jusqu'à ce que la mise à jour logicielle ait été installée. Continuer la surveillance clinique de routine.**
- **Pour les patients qui ne tolèrent pas la programmation dans un mode de stimulation non susceptible de présenter l'erreur et qui se trouvent dans l'un ou l'autre des cas suivants: *n'ont pas de rythme d'échappement ventriculaire sous-jacent ; ou ont un risque de pause symptomatique jusqu'à ce qu'un battement d'échappement ventriculaire se produise*, continuer la surveillance clinique dans un mode susceptible de présenter l'erreur jusqu'à ce que la mise à jour logicielle soit disponible, ou considérer le remplacement du dispositif.**
  - Le risque de mortalité par patient estimé en raison de ce problème est de 0,021% lorsqu'il est programmé dans un mode de stimulation susceptible de présenter l'erreur pendant la période estimée jusqu'à ce que la mise à jour logicielle soit disponible. Ce risque est comparable au risque de mortalité par patient estimé par Medtronic associé à un remplacement de dispositif (0,027%)\*.
  - Si un patient signale des symptômes concordant avec une pause de stimulation, et si vous souhaitez obtenir de l'aide pour évaluer si la raison de la pause est liée à ce problème, contactez votre représentant Medtronic.
- **Conseiller les patients qui restent dans un mode susceptible de présenter l'erreur de consulter immédiatement un médecin s'ils éprouvent des symptômes nouveaux ou inattendus concordant avec ceux d'une pause de stimulation.**
- **Hormis la reprogrammation dans un mode de stimulation non susceptible de présenter l'erreur, il n'a pas été identifié d'option de programmation supplémentaire pour atténuer ce problème.**

Swissmedic - l'Institut suisse des produits thérapeutiques a été informé de cette action.

Veuillez partager cette notification avec toutes personnes appropriées de votre organisation.

Nous regrettons sincèrement toutes les difficultés que cette action pourrait entraîner pour vous et vos patients. Medtronic reste dédié à la sécurité des patients et continuera à surveiller les performances du dispositif pour s'assurer que nous satisfaisons vos besoins et ceux de vos patients.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant Medtronic.

Sincère Salutations,

Sincères salutations,  
Medtronic (Schweiz) AG

---

\* Medtronic Data on File. MDT2260884-CRHF CIED Infection Report; MRCS: MDT2260884, Version 2.0, 11/02/2015.

Annexe A : Organigramme de décisions de programmation

