

# RANDOX

## Avviso di azione correttiva di sicurezza urgente

Randox Laboratories Ltd  
55 Diamond Road Crumlin  
Regno Unito BT29 4QY  
[technical.services@randox.com](mailto:technical.services@randox.com)  
Tel.: +44 (0) 28 9445 1070

Data di rilascio: 23 settembre 2019

Riferimento del reclamo: REC422

Tipo di azione: Richiamo - Ritiro prodotti

### Informazioni sui dispositivi interessati:

Secondo le nostre informazioni, la Sua struttura potrebbe aver ricevuto il seguente prodotto

Nome dispositivo	Numero di catalogo	GTIN	Numero di lotto	Data di scadenza	Data di fabbricazione
NEFA	FA115	05055273203066	485343	28 maggio 2021	31 maggio 2019

### Motivo dell'azione:

Gli acidi grassi non esterificati (NEFA) FA115, lotto 485343, mostrano un cambiamento positivo nel recupero di campioni di pazienti di circa il 10% al limite della decisione medica. Il recupero a concentrazioni inferiori aumenta man mano che la concentrazione diminuisce. Campioni bassi anormali sono improbabili da rilevare.

Questo lotto del materiale non soddisfa le prestazioni dichiarate e non deve essere utilizzato nei prossimi esami.

### Rischi per la salute:

I NEFA possono essere elevati nei soggetti con obesità centrale, resistenza all'insulina e diabete di tipo II. Vengono calcolati come parte di un profilo di esami del sangue per indagare sui disturbi metabolici. Anche se i risultati del paziente appariranno elevati con questo lotto, i risultati potrebbero non corrispondere al profilo del paziente. Il materiale di controllo della qualità può essere elevato, tuttavia può ancora recuperare entro la gamma.

### Azioni da intraprendere:

- Interrompere immediatamente l'uso e scartare il prodotto di cui sopra.
- Riveda i risultati generati con i lotti interessati in linea con il profilo clinico del paziente.
- È necessario discutere del contenuto del presente avviso con il responsabile medico.
- Rivedere l'inventario di reagenti di questi prodotti e valutare le esigenze dei laboratori relative al rimborso dell'inventario scartato.
- Compilare e restituire il modulo di risposta 12187-QA a [technical.services@randox.com](mailto:technical.services@randox.com) entro cinque giorni lavorativi.

**RANDOX**  
**Avviso di azione correttiva**  
**di sicurezza urgente**

Radox Laboratories Ltd  
55 Diamond Road Crumlin  
Regno Unito BT29 4QY  
[technical.services@radox.com](mailto:technical.services@radox.com)  
Tel.: +44 (0) 28 9445 1070

**Trasmissione dell'avviso di azione correttiva di sicurezza:** Invii una copia dell'avviso di azione correttiva di sicurezza a tutti i clienti interessati e ai membri della Sua organizzazione che devono esserne messi al corrente.

Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti. Grazie per la pazienza e la comprensione. Per qualsiasi domanda o dubbio, La invitiamo a contattare i servizi tecnici Radox.

**Il/la sottoscritto/a conferma che questo avviso è stato trasmesso all'ente regolatorio appropriato.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. P.', is written above a solid horizontal line.