

Avis relatif à la sécurité

Cher client,

Cette lettre a pour but de vous informer d'une action de maintenance corrective à effectuer au plus tard le 12 août 2020 sur les modèles anciens de chaises de travail Euroflex équipés d'un châssis Forma, ceci afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs. Ces chaises sont fabriquées entre le 1/1/2014 et le 1/12/2016

Appellation commerciale des produits : Chaises de travail Euroflex avec châssis Forma. **Numéros de référence :** 80XXXXXX, 241-XX, 242-XX, 291-XX, 292-XX et 841-XX, 891-XX

Description du risque : Eurovema Mobility a découvert que la vis qui maintient les moitiés du châssis ensemble sur les sièges de travail plus anciens peut se desserrer avec le temps. La vis risque de se casser ou de se desserrer complètement et de faire s'effondrer le châssis en son milieu.

Action corrective : Afin de minimiser les risques d'accident, vérifiez la vis du châssis de votre chaise de travail et réparez le cas échéant, conformément aux instructions du fabricant.

Informations aux utilisateurs : Si vous pensez que votre chaise de travail ne semble pas stable lors de son déplacement, contactez votre centre d'assistance local ou votre distributeur pour effectuer un contrôle et mettre en place une action.

Produits concernés : La liste des éventuels numéros de série des produits concernés sera envoyée aux distributeurs d'Eurovema Mobility situés dans les pays européens concernés. Le nom du produit, le numéro de série et la date de fabrication sont indiqués sur l'étiquette au dos du châssis.

Informations sur les actions que le fabricant va entreprendre :

- Eurovema Mobility va émettre un avis de sécurité destiné aux pays européens concernés et demandera à leurs distributeurs de localiser et de vérifier les produits concernés, conformément à la liste de numéros de série ci-jointe.
- Eurovema Mobility demandera à ses distributeurs de contacter tous les utilisateurs concernés et les fournisseurs locaux et de leur communiquer ces informations de sécurité. Il sera demandé aux utilisateurs de répondre à leurs fournisseurs ou distributeurs locaux avec l'accusé de réception joint à l'avis de sécurité.
- Le calendrier de cette action sera décidé en consultation avec les pays et les distributeurs concernés.
- Les pièces de rechange, ainsi que les instructions de montage, seront envoyées à tous les distributeurs concernés.

Mesure à prendre par le distributeur et l'utilisateur :

- Ce message doit être transmis aux organisations concernées ou à d'autres organisations qui ont reçu le produit susceptible de présenter un risque.
- Veuillez noter que toutes les chaises de travail ne sont pas concernées par ce défaut. Seules les chaises fabriquées entre le 1/1/2014 et le 1/12/2016 portant les numéros de série figurant dans la liste ci-jointe.

Contacter le fabricant

Eurovema Mobility AB
vendredi.

Baldersvägen 38
332 35 Gislaved
Suède

Téléphone : +46 734 425911 Heures de travail : 08h00-16h00, du lundi au

E-mail : info@eurovema.se

La priorité absolue d'Eurovema Mobility est de garantir la qualité et la sécurité de nos produits.

Nous nous excusons pour cette situation regrettable qui s'est produite et pour le dérangement et les inconvénients que cela pourrait causer. Le/la soussigné(e) confirme que cet avis de sécurité a été signalé à l'autorité de régulation compétente.

Gislaved, Suède, le 2 juillet 2019

Vesa Järvenpää
Responsable technique, Eurovema Mobility AB

La confirmation de la bonne réception de l'avis de sécurité

Je confirme par la présente, en tant que propriétaire / utilisateur responsable du produit susmentionné, que j'ai reçu les informations concernant l'important avis de sécurité portant la référence FSCA _____ Daté du _____

J'ai lu et compris les instructions de cet important avis de sécurité.

Oui Non



Nom de la personne qui a rempli le formulaire (en lettres majuscules) :

Titre :

Institution / Service : _____

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Veillez renvoyer le formulaire rempli à votre fournisseur local ou à votre centre d'approvisionnement.

E-mail :

ou le poster

Serial numbers, work chairs with Forma chassis. Manufactured 1. 1. 2014 – 1. 12. 2016

1040094008	1040104793	1040111990
1040094053	1040105198	1040112020
1040094124	1040105298	1040112074
1040094329	1040105383	1040112073
1040095413	1040106159	1040106079
1040095506	1040106342	1040112118
1040095956	1040106887	1040112387
1040096210	1040106983	1040113053
1040097160	1040106986	1040113114
1040096405	1040107070	1040113326
1040096508	1040107200	1040113325
1040097304	1040107289	1040113230
1040097449	1040107409	1040113330
1040098226	1040107422	1040113329
1040098889	1040108048	1040113477
1040099090	1040111001	1040113843
1040099085	1040108998	1040113854
1040099200	1040109002	1040114383
1040099443	1040109086	1040114021
1040099454	1040109197	1040114131
1040099469	1040109290	1040114130
1040100430	1040109292	1040114378
1040100477	1040109291	1040114495
1040100749	1040109289	1040115150
1040101068	1040109288	1040117000
1040101103	1040109287	1040117047
1040101119	1040109286	1040117053
1040101621	1040109285	1040117363
1040101754	1040109284	1040117570
1040101778	1040109283	1040117571
1040101894	1040109282	1040117726
1040101895	1040109281	1040117907
1040102342	1040109340	1040117934
1040102557	1040109619	1040117943
1040102942	1040109635	1040117942
1040102955	1040109911	1040117998
1040103022	1040109901	1040118121
1040103044	1040109949	1040118126
1040103045	1040111000	1040118208
1040103043	1040111384	1040118391
1040103042	1040111361	1040118485
1040103041	1040111362	1040118772
1040103738	1040111438	1040119141
1040103991	1040111786	1040119168
1040104313	1040112015	1040119175

Serial numbers, work chairs with Forma chassis. Manufactured 1. 1. 2014 – 1. 12. 2016

1040119177	1040130876	1040139396
1040119546	1040130922	1040139569
1040119594	1040131026	1040139899
1040119593	1040131934	1040140109
1040119595	1040132046	1040139941
1040119846	1040132045	1040139946
1040119888	1040132044	1040140260
1040120111	1040132043	1040140371
1040120472	1040132343	1040140401
1040120763	1040132383	1040141107
1040121226	1040132384	1040141685
1040121244	1040132441	1040141794
1040122427	1040132830	1040141924
1040122426	1040132760	1040141975
1040122507	1040132770	1040142025
1040122696	1040132816	1040142192
1040122699	1040132814	1040142315
1040123299	1040132818	1040142330
1040123912	1040132970	1040142498
1040124589	1040133331	1040142499
1040124487	1040133333	1040142802
1040124484	1040133334	1040142838
1040124492	1040133360	1040143671
1040124645	1040133765	1040143672
1040124834	1040134874	1040143670
1040124916	1040134873	1040143673
1040125303	1040134926	1040143881
1040125516	1040134944	1040144074
1040126231	1040134957	1040143963
1040126525	1040135311	1040144134
1040126528	1040135372	1040144286
1040127030	1040135517	1040144299
1040127804	1040135807	1040144565
1040127803	1040136737	1040144749
1040127805	1040136738	1040144958
1040128155	1040136769	1040145118
1040128157	1040136881	1040145354
1040128205	1040137816	1040145986
1040128461	1040137815	1040146997
1040129334	1040137564	1040146012
1040129813	1040138953	1040146035
1040130189	1040137657	1040146179
1040130604	1040138086	1040146239
1040130603	1040138745	1040146295
1040130616	1040138744	1040146296

Serial numbers, work chairs with Forma chassis. Manufactured 1. 1. 2014 – 1. 12. 2016

1040146725	1040159112	1040167000
1040147158	1040159122	1040167045
1040147354	1040159124	1040167044
1040148282	1040159195	1040167046
1040148376	1040159206	1040167060
1040148738	1040159260	1040167061
1040148766	1040159470	1040167271
1040148767	1040159733	1040167270
1040149401	1040159941	1040167269
1040149821	1040161030	1040167273
1040150399	1040161300	1040167274
1040150400	1040161301	1040167272
1040150852	1040161340	1040167275
1040150885	1040161719	1040167276
1040151156	1040162123	1040167476
1040151361	1040162126	1040168489
1040151587	1040162143	1040167688
1040151595	1040162755	1040168492
1040152137	1040163116	1040168966
1040152152	1040163133	1040169252
1040152680	1040163449	1040169742
1040153199	1040163448	1040169754
1040153308	1040163791	1040169980
1040153341	1040163919	1040170146
1040153477	1040163962	1040170166
1040153830	1040164032	1040170165
1040154058	1040164189	1040170164
1040155066	1040164426	1040170180
1040155073	1040164427	1040170278
1040155229	1040164429	1040170439
1040155399	1040164539	1040170440
1040155458	1040164467	1040170477
1040156498	1040164599	
1040156497	1040164944	
1040156980	1040165351	
1040157261	1040165727	
1040157381	1040165734	
1040157674	1040166000	
1040157868	1040166006	
1040157988	1040166057	
1040158024	1040166245	
1040158050	1040166275	
1040158080	1040166447	
1040158988	1040166646	
1040159019	1040166999	