



## DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION

GE Healthcare

3000 N. Grandview Blvd. - W440  
Waukesha, WI 53188  
USA

Interne GE Healthcare Ref.-Nr.: FMI 36141

20. November 2019

An: Beauftragter für Medizinproduktesicherheit  
Krankenhausverwaltung/Risikomanagement  
Leitung der Krankenpflege  
Biomedizinische Technik

Betreff: Defekt eines O<sub>2</sub>-Sensors in den CARESCAPE-Beatmungsmodulen (E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE), in der Atemgas-Option (N-CAiO) und ihren jeweiligen Austauschelementen oder vor Ort austauschbaren Elementen mit bestimmten Seriennummern, die seit Juni 2019 installiert oder repariert wurden.

**Dieses Dokument enthält wichtige Informationen in Bezug auf Ihr Produkt. Bitte stellen Sie sicher, dass alle potenziellen Anwender in Ihrer Einrichtung auf diesen Sicherheitshinweis sowie die empfohlenen Maßnahmen aufmerksam gemacht werden. Bitte bewahren Sie dieses Dokument für Ihre Unterlagen auf.**

### Sicherheits- problem

Die angezeigten Werte für end-tidalen Sauerstoff (EtO<sub>2</sub>) und der Anteil des eingeatmeten Sauerstoffs (FiO<sub>2</sub>) sind möglicherweise falsch, was zu einem Messfehler von bis zu 50 % bei den EtO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>-Werten führen kann. Dieses Problem kann beim O<sub>2</sub>-Sensor der CARESCAPE-Beatmungsmodule und den Atemgas-Optionen auftreten. Ein falscher EtO<sub>2</sub>-/FiO<sub>2</sub>-Wert könnte zu einem potentiellen hypoxischen Zustand führen oder die klinische Entscheidungsfindung verzögern und/oder beeinträchtigen. Es wurden im Zusammenhang mit diesem Problem keine Verletzungen gemeldet.

**Hinweis:** Der gemessene Wert führt nicht zu einer Änderung der Einstellung für die vom Arzt gewählte Sauerstofffraktion oder den Durchfluss.

### Vorsichts- maßnahmen

Ersetzen Sie das betroffene Beatmungsmodul durch ein anderes Modul, das von diesem Problem nicht betroffen ist. Wenn Sie kein Austauschmodul zur Verfügung haben, stellen Sie sicher, dass der O<sub>2</sub>-Wert Ihres Beatmungsmoduls innerhalb der Spezifikationen liegt. Befolgen Sie hierzu die folgenden Anweisungen (a) vor dem Öffnen eines neuen Patientenfalls und (b) bei längeren Patientenfällen mindestens einmal täglich:


- 1) Verbinden Sie das Modul mit dem Host-Gerät;
- 2) Stellen Sie sicher, dass das Modul vollständig aufgewärmt ist, indem Sie es mindestens 20 Minuten lang einschalten.
- 3) Konfigurieren Sie den O<sub>2</sub>-Messwert und die Wellenform für den Bildschirm des Host-Geräts gemäß den Anweisungen des Host-Geräts;
- 4) Führen Sie dem Modul 100 % O<sub>2</sub>-Gasstrom vom Lüfter zu und beobachten Sie den O<sub>2</sub>-Messwert und die Wellenform; und
- 5) Stellen Sie sicher, dass der O<sub>2</sub>-Messwert innerhalb der Spezifikationen von 100 % ± 3 % liegt und die Wellenform kein fehlerhaftes Verhalten aufweist.
- 6) Wenn Sie die oben genannten Schritte nicht erfolgreich ausführen können, entfernen Sie das Beatmungsmodul aus dem klinischen Einsatz und aus der Quarantäne. Wenden Sie sich an den GE Healthcare-Service oder Ihren Servicevertreter vor Ort.

## Betroffene Produkte

CARESCAPE-Beatmungsmodule, die Atemgasoption und ihre jeweiligen Austauschelemente oder austauschbaren Elementen, die seit Juni 2019 installiert oder repariert wurden.

| Produkt                            | GTIN           |
|------------------------------------|----------------|
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCO     | 00840682104173 |
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCOV    | 00840682104258 |
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCOVX   | 00840682104289 |
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCAiO   | 00840682104180 |
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCAiOV  | 00840682104142 |
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCAiOVX | 00840682104067 |
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCAiOE  | 00840682104135 |
| CARESCAPE-Beatmungsmodul E-sCAiOVE | 00840682104302 |
| Atemgas-Option N-CAiO              | 00840682104074 |

In Anhang A finden Sie eine Liste der Seriennummern der betroffenen Module. Die Seriennummer (SN) des Moduls finden Sie auf dem Typenschild des Moduls, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Das Typenschild befindet sich an der Seite des Moduls.

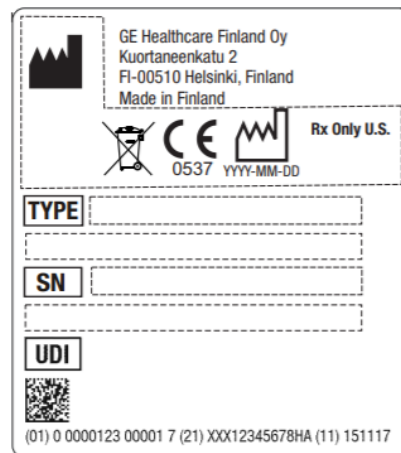

Die betroffenen Austauschelemente oder vor Ort austauschbaren Elemente wurden möglicherweise seit Anfang Juni 2019 für die Reparatur der CARESCAPE-Beatmungsmodule (E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE) oder der Atemgas-Option (N-CAiO) verwendet.

Die betroffenen Module könnten mit irgendeinem der folgenden GE Healthcare-Host-Geräte im Einsatz sein:

- CARESCAPE-Beatmungsmodule (E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE) können verwendet werden mit:
  - CARESCAPE-Patienten-Monitoren B850, B650 und B450
  - Patienten-Monitoren B40(i), B105, B125
  - Avance CS<sup>2</sup> und Aisys CS<sup>2</sup> Anästhesie-Stationen
  - Anästhesie-Stationen 620, 650, 650c
  - CARESCAPE R860 Beatmungsgerät für Intensivpflege
  - modularen S/5-Monitoren
- Die Atemgas-Option (N-CAiO) kann verwendet werden mit:
  - Patienten-Monitoren B40(i), B105, B125
  - Anästhesie-Stationen 620, 650, 650c

## Korrektur- maßnahmen am System

GE Healthcare stellt Ihnen eine kostenlose Korrektur zur Verfügung. Ein Servicerepräsentant von GE Healthcare wird Sie kontaktieren, um die Korrektur vorzunehmen.

## Ansprechpartner

Bei Fragen zu dieser Korrekturmaßnahme oder zur Identifikation der betroffenen Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebs- oder Servicerepräsentanten oder an das Service Center unseres Technischen Kundendienstes.

Anandic Medical Systems AG  
T: +41(0)848 800 950  
F: +41 (0)52 646 03 03  
E: info@anandic.com

GE Healthcare bestätigt, dass diese Mitteilung an die zuständige nationale Behörde übermittelt wurde.

Wir möchten in diesem Zusammenhang betonen, dass die Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheits- und Qualitätsniveaus unsere vorrangige Priorität darstellt. Bitte wenden Sie sich umgehend an uns, falls Sie irgendwelche Zweifel haben.

Mit freundlichen Grüßen,



Laila Gurney  
Senior Executive, Global Regulatory and Quality  
GE Healthcare



Jeff Hersh, PhD MD  
Chief Medical Officer  
GE Healthcare



**BESTÄTIGUNG DER MITTEILUNG ÜBER MEDIZINISCHE GERÄTE  
ANTWORT ERFORDERLICH**

**Bitte füllen Sie dieses Formular (diese Seite) aus und senden Sie es umgehend nach Erhalt, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt, an GE Healthcare zurück. Dadurch bestätigen Sie, dass Sie die Mitteilung zur Korrekturmaßnahme für medizinische Geräte GEHC Ref# 36141 und zu den erforderlichen Maßnahmen erhalten und verstanden haben.**

Name des Kunden/Warenempfängers: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Ort/Bundesland/PLZ/Land: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Wir bestätigen den Erhalt und die Kenntnisnahme der beigefügten Mitteilung über Medizinprodukte und bestätigen ebenfalls, dass wir in Übereinstimmung mit dieser Mitteilung geeignete Maßnahmen ergriffen haben und ergreifen werden.

**Bitte geben Sie den Namen der zuständigen Person an, die dieses Formular ausgefüllt hat.**

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Name (in Druckschrift): \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Datum (TT/MM/JJJJ): \_\_\_\_\_

**Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular als gescannte Kopie oder als Foto per E-Mail an folgende Adresse zurück:  
FMI@anandic.com**

**ANHANG A**

**Liste der Seriennummern der betroffenen CARESCAPE-Beatmungsmodule E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE; der Atemgas-Option N-CAiO und ihrer jeweiligen Austauschelemente und vor Ort austauschbaren Elemente**

| Seriennummern des CARESCAPE-Beatmungsmoduls E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SGV19240060HA   | SGV19240365HA | SGV19251002HA | SGV19261013HA | SGV19264036HA | SGV19274044HA | SGV19285005HA |
| SGV19240073HA   | SGV19240366HA | SGV19251007HA | SGV19261015HA | SGV19264037HA | SGV19274045HA | SGV19285007HA |
| SGV19240076HA   | SGV19240371HA | SGV19251019HA | SGV19261016HA | SGV19264038HA | SGV19276001HA | SGV19285013HA |
| SGV19240082HA   | SGV19240373HA | SGV19251020HA | SGV19261017HA | SGV19264040HA | SGV19276013HA | SGV19285015HA |
| SGV19240084HA   | SGV19240376HA | SGV19251023HA | SGV19261019HA | SGV19264041HA | SGV19276023HA | SGV19285017HA |
| SGV19240085HA   | SGV19240377HA | SGV19251024HA | SGV19261021HA | SGV19264043HA | SGV19276028HA | SGV19285019HA |
| SGV19240090HA   | SGV19240381HA | SGV19251028HA | SGV19261023HA | SGV19264045HA | SGV19276029HA | SGV19290003HA |
| SGV19240091HA   | SGV19240391HA | SGV19251033HA | SGV19261024HA | SGV19264046HA | SGV19276034HA | SGV19290010HA |
| SGV19240094HA   | SGV19240392HA | SGV19251034HA | SGV19261025HA | SGV19264047HA | SGV19276042HA | SGV19290025HA |
| SGV19240095HA   | SGV19240395HA | SGV19251037HA | SGV19261027HA | SGV19264048HA | SGV19280005HA | SGV19290027HA |
| SGV19240098HA   | SGV19240398HA | SGV19251044HA | SGV19261028HA | SGV19264049HA | SGV19280006HA | SGV19290029HA |
| SGV19240100HA   | SGV19240401HA | SGV19251045HA | SGV19261030HA | SGV19264050HA | SGV19280010HA | SGV19290030HA |
| SGV19240101HA   | SGV19240406HA | SGV19251049HA | SGV19261031HA | SGV19264051HA | SGV19280017HA | SGV19290035HA |
| SGV19240103HA   | SGV19240413HA | SGV19251051HA | SGV19261032HA | SGV19264056HA | SGV19280029HA | SGV19290037HA |
| SGV19240104HA   | SGV19240416HA | SGV19251052HA | SGV19261033HA | SGV19264059HA | SGV19280074HA | SGV19290054HA |
| SGV19240105HA   | SGV19241001HA | SGV19251055HA | SGV19261034HA | SGV19264060HA | SGV19280083HA | SGV19290060HA |
| SGV19240106HA   | SGV19241002HA | SGV19251057HA | SGV19261077HA | SGV19266005HA | SGV19280087HA | SGV19290061HA |
| SGV19240108HA   | SGV19241003HA | SGV19251058HA | SGV19261084HA | SGV19266006HA | SGV19280088HA | SGV19290063HA |
| SGV19240109HA   | SGV19241005HA | SGV19251059HA | SGV19261086HA | SGV19266011HA | SGV19280094HA | SGV19290079HA |
| SGV19240110HA   | SGV19241006HA | SGV19251060HA | SGV19261087HA | SGV19266012HA | SGV19280106HA | SGV19290092HA |
| SGV19240111HA   | SGV19241007HA | SGV19251062HA | SGV19261088HA | SGV19266019HA | SGV19280109HA | SGV19290093HA |
| SGV19240112HA   | SGV19241010HA | SGV19251064HA | SGV19261089HA | SGV19270004HA | SGV19280110HA | SGV19290096HA |
| SGV19240114HA   | SGV19241011HA | SGV19251067HA | SGV19261090HA | SGV19270006HA | SGV19280111HA | SGV19290097HA |
| SGV19240115HA   | SGV19241014HA | SGV19251068HA | SGV19261091HA | SGV19270011HA | SGV19280113HA | SGV19290101HA |
| SGV19240116HA   | SGV19241017HA | SGV19251071HA | SGV19261094HA | SGV19270018HA | SGV19280114HA | SGV19290102HA |
| SGV19240117HA   | SGV19241023HA | SGV19251079HA | SGV19261096HA | SGV19270021HA | SGV19280125HA | SGV19290106HA |
| SGV19240118HA   | SGV19241024HA | SGV19251081HA | SGV19261097HA | SGV19270029HA | SGV19280127HA | SGV19290107HA |
| SGV19240119HA   | SGV19241025HA | SGV19251082HA | SGV19261098HA | SGV19270032HA | SGV19280128HA | SGV19290108HA |
| SGV19240120HA   | SGV19241026HA | SGV19251084HA | SGV19261099HA | SGV19270040HA | SGV19280131HA | SGV19290111HA |
| SGV19240121HA   | SGV19241033HA | SGV19251090HA | SGV19261100HA | SGV19270042HA | SGV19280138HA | SGV19290114HA |
| SGV19240123HA   | SGV19241034HA | SGV19251091HA | SGV19261104HA | SGV19270044HA | SGV19280152HA | SGV19290117HA |
| SGV19240127HA   | SGV19241035HA | SGV19251092HA | SGV19261106HA | SGV19270045HA | SGV19280153HA | SGV19290118HA |
| SGV19240128HA   | SGV19241036HA | SGV19251098HA | SGV19261108HA | SGV19270056HA | SGV19280157HA | SGV19290125HA |
| SGV19240129HA   | SGV19241038HA | SGV19251099HA | SGV19261110HA | SGV19270058HA | SGV19280163HA | SGV19290126HA |
| SGV19240131HA   | SGV19241040HA | SGV19251102HA | SGV19261111HA | SGV19270059HA | SGV19280165HA | SGV19290135HA |
| SGV19240132HA   | SGV19241041HA | SGV19251106HA | SGV19261112HA | SGV19270061HA | SGV19280166HA | SGV19290136HA |
| SGV19240133HA   | SGV19241042HA | SGV19251109HA | SGV19261114HA | SGV19270064HA | SGV19280167HA | SGV19290141HA |
| SGV19240134HA   | SGV19241043HA | SGV19251110HA | SGV19261117HA | SGV19270066HA | SGV19280179HA | SGV19290157HA |
| SGV19240136HA   | SGV19241044HA | SGV19251111HA | SGV19261119HA | SGV19270067HA | SGV19280189HA | SGV19290185HA |
| SGV19240137HA   | SGV19241047HA | SGV19251112HA | SGV19261121HA | SGV19270069HA | SGV19280270HA | SGV19291009HA |
| SGV19240138HA   | SGV19241048HA | SGV19251113HA | SGV19261122HA | SGV19270072HA | SGV19280271HA | SGV19291010HA |
| SGV19240140HA   | SGV19241049HA | SGV19251114HA | SGV19261127HA | SGV19270077HA | SGV19281055HA | SGV19291013HA |
| SGV19240142HA   | SGV19241051HA | SGV19251115HA | SGV19261128HA | SGV19270078HA | SGV19281056HA | SGV19291040HA |
| SGV19240150HA   | SGV19241053HA | SGV19251116HA | SGV19261133HA | SGV19270082HA | SGV19281060HA | SGV19291075HA |
| SGV19240156HA   | SGV19241055HA | SGV19251117HA | SGV19261139HA | SGV19270084HA | SGV19281066HA | SGV19291077HA |

|               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SGV19240157HA | SGV19241056HA | SGV19254025HA | SGV19261141HA | SGV19270085HA | SGV19281077HA | SGV19293004HA |
| SGV19240158HA | SGV19241059HA | SGV19254026HA | SGV19261142HA | SGV19270089HA | SGV19281078HA | SGV19293018HA |
| SGV19240159HA | SGV19241060HA | SGV19254027HA | SGV19261143HA | SGV19270111HA | SGV19281079HA | SGV19294002HA |
| SGV19240168HA | SGV19243024HA | SGV19254028HA | SGV19261144HA | SGV19270127HA | SGV19283001HA | SGV19294004HA |
| SGV19240172HA | SGV19250003HA | SGV19254031HA | SGV19261146HA | SGV19271015HA | SGV19283002HA | SGV19294007HA |
| SGV19240179HA | SGV19250005HA | SGV19254033HA | SGV19261149HA | SGV19271021HA | SGV19283004HA | SGV19294008HA |
| SGV19240180HA | SGV19250006HA | SGV19254034HA | SGV19261151HA | SGV19271022HA | SGV19283006HA | SGV19294012HA |
| SGV19240181HA | SGV19250007HA | SGV19254036HA | SGV19261152HA | SGV19271028HA | SGV19283007HA | SGV19294016HA |
| SGV19240183HA | SGV19250018HA | SGV19254037HA | SGV19261165HA | SGV19271039HA | SGV19283008HA | SGV19294019HA |
| SGV19240185HA | SGV19250022HA | SGV19254038HA | SGV19261166HA | SGV19271041HA | SGV19283009HA | SGV19294022HA |
| SGV19240195HA | SGV19250023HA | SGV19254039HA | SGV19261168HA | SGV19271042HA | SGV19283011HA | SGV19294023HA |
| SGV19240196HA | SGV19250034HA | SGV19254040HA | SGV19261170HA | SGV19271043HA | SGV19283012HA | SGV19294026HA |
| SGV19240204HA | SGV19250035HA | SGV19255001HA | SGV19261184HA | SGV19271047HA | SGV19283013HA | SGV19294029HA |
| SGV19240211HA | SGV19250037HA | SGV19255002HA | SGV19261191HA | SGV19271050HA | SGV19283015HA | SGV19294034HA |
| SGV19240216HA | SGV19250049HA | SGV19255004HA | SGV19261193HA | SGV19271052HA | SGV19283016HA | SGV19294036HA |
| SGV19240242HA | SGV19250053HA | SGV19255009HA | SGV19261196HA | SGV19271064HA | SGV19283017HA | SGV19294040HA |
| SGV19240243HA | SGV19250056HA | SGV19255010HA | SGV19261197HA | SGV19271099HA | SGV19283019HA | SGV19295006HA |
| SGV19240247HA | SGV19250061HA | SGV19255017HA | SGV19261199HA | SGV19271112HA | SGV19283024HA | SGV19295013HA |
| SGV19240254HA | SGV19250062HA | SGV19255019HA | SGV19261203HA | SGV19271136HA | SGV19283025HA | SGV19295019HA |
| SGV19240262HA | SGV19250065HA | SGV19260047HA | SGV19261214HA | SGV19271137HA | SGV19283030HA | SGV19300001HA |
| SGV19240266HA | SGV19250067HA | SGV19260049HA | SGV19264003HA | SGV19271150HA | SGV19283032HA | SGV19300040HA |
| SGV19240268HA | SGV19250068HA | SGV19260052HA | SGV19264004HA | SGV19271152HA | SGV19283033HA | SGV19300041HA |
| SGV19240269HA | SGV19250069HA | SGV19260054HA | SGV19264006HA | SGV19271157HA | SGV19283034HA | SGV19300042HA |
| SGV19240272HA | SGV19250076HA | SGV19260055HA | SGV19264008HA | SGV19271162HA | SGV19283035HA | SGV19300061HA |
| SGV19240275HA | SGV19250080HA | SGV19260064HA | SGV19264009HA | SGV19271170HA | SGV19283037HA | SGV19300062HA |
| SGV19240276HA | SGV19250083HA | SGV19260065HA | SGV19264011HA | SGV19271175HA | SGV19283038HA | SGV19300066HA |
| SGV19240277HA | SGV19250088HA | SGV19260066HA | SGV19264012HA | SGV19271177HA | SGV19283042HA | SGV19300081HA |
| SGV19240278HA | SGV19250089HA | SGV19260071HA | SGV19264014HA | SGV19274007HA | SGV19283043HA | SGV19300090HA |
| SGV19240279HA | SGV19250093HA | SGV19260074HA | SGV19264018HA | SGV19274008HA | SGV19283044HA | SGV19300091HA |
| SGV19240280HA | SGV19250094HA | SGV19260075HA | SGV19264019HA | SGV19274009HA | SGV19283046HA | SGV19300092HA |
| SGV19240281HA | SGV19250095HA | SGV19260077HA | SGV19264021HA | SGV19274022HA | SGV19283047HA | SGV19300093HA |
| SGV19240282HA | SGV19250098HA | SGV19260084HA | SGV19264023HA | SGV19274023HA | SGV19283050HA | SGV19300094HA |
| SGV19240284HA | SGV19250102HA | SGV19260087HA | SGV19264024HA | SGV19274024HA | SGV19283053HA | SGV19300095HA |
| SGV19240286HA | SGV19250107HA | SGV19260088HA | SGV19264025HA | SGV19274028HA | SGV19283057HA | SGV19300106HA |
| SGV19240287HA | SGV19250110HA | SGV19260089HA | SGV19264026HA | SGV19274030HA | SGV19283058HA | SGV19304010HA |
| SGV19240288HA | SGV19250114HA | SGV19260091HA | SGV19264027HA | SGV19274032HA | SGV19283059HA | SGV19304026HA |
| SGV19240290HA | SGV19250120HA | SGV19260093HA | SGV19264028HA | SGV19274033HA | SGV19283060HA | SGV19304032HA |
| SGV19240291HA | SGV19250125HA | SGV19261005HA | SGV19264029HA | SGV19274035HA | SGV19283061HA | SGV19304037HA |
| SGV19240292HA | SGV19250131HA | SGV19261006HA | SGV19264030HA | SGV19274037HA | SGV19283063HA | SGV19315034HA |
| SGV19240295HA | SGV19250132HA | SGV19261007HA | SGV19264031HA | SGV19274038HA | SGV19283064HA | SGV15285005HA |
| SGV19240360HA | SGV19250139HA | SGV19261009HA | SGV19264032HA | SGV19274040HA | SGV19283065HA | SGV16314022HA |
| SGV19240361HA | SGV19250156HA | SGV19261010HA | SGV19264034HA | SGV19274041HA | SGV19283070HA | SGV16385015HA |
| SGV19240362HA | SGV19250157HA | SGV19261012HA | SGV19264035HA | SGV19274043HA | SGV19285002HA | SGV18150053HA |

| Seriennummern der Atemgas-Option N-CAiO |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SGV19248001HA                           | SGV19258002HA | SGV19258006HA | SGV19258009HA | SGV19258030HA | SGV19268004HA | SGV19268011HA |
| SGV19248004HA                           | SGV19258003HA | SGV19258007HA | SGV19258012HA | SGV19258040HA | SGV19268005HA | SGV19268019HA |
| SGV19248013HA                           | SGV19258005HA | SGV19258008HA | SGV19258020HA | SGV19268003HA | SGV19268009HA | SGV19318013HA |

| Seriennummern der Austauschelemente und der vor Ort austauschbaren Elemente |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SGV19229311HA   | SGV19269313HA | SGV19329312HA | SGV14437642HA | SGV15393013HA | SGV17060096HA | SGV18031029HA |
| SGV19259301HA   | SGV19269322HA | SGV19329313HA | SGV14450121HA | SGV15434023HA | SGV17060103HA | SGV18034023HA |
| SGV19259302HA   | SGV19269323HA | SGV19329316HA | SGV14450567HA | SGV15451005HA | SGV17140055HA | SGV18050091HA |
| SGV19259303HA   | SGV19269326HA | SGV19329318HA | SGV14473815HA | SGV15451020HA | SGV17143008HA | SGV18051011HA |
| SGV19259305HA   | SGV19269402HA | SGV19329410HA | SGV14495993HA | SGV15451204HA | SGV17153075HA | SGV18071004HA |
| SGV19259306HA   | SGV19269601HA | SGV12336914HA | SGV15010212HA | SGV15451210HA | SGV17171017HA | SGV18161013HA |
| SGV19259309HA   | SGV19269605HA | SGV13275929HA | SGV15020952HA | SGV15463045HA | SGV17173072HA | SGV18179620HA |
| SGV19259310HA   | SGV19269606HA | SGV13486917HA | SGV15031909HA | SGV16040081HA | SGV17194016HA | SGV18183007HA |
| SGV19259701HA   | SGV19269611HA | SGV13497715HA | SGV15032196HA | SGV16040110HA | SGV17203005HA | SGV18204012HA |
| SGV19259705HA   | SGV19269612HA | SGV14020340HA | SGV15088910HA | SGV16044023HA | SGV17234020HA | SGV18213004HA |
| SGV19259707HA   | SGV19269615HA | SGV14052384HA | SGV15090506HA | SGV16123028HA | SGV17244009HA | SGV18261135HA |
| SGV19259708HA   | SGV19269620HA | SGV14268711HA | SGV15101460HA | SGV16210066HA | SGV17264002HA | SGV18270061HA |
| SGV19259710HA   | SGV19269622HA | SGV14268848HA | SGV15112176HA | SGV16210101HA | SGV17314032HA | SGV18294040HA |
| SGV19259711HA   | SGV19269802HA | SGV14268857HA | SGV15112895HA | SGV16364028HA | SGV17321155HA | SGV18300094HA |
| SGV19269301HA   | SGV19269803HA | SGV14302171HA | SGV15124090HA | SGV16401072HA | SGV17331016HA | SGV18310028HA |
| SGV19269302HA   | SGV19299201HA | SGV14313468HA | SGV15145406HA | SGV16434022HA | SGV17333012HA | SGV18310031HA |
| SGV19269303HA   | SGV19319407HA | SGV14357513HA | SGV15166562HA | SGV16440093HA | SGV17350070HA | SGV18340117HA |
| SGV19269305HA   | SGV19329301HA | SGV14368517HA | SGV15194017HA | SGV16441005HA | SGV17380065HA | SGV18387001HA |
| SGV19269306HA   | SGV19329302HA | SGV14381275HA | SGV15244035HA | SGV16514019HA | SGV17411094HA |               |
| SGV19269308HA   | SGV19329308HA | SGV14404046HA | SGV15274023HA | SGV16524027HA | SGV17419612HA |               |
| SGV19269309HA   | SGV19329311HA | SGV14425656HA | SGV15290079HA | SGV17020060HA | SGV17494012HA |               |