



Geroldswil, 29. November

Field Safety Notice von Cristalens betreffend der Artis PL E Toric

Am 20.11. haben wir von der Firma Cristalens beiliegende Field Safety Notice betreffend der Kalkulationssoftware für die Artis PL E Toric erhalten

Am 13.9.2019 wurde ein Software-upgrade (4.0.1) als Folge eines Vorfalls, welcher in Frankreich gemeldet wurde, eingeführt. Bei zwei kurz nacheinander folgenden Berechnungen der torischen Artis PL E zeigte die zweite Berechnung die gleiche Orientierung der Linse wie bei der Berechnung der ersten Linse.

Ursache für diesen Vorfall war ein Fehler beim Drucken der Berechnungen mit der vorhergehenden Softwareversion (3.0.1.). Wenn mehrere Berechnungen in kurzer Zeit aufeinander erfolgten und eine schlechte Netzwerkverbindung zum Server, auf dem die Berechnungssoftware lokalisiert ist, vorhanden war, wurde das Bild nicht aktualisiert. In der neuen Softwareversion 4.0.1. ist dieser Fehler nun behoben.

Sollten Sie eine Berechnung vorliegen haben einer Linse, welche vor dem 13.9.2019 vorgenommen wurde und die Linse noch nicht implantiert ist empfehlen wir Ihnen die Linsenachse noch einmal zu prüfen.

Wir bitten Sie diese Information zur Kenntnis zu nehmen und an Personen weiterzuleiten, welche bei Kalkulationen der ARTIS PL E Toric involviert sind.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse,

medilas ag

Birgit Stuber

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Filed Safety Notice vom 20.11.2019

Name: _____

Klinik/Praxis: _____

Beilage: FSN

medilas agGrindlenstrasse 3 ■ CH-8954 Geroldswil
T +41 44 747 40 00 ■ F +41 44 747 40 05
info@medilas.ch ■ www.medilas.ch**medilas ag** Suisse romandeRoute André-Piller 18 ■ CH-1762 Givisiez
T +41 26 525 43 00 ■ F +41 26 525 43 49
information@medilas.ch ■ www.medilas.ch