

## SICHERHEITSHINWEISE

### Abnehmbare AZUR CX 35 Spulen und Abnehmbare AZUR 18 Endovaskuläre Embolisationsspule

Kundenname und Adresse

Sehr geehrter Mediziner,

Wir schreiben Ihnen, da aus unseren Unterlagen hervorgeht, dass Sie gegebenenfalls ein Produkt bestimmter Chargen von AZUR Endovaskulären Embolisationsprodukten erhalten haben, bei denen einigen Geräten die Implantatspule fehlt. Die Produkte, die von diesem Problem betroffen sein können, sind bestimmte Chargen von:

- AZUR Peripheres Spulensystem, Abnehmbar 18
- AZUR Peripheres Spulensystem, Abnehmbar 35

Eine Liste der Chargen, die von diesem Problem betroffen sein können, finden Sie in Anhang 1.

Das AZUR-System soll die Blutflussrate in Gefäßen des peripheren Gefäßsystems verringern oder blockieren. Es ist zur interventionellen radiologischen Behandlung von arteriovenösen Fehlbildungen, arteriovenösen Fisteln, Aneurysmen und anderen Läsionen des peripheren Gefäßsystems vorgesehen.

MicroVention hat fünfzehn (15) Beschwerden in Bezug auf Geräte erhalten, bei denen die Implantatspule fehlt. Es wurden keine unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit fehlenden Spulen an den Hersteller gemeldet. MicroVention wird weiterhin alle unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Problem überwachen.

Die Gebrauchsanweisung enthält eine Reihe von Überprüfungsschritten, die vor dem Einsetzen der Implantatspule durchgeführt werden müssen, einschließlich der Überprüfung des Produkts auf Unregelmäßigkeiten oder Beschädigungen und der Überwachung der Position des röntgendichten Markers und des Vorhandenseins des Implantats. Siehe Abbildung 1 für in der Bedienungsanleitung abgegebene Vorbereitungsanweisungen für das abnehmbare AZUR-System.

16. Halten Sie das Gerät nur distal zum Schrumpfvverschluss und ziehen Sie den Schrumpfvverschluss proximal, um die Lasche an der Einführschleuse freizulegen. Siehe Abbildung 3.

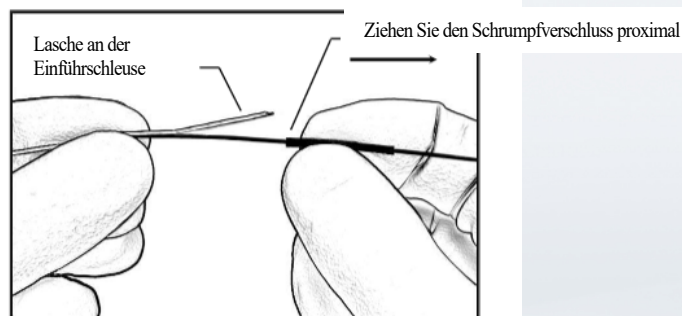


Abbildung 3 – Ziehen Sie den Schrumpfvverschluss proximal

17. Schieben Sie das Spulenimplantat langsam aus der Einführschleuse heraus und untersuchen Sie die Spule auf Unregelmäßigkeiten oder Beschädigungen. **Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn eine Beschädigung der Spule oder des Abgabeschiebers festgestellt wird.**

Abbildung 1 – In der Bedienungsanleitung angegebene Vorbereitungsanweisungen für das abnehmbare AZUR-System.

Wenn Sie bei der Vorbereitung des Produkts die Anweisungen vor dem Einsatz befolgen, sehen Sie, ob sich am Ende des Abgabeschiebers eine Implantatspule befindet. Ein Abgabeschieber mit einer Implantatspule sollte wie in Abbildung 2 (unten) aussehen, und ein Abgabeschieber ohne Implantatspule sollte wie in Abbildung 3 (unten) aussehen.

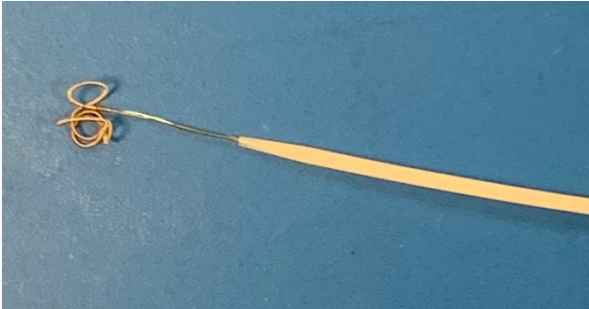


Abbildung 2 – Spule vorhanden

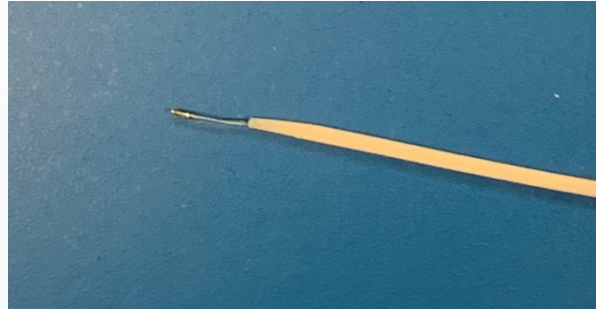


Abbildung 3 – Spule fehlt

Es kann ein Gerät verwendet werden, das eine Spule am Abgabeschieber hat. Ein Gerät ohne Implantatspule sollte nicht verwendet werden. Es sollte ein Ersatzgerät beschafft und das Vorhandensein der Spule gemäß Gebrauchsanweisung bestätigt werden. Wenn die Überprüfungsschritte nicht gemäß der Gebrauchsanweisung durchgeführt werden, kann der Benutzer das Abgabesystem möglicherweise ohne Implantat in das periphere Gefäßsystem vorschieben. Tests haben gezeigt, dass die Steifheit des Abgabeschiebers nicht höher ist als die des regulären intravaskulären Führungsdrahts. Infolgedessen ist das Unternehmen zu dem Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung des Patienten unwahrscheinlich ist.

Wenn Sie ein Gerät ohne Spule auffinden, wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Rücksendung des Produkts zu veranlassen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihrer Terumo-Niederlassung.

Wir bitten Sie, sofort folgende Schritte zu unternehmen:

1. Verteilen Sie den Hinweis an das entsprechende Personal.
2. Füllen Sie das Formular „**BESTÄTIGUNGSFORMULAR FÜR MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN**“ aus und senden Sie es zurück.

Wir bedauern etwaige Unannehmlichkeiten, die durch diese Aktion verursacht werden, wir bedanken uns jedoch für Ihr Verständnis, während wir Maßnahmen ergreifen, um die Patientensicherheit und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen

**Irina Kulinets, PhD, RAC**  
**Sr. Vice President of Regulatory Affairs, Clinical Research and Quality**  
MicroVention Inc., A **TERUMO** Group Company

Anlage:

Anhang 1 – Betroffene AZUR-Produktchargen

Anhang 2 – Bestätigungsformular für medizinische Einrichtungen

SICHERHEITSHINWEISE FÜR MEDIZINPRODUKTE  
BESTÄTIGUNGSFORMULAR FÜR MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN

NAME DER MEDIZINISCHEN EINRICHTUNG: \_\_\_\_\_

ADRESSE: \_\_\_\_\_

TELEFONNUMMER DER MEDIZINISCHEN EINRICHTUNG: \_\_\_\_\_

Ich habe die von MicroVention Inc. herausgegebenen Sicherheitshinweise in Bezug auf die abnehmbaren AZUR CX 35 Spulen und die abnehmbaren AZUR 18 Endovaskulären Embolisierungsspulen gelesen und verstanden und die Sicherheitshinweise an das entsprechende Personal verteilt.

Name des Vertreters (in Druckbuchstaben)	Unterschrift	Datum

BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE FORMULAR AN [[DEN VERTRIEBSHÄNDLER, UM DIE KONTAKTDATEN ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN](#)]

# **ATTACHMENT 1**

**Affected AZUR Product Lots**

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
AZUR 18 CX DETACHABLE 10MM x 32CM	45-781032	1903065Z8	00810170018350
		1903085Z8	00816777024374
		1903155Z8	00810170018350
		1903205Z8	00810170018398
		1903225Z8	00810170018398
		1904015Z8	00810170018350
		1904055Z8	00810170018350
		1904085Z8	00810170018350
		1904155Z8	00810170018350
		1904245Z8	00816777024367
		1904265Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
AZUR 18 CX DETACHABLE 12MM x 38CM	45-781238	1905155Z8	00810170018350
		1903115Z8	00810170018367
		1903135Z8	00810170018367
		1903205Z8	00810170018398
		1904105Z8	00810170018367
		1904155Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
AZUR 18 CX DETACHABLE 14MM x 34CM	45-781434	1905065Z8	00810170018367
		1903115Z8	00810170018367
		1903155Z8	00810170018350
		1904015Z8	00810170018350
		1904105Z8	00810170018367
		1904155Z8	00810170018350
AZUR 18 CX DETACHABLE 16MM x 39CM	45-781639	1905155Z8	00810170018350
		1903155Z8	00810170018350
		1903185Z8	00810170018381
AZUR 18 CX DETACHABLE 18MM x 36CM	45-781836	1904015Z8	00810170018350
		1903065Z8	00810170018350
		1903115Z8	00810170018367
		1903205Z8	00810170018398
		1903225Z8	00810170018398
		1904085Z8	00810170018350
		1904155Z8	00810170018350
		1905155Z8	00810170018350
AZUR 18 CX DETACHABLE 20MM x 40CM	45-782040	1904015Z8	00810170018350
		1903045Z8	00810170018404
		1903115Z8	00810170018367
		1903185Z8	00810170018381
		1904055Z8	00810170018350
		1904155Z8	00810170018350
		1905035ZA	00810170018404

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
		1905065Z8	00810170018367
		1905085Z8	00816777024374
		190515571	00810170018404
		1905155Z8	00810170018350
AZUR 18 CX DETACHABLE 2MM x 2CM	45-780202	1903115Z8	00810170018367
		1903135Z8	00810170018367
		1903185Z8	00810170018381
		1904055Z8	00810170018350
		1904085Z8	00810170018350
		1904175ZA	00816777024367
		1904225Z8	00816777024367
		1904245Z8	00816777024367
		1904265Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
		1905135Z8	00816777024367
		1905205Z8	00816777024367
		AZUR 18 CX DETACHABLE 2MM x 4CM	45-780204
1903085Z8	00816777024374		
1903115Z8	00810170018367		
1903135Z8	00810170018367		
1904015Z8	00810170018350		
1904035Z8	00816777024374		
1904085Z8	00810170018350		
1904105Z8	00810170018367		
1904155Z8	00810170018350		
1904175Z8	00810170018299		
1904225Z8	00816777024367		
1904245Z8	00816777024367		
1904265Z8	00810170018350		
1904295Z8	00810170018350		
1905025Z8	00816777024374		
1905035Z8	00816777024374		
1905065Z8	00810170018367		
1905085Z8	00816777024374		
1905105Z8	00816777024374		
1905105ZA	00816777024374		
1905135Z8	00816777024367		
1905205Z8	00816777024367		
AZUR 18 CX DETACHABLE 3MM x 4CM	45-780304	1903085Z8	00816777024374
		1903115Z8	00810170018367
		1903135Z8	00810170018367
		1903135ZA	00810170018299
		1904035Z8	00816777024374
		1904035ZA	00816777024381

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
		1904175Z8	00810170018299
		1904175ZA	00816777024367
		1904225Z8	00816777024367
		1904245Z8	00816777024367
		1904265Z8	00810170018350
AZUR 18 CX DETACHABLE 3MM x 8CM	45-780308	1903015Z8	00816777024398
		1903045Z8	00810170018404
		1903115Z8	00810170018367
		1903135Z8	00810170018367
		1903155Z8	00810170018350
		1903185Z8	00810170018381
		1904055Z8	00810170018350
		1904105Z8	00810170018367
		1904155Z8	00810170018350
		1904175Z8	00810170018299
		1904225Z8	00816777024367
		1904245Z8	00816777024367
		1904265Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
		1905035Z8	00816777024374
		1905065Z8	00810170018367
		1905085Z8	00816777024374
		AZUR 18 CX DETACHABLE 4MM x 13CM	45-780413
1903045Z8	00810170018404		
1903115Z8	00810170018367		
1903135Z8	00810170018367		
1903135ZA	00810170018299		
1903155Z8	00810170018350		
1904105Z8	00810170018367		
1904155Z8	00810170018350		
1904175Z8	00810170018299		
1904225Z8	00816777024367		
1904265Z8	00810170018350		
1904295Z8	00810170018350		
1905025Z8	00816777024374		
1905085Z8	00816777024374		
1905105Z8	00816777024374		
1905135Z8	00816777024367		
1905205Z8	00816777024367		
		1903115Z8	00810170018367
		1903135Z8	00810170018367

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
AZUR 18 CX DETACHABLE 5MM x 16CM	45-780516	1903205Z8	00810170018398
		1904055Z8	00810170018350
		1904085Z8	00810170018350
		1904225Z8	00816777024367
		1904265Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
		1905025ZA	00810170018305
		1905035Z8	00816777024374
		1905035ZA	00810170018404
		1905065Z8	00810170018367
		1905105Z8	00816777024374
		1905135Z8	00816777024367
		1905205Z8	00816777024367
AZUR 18 CX DETACHABLE 6MM x 20CM	45-780620	1903045Z8	00810170018404
		1903115Z8	00810170018367
		1903135Z8	00810170018367
		1903135ZA	00810170018299
		1903155Z8	00810170018350
		1903185Z8	00810170018381
		1904055Z8	00810170018350
		1904085Z8	00810170018350
		1904105Z8	00810170018367
		1904155Z8	00810170018350
		1904225Z8	00816777024367
		1904245Z8	00816777024367
		1904265Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
		1905025Z8	00816777024374
		1905035Z8	00816777024374
		1905065Z8	00810170018367
		1905085Z8	00816777024374
1905105Z8	00816777024374		
1905105ZA	00816777024374		
1905135Z8	00816777024367		
1905205Z8	00816777024367		
AZUR 18 CX DETACHABLE 7MM x 24CM	45-780724	1903045Z8	00810170018404
		1903185Z8	00810170018381
		1904085Z8	00810170018350
		1904105Z8	00810170018367
		1904265Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
		1905025Z8	00816777024374
		1905035Z8	00816777024374
1905085Z8	00816777024374		



ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
		1905135Z8	00816777024367
AZUR 18 CX DETACHABLE 8MM x 28CM	45-780828	1903045Z8	00810170018404
		1903065Z8	00810170018350
		1903085Z8	00816777024374
		1903115Z8	00810170018367
		1903135Z8	00810170018367
		1903155Z8	00810170018350
		1903205Z8	00810170018398
		1903225Z8	00810170018398
		1904055Z8	00810170018350
		1904085Z8	00810170018350
		1904155Z8	00810170018350
		1904265Z8	00810170018350
		1904295Z8	00810170018350
		1905035Z8	00816777024374
		1905155Z8	00810170018350
		1905155ZA	00810170018336
AZUR 18 CX DETACHABLE 9MM x 28CM	45-780928	1903045Z8	00810170018404
		1903115Z8	00810170018367
		1904055Z8	00810170018350
		1904155Z8	00810170018350
AZUR 18 Framer DETACHABLE 10MM x 26CM	45-681026	1904295Z8	00810170018350
		1903085J5	00810170017766
		1903155J5	00810170017742
AZUR 18 Framer DETACHABLE 14MM x 34CM	45-681434	1904035J5	00810170017766
		1903015J5	00810170017803
AZUR 18 Framer DETACHABLE 20MM x 50CM	45-682050	1903155J5	00810170017742
		1904155J5	00810170017742
		1903085K5	00810170017742
		1903135J5	00810170017834
		1904175J5	00810170017834
		1905105K5	00810170017834
AZUR 18 Framer DETACHABLE 8MM x 20CM	45-680820	1903155J5	00810170017742
		1904015J5	00810170017742
		1903085K5	00810170017742
		1904035J5	00810170017766
		1904155J5	00810170017742
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 10MM x 15CM	45-481015	19031155A	00810170018008
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 10MM x 20CM	45-481020	19031355E	00810170018015
		190424567	00810170018015

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 12MM x 15CM	45-481215	19031154K	00810170018022
		19041554Z	00810170018022
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 12MM x 20CM	45-481220	19051357G	00810170018039
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 15MM x 15CM	45-481515	19041554W	00810170018046
		19041556Q	00810170018046
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 15MM x 20CM	45-481520	19032053A	00810170018053
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 20MM x 20CM	45-482020	190320539	00810170018077
		19040855Y	00810170018077
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 20MM x 30CM	45-482030	19040855X	00810170018084
		190515578	00810170018084
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 2MM x 2CM	45-480202	19032054J	00810170017841
		190506581	00810170017841
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 2MM x 4CM	45-480204	19051357N	00810170017858
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 3MM x 10CM	45-480310	19031154N	00810170017889
		19031355G	00810170017889
		190401554	00810170017889
		19050657X	00810170017889
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 3MM x 2CM	45-480302	19050657V	00810170017865
		19051357P	00810170017865
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 3MM x 5CM	45-480305	19031154L	00810170017872
		19031354G	00810170017872
		19031355F	00810170017872
		19042254K	00810170017872
		19042453J	00810170017872
		19050657W	00810170017872
		19051357L	00810170017872
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 4MM x 10CM	45-480410	19031154G	00810170017902
		19031155B	00810170017902
		19031354H	00810170017902
		19031355H	00810170017902
		19032054N	00810170017902
		190415553	00810170017902
		19042254L	00810170017902
		19051357K	00810170017902
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 4MM x 15CM	45-480415	19041554V	00810170017919
		19050657U	00810170017919
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 4MM x 20CM	45-480420	190506582	00810170017926
		19051357H	00810170017926
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 4MM x 5CM	45-480405	190424568	00810170017896
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 6MM x 10CM	45-480610	19041554Y	00810170017933
		19041556V	00810170017933
		19051357J	00810170017933
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 6MM x 15CM	45-480615	19042254G	00810170017940
		19031354J	00810170017957

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 6MM x 20CM	45-480620	19041554X	00810170017957
		19042453K	00810170017957
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 8MM x 10CM	45-480810	19032053E	00810170017964
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 8MM x 15CM	45-480815	19040853U	00810170017971
		190415552	00810170017971
AZUR 18 HYDROCOIL DETACHABLE 8MM x 20CM	45-480820	19031355J	00810170017988
		19032053C	00810170017988
		19032252U	00810170017988
AZUR 35 CX DETACHABLE 10MM x 19CM	45-751019	1903045J2	00812636021072
		1903065J2	00812636021027
		1903085J2	00812636021034
		1904155J2	00812636021072
		1904175J2	00812636021072
		1904265J2	00812636021027
		1904295J2	00812636021027
		1905035J2	00812636021041
		1905085J2	00812636021058
		1905105K2	00812636021072
		1905135J2	00812636021072
AZUR 35 CX DETACHABLE 13MM x 24CM	45-751324	1903045J2	00812636021072
		1903155J2	00812636021089
		1903205J2	00812636021089
		1903225J2	00812636021089
		1904155J2	00812636021072
		1904225J2	00812636021089
		1904265J2	00812636021027
		1904295J2	00812636021027
		1905065J2	00812636021041
AZUR 35 CX DETACHABLE 16MM x 32CM	45-751632	1903045J2	00812636021072
		1903065J2	00812636021027
		1903205J2	00812636021089
		1903225J2	00812636021089
		1904175J2	00812636021072
		1904265J2	00812636021027
		1904295J2	00812636021027
		1905035J2	00812636021041
		1905065J2	00812636021041
AZUR 35 CX DETACHABLE 20MM x 39CM	45-752039	1903045J2	00812636021072
		1903205J2	00812636021089
		1904265J2	00812636021027
		1905035J2	00812636021041

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
		1905065J2	00812636021041
		190515574	00812636021102
AZUR 35 CX DETACHABLE 4MM x 7CM	45-750407	1903045J2	00812636021072
		1903065J2	00812636021027
		1903085J2	00812636021034
		1903115J2	00812636021010
		1903155J2	00812636021089
		1904175J2	00812636021072
		1904175K2	00812636021010
		1904225J2	00812636021089
		1904245J2	00812636021010
		1904265J2	00812636021027
		1904295J2	00812636021027
AZUR 35 CX DETACHABLE 5MM x 11CM	45-750511	1903045J2	00812636021072
		1903065J2	00812636021027
		1903085J2	00812636021034
		1903155J2	00812636021089
		1904175J2	00812636021072
		1904175K2	00812636021010
		1904225J2	00812636021089
		1904245J2	00812636021010
		1904265J2	00812636021027
AZUR 35 CX DETACHABLE 6MM x 17CM	45-750617	1903045J2	00812636021072
		1903065J2	00812636021027
		1903085J2	00812636021034
		1903155J2	00812636021089
		1904055J2	00812636021041
		1905035J2	00812636021041
		1905065J2	00812636021041
		1905085J2	00812636021058
AZUR 35 CX DETACHABLE 6MM x 9CM	45-750609	1903045J2	00812636021072
		1903065J2	00812636021027
		1903085J2	00812636021034
		1904035J2	00812636021034
AZUR 35 CX DETACHABLE 8MM x 12CM	45-750812	1903045J2	00812636021072
		1903085J2	00812636021034
		1905035J2	00812636021041
		1905065J2	00812636021041
		1905085J2	00812636021058
AZUR 35 CX DETACHABLE 8MM x 21CM	45-750821	1903045J2	00812636021072
		1903065J2	00812636021027
		1903155J2	00812636021089
		1904055J2	00812636021041

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
AZUR 35 FRAMER DETACHABLE 8MM x 24CM	45-750024	1905035J2	00812636021041
		1905065J2	00812636021041
		1905085J2	00812636021058
		190515573	00812636021065
AZUR 35 Framer DETACHABLE 10MM x 26CM	45-651026	19030655Y	00810170016103
		19041556W	00810170016103
		19051058A	00810170016103
AZUR 35 Framer DETACHABLE 14MM x 34CM	45-651434	190410564	00810170016127
AZUR 35 Framer DETACHABLE 20MM x 50CM	45-652050	19030654Y	00810170016158
		19041556X	00810170016158
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 10MM x 15CM	45-451015	190410589	00810170014963
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 10MM x 20CM	45-451020	19030456J	00810170014970
		19041056C	00810170014970
		19041756Y	00810170014970
		190422549	00810170014970
		190422573	00810170014970
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 12MM x 15CM	45-451215	190410569	00810170014987
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 12MM x 20CM	45-451220	19040853N	00810170014994
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 12MM x 30CM	45-451230	19041554R	00810170015007
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 15MM x 20CM	45-451520	19030654N	00810170015014
		190408565	00810170015014
		190410588	00810170015014
		190422572	00810170015014
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 15MM x 30CM	45-451530	19030456L	00810170015021
		190408569	00810170015021
		19041056A	00810170015021
		190415571	00810170015021
		19041756Z	00810170015021
		190417599	00810170015021
		19042656G	00810170015021
		19050254X	00810170015021
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 20MM x 20CM	45-452020	19030456N	00810170015038
		19030654L	00810170015038
		19030655W	00810170015038
		19040856A	00810170015038
		19041552H	00810170015038
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 20MM x 30CM	45-452030	19041058A	00810170015045
		19041554U	00810170015045
		19042656H	00810170015045
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 4MM x 10CM	45-450410	19030456C	00810170014895
		19030655V	00810170014895
		19041058F	00810170014895
		190422575	00810170014895
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 4MM x 15CM	45-450415	190422574	00810170014901

ProductDescription	Catalog Number	LotID	GTIN
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 4MM x 5CM	45-450405	19030453C	00810170014888
		19030456B	00810170014888
		19042254B	00810170014888
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 6MM x 10CM	45-450610	19030456E	00810170014918
		19030654W	00810170014918
		190410568	00810170014918
		19041058E	00810170014918
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 6MM x 15CM	45-450615	19030456F	00810170014925
		190401568	00810170014925
		19041058C	00810170014925
		19041556Y	00810170014925
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 6MM x 20CM	45-450620	19030453J	00810170014932
		19030655N	00810170014932
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 8MM x 15CM	45-450815	19030456G	00810170014949
		19030654U	00810170014949
		19050253U	00810170014949
		19050254Z	00810170014949
AZUR 35 HYDROCOIL DETACHABLE 8MM x 20CM	45-450820	19030453K	00810170014956
		19030456H	00810170014956
		19030654R	00810170014956
		19030655G	00810170014956
		19030655H	00810170014956
		19050253V	00810170014956
		19050254Y	00810170014956
		19050657T	00810170014956
		19051058C	00810170014956
AZUR DETACHABLE 35 HYDROCOIL	45-450510	19030453E	00810170014376
		19030655X	00810170014376