



Hygiene Equipment
Designed for People

Data: 29/04/2020

Importante avviso di sicurezza Field Safety Notice, FSN

Denominazione commerciale/Prodotto:

TR Equipment, Mobil bad-lyft TR9650 (sollevatore mobile d'ausilio vasca da bagno)

Il prodotto è stato concepito per aiutare i pazienti a entrare e uscire dalla vasca da bagno, a fare il bagno e a svestirsi e rivestirsi.

Codice di riferimento FSN: 2534

Egregio cliente,

Il presente avviso di sicurezza riguarda il sollevatore d'ausilio vasca da bagno TR9650, la Sedia solleva paziente TR9650, il Sollevatore a barella TR9650 e il Sollevatore combinato mobile TR9650.

Numero di riferimento dell'articolo:

0542000 TR9650 Sedia solleva paziente
0542010 TR9650 Sollevatore a barella
0542020 TR9650 Sollevatore combinato mobile



Numero di serie dei sollevatori d'ausilio vasca da bagno TR9650 corre
Dal 1203-20410 al 1501-22465.

Descrizione/Rischio:

TR Equipment AB è stata informata che tra il 2012 e il marzo 2015 un ingranaggio del cambio del motore di sollevamento è stato costruito in un materiale che, dopo alcuni anni d'utilizzo, tende a logorarsi e rompersi.

Se l'ingranaggio si rompe durante l'utilizzo l'imbracatura/il sollevatore a barella cade.

Sede centrale

TR Equipment AB, Svezia

Numero di telefono: +46 140 38 50 60

info@trequipment.se

www.trequipment.se

Società afferenti al gruppo

TR Group Inc, US, Numero di telefono: +1 (800) 752 6900

TR Equipment Ltd, UK, Numero di telefono: +44 (0) 844 335 8386

TRanspoRehaMed GmbH, Germania, Numero di telefono: +49 (0) 212 6458



TR EQUIPMENT



L'utilizzatore deve pertanto applicare le seguenti misure:

1. Controllare se il sollevatore TR9650 ha un numero di serie compreso tra 1203-20410 e 1501-22465.
2. TR Equipment raccomanda di cambiare i motori dei sollevatori con numero di serie compreso **tra 1203-20410 e 1501-22465**. Il numero di riferimento del motore è 2419640.
3. Contattare TR Equipment AB per maggiori informazioni sulla sostituzione del motore.

Il fabbricante dovrà applicare le seguenti misure:

1. Le istruzioni relative alla sostituzione del motore saranno pubblicate sul nostro sito a partire dallo 01/05/2020:

<https://www.trequipment.com/products/tr-9650>

Distribuzione/trasmissione del presente avviso sulla sicurezza:

Il presente avviso di sicurezza sarà distribuito alle persone interessate in seno alla nostra società oppure ad altre società che utilizzano i sollevatori d'ausilio vasca da bagno TR9650.

Siamo spiacenti per i problemi causati da tale disguido.

Sede centrale

TR Equipment AB, Svezia

Numero di telefono: +46 140 38 50 60

info@trequipment.se

www.trequipment.se

Società afferenti al gruppo

TR Group Inc, US, Numero di telefono: +1 (800) 752 6900

TR Equipment Ltd, UK, Numero di telefono: +44 (0) 844 335 8386

TRanspoRehaMed GmbH, Germania, Numero di telefono: +49 (0) 212 6458





Modulo di replica

Field Safety Notice (FSN) (Avviso di sicurezza): 2534 (fabbricante)
Data: 23/04/2020

Prodotto interessato: Sollevatore d'ausilio vasca da bagno TR9650
Codice di riferimento dell'articolo: 0542000 TR9650 Sedia solleva
paziente
Codice di riferimento dell'articolo: 0542010 TR9650 Sollevatore a
barella
Codice di riferimento dell'articolo: 0542020 TR9650 Sollevatore
combinato mobile

<input type="checkbox"/>	Ho ricevuto un avviso di sicurezza importante, l'FSN numero 2534, e dichiaro di aver compreso l'informazione.	Data:
<input type="checkbox"/>	L'avviso importante di sicurezza n° 2534 è stato inoltrato a tutti gli utenti interessati in seno alla nostra società.	Data:
<input type="checkbox"/>	Confermo che il motore 2419640 del sollevatore d'ausilio vasca da bagno è stato sostituito secondo le istruzioni presenti sul sito: https://www.trequipment.com/products/tr-9650	Specificare il numero di serie del sollevatore nel campo sottostante.

Numero di serie:

Sede centrale

TR Equipment AB, Svezia

Numero di telefono: +46 140 38 50 60

info@trequipment.se

www.trequipment.se

Società afferenti al gruppo

TR Group Inc, US, Numero di telefono: +1 (800) 752 6900

TR Equipment Ltd, UK, Numero di telefono: +44 (0) 844 335 8386

TRanspoRehaMed GmbH, Germania, Numero di telefono: +49 (0) 212 6458





Hygiene Equipment
Designed for People

In caso di bisogno, contattaci pure. Qui sotto troverai i nostri recapiti:

Recapiti	
Società:	
Indirizzo:	
Codice postale:	
Località:	
Paese:	
Numero di telefono:	
E-mail:	
Interlocutore:	
Firma:	

Distributore	
Nome:	
Indirizzo:	
Codice postale:	
Località:	
Paese:	
Numero di telefono:	
E-mail:	
Persona da contattare:	
Firma:	

Ti preghiamo d'inviare il modulo di replica firmato all'indirizzo info@treqipment.com.

È molto importante che tu ci confermi di aver ricevuto il nostro avviso di sicurezza, FSN 2534. La tua risposta è importante ai fini della nostra documentazione interna e al fine di poter seguire il corretto svolgimento delle operazioni dovute al disguido.

Nel caso tu abbia ulteriori domande, contatta:

TR Equipment AB

Fredrik Dungmark

Fredrik.dungmark@treqipment.se / +46 (0)70 850 19 63

Sede centrale

TR Equipment AB, Svezia

Numero di telefono: +46 140 38 50 60

info@treqipment.se

www.treqipment.se

Società afferenti al gruppo

TR Group Inc, US, Numero di telefono: +1 (800) 752 6900

TR Equipment Ltd, UK, Numero di telefono: +44 (0) 844 335 8386

TRanspoRehaMed GmbH, Germania, Numero di telefono: +49 (0) 212 6458



TR EQUIPMENT