

Sicherheitsmitteilung

betreffend Produkt: SELEXA Bettliege

Fr, 15.01.2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

bezüglich unserer Sicherheitsmitteilung betreffend unserer SELEXA Bettliege, erlauben wir Sie über folgende Änderung zu informieren:

In unserer ersten Sicherheitsmitteilung haben wir Ihnen mitgeteilt, dass LiKAMED empfiehlt bei der nächsten routinemäßigen Wartung die betroffene SELEXA Bettliege mit dem langfristigen Nachrüstset (Arbeitszeit ca. 45 Minuten) nachzurüsten. Sollte die nächste Wartung nicht innerhalb der nächsten 30 Tagen geplant sein, sollten Sie die betroffenen Schrauben an der SELEXA einer Sichtprüfung unterziehen (siehe nachfolgende Anweisung) und wenn die Schrauben in Ordnung sind, mit dem vorübergehenden Nachrüstset (Arbeitszeit ca. 5 Minuten) sichern.

Änderung:

Aufgrund der aktuell erschwerten Bedingungen seitens Corona und verschiedenen Lockdowns und der damit verbundenen Tatsache, dass eine fristgerechte Erfüllung innerhalb von 30 Tagen nicht möglich ist, daher entfallen die 30 Tage. Die Maßnahme muss so schnell wie möglich erfolgen.

Wir erlauben uns nochmals auf die Sichtprüfung der Schrauben hinzuweisen.

Zusätzlich erlauben wir ab sofort dass beide Maßnahmen auch von Personen durchgeführt werden, welche nicht von Likamed autorisiert sind. Voraussetzung ist jedoch, dass die ausführende Person eine entsprechende Qualifikation im Bereich Technik besitzt (z.B.: Haustechniker / Mechaniker).

Kontaktieren Sie uns bei Rückfragen unter:

LiKAMED GmbH

Ihr LiKAMED Kundenansprechpartner

Raußmühlstraße 7

D- 75031 Eppingen

Telefon: +49 (0) 7262/9189-0

Fax: +49 (0) 7262/9189-917

Mail: reklamation@likamed.de

