

Avis de sécurité

concernant le produit : fauteuil-lit SELEXA

Ve,15/01/2021

Chère cliente, cher client,

Nous nous permettons de vous informer du changement suivant relatif à notre avis de sécurité à propos de notre fauteuil-lit SELEXA :

Dans notre premier avis de sécurité, nous vous avons informé que LiKAMED recommande d'équiper le fauteuil-lit SELEXA concerné du kit de mise à niveau à long terme (durée de l'intervention : env. 45 min) à l'occasion de la prochaine opération de maintenance de routine. Si la prochaine intervention de maintenance n'est pas prévue dans les 30 prochains jours, nous vous recommandons de soumettre les vis affectées du fauteuil-lit SELEXA à un contrôle visuel (voir instructions suivantes) et à les sécuriser à l'aide du kit de mise à niveau temporaire (temps d'intervention : env. 5 minutes) si elles sont intactes.

Modification :

Au vu des conditions rendues actuellement difficiles dans le cadre de l'épidémie de coronavirus et des différents confinements, une exécution en temps voulu en l'espace de 30 jours n'est pas possible, raison pour laquelle nous avons supprimé cette échéance. La mesure doit être exécutée aussi vite que possible.

Nous nous permettons à nouveau d'attirer votre attention sur la nécessité de procéder à un contrôle visuel des vis.

Par ailleurs, nous autorisons dès maintenant l'exécution des deux mesures aussi par des personnes n'ayant pas été autorisées par Likamed. La personne en charge de leur réalisation doit néanmoins disposer d'une qualification correspondante dans le domaine technique (par ex. technicien de service interne / mécanicien).

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire :

LiKAMED GmbH
Votre interlocuteur LiKAMED
Raußmühlstraße 7
D- 75031 Eppingen

Téléphone : +49 (0) 7262/9189-0

Fax : +49 (0) 7262/9189-917

E-mail : reklamation@likamed.de