



## ERGÄNZTE DRINGENDE KORREKTURMASSNAHME ZWISCHENKOMMUNIKATION

Produktbezeichnung	Bestellnummer	Produktbezeichnung	Bestellnummer
i-STAT CG8+ Kartuschen	03P88-25	i-STAT EG7+ Kartuschen	03P76-25

### Juni 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Folgekommunikation zur vorherigen Mitteilung APOC2020-007 möchte Abbott Point of Care Ihnen aktualisierte Informationen zu den Fortschritten zur Wiederherstellung der zweimonatigen Lagerung bei Raumtemperatur der oben aufgeführten i-STAT® CG8+ und EG7+ Kartuschen liefern. Wir möchten Sie bitten, die aktualisierten empfohlenen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen, die nachfolgend aufgeführt sind, zu beachten.

Wie bereits mitgeteilt, hat Abbott Point of Care im Rahmen interner Tests nach der Lagerung der i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen bei 30 °C über 14 Tage festgestellt, dass ca. 5,2 % dieser Kartuschen für ionisiertes Kalzium höher als erwartete Ergebnisse lieferten. Darüber hinaus hat Abbott Point of Care festgestellt, dass bei **manchen** i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen für ionisiertes Kalzium **höher als erwartete Ergebnisse auftreten können**, wenn sie bei Raumtemperatur (18 bis 30 °C) gelagert werden und über einen längeren Zeitraum als:

- 3 Tage für die Chargen \*20100 bis \*20339 und
- 7 Tage für die Chargen \*20340 und höher.

Wobei \* = Buchstabe A, K, L, M, N, W oder Y der Chargenbezeichnung.

Hinweis: Die Informationen in diesem Schreiben sind chargenspezifisch.

### AKTUALISIERTE INFORMATIONEN ZUR UNTERSUCHUNG

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde im Rahmen der Untersuchung von Abbott Point of Care festgestellt, dass eine Charge eines Rohmaterials für die Herstellung der i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen-Kalibrationspackungen die Hauptursache für die höher als erwarteten Ergebnisse für ionisiertes Kalzium nach Lagerung bei 30 °C ist.

Abbott Point of Care hat die Verwendung dieser Charge des Rohmaterials eingestellt und zusätzliche Qualitätskontrolltests für derartiges Rohmaterial implementiert. Darüber hinaus hat Abbott Point of Care die Qualitätskontrolltests für i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen verstärkt, um die Empfehlungen zur Lagerung bei Raumtemperatur im Schreiben APOC2020-007 zu unterstützen.

Abbott Point of Care hat die Empfehlung zur Lagerung über 4 Wochen bei Raumtemperatur für bestimmte, nachfolgend aufgeführte Kartuschenchargen aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass die zuvor mitgeteilte Empfehlung von 3 bzw. 7 Tagen für bestimmte, nachfolgend aufgeführte Chargen weiterhin gültig ist. Abbott Point of Care wird eine Folgemitteilung versenden, sobald weitere Daten zur Bestätigung der Wiederherstellung der zweimonatigen Lagerung bei Raumtemperatur für die i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen verfügbar ist.

Abbott Point of Care hat **keine** Berichte über Schädigungen von Patienten im Zusammenhang mit diesem Problem erhalten.



### EMPFOHLENE MASSNAHMEN

Während Abbott Point of Care die Untersuchung und die Implementierung von Korrekturmaßnahmen zu diesem Problem fortsetzt, gelten die folgenden aktualisierten Empfehlungen zur Lagerung und Verwendung.

**Wenn Ergebnisse für ionisiertes Kalzium mit den i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen benötigt werden, ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen:**

- **Chargen \*21135 und höher: innerhalb von 4 Wochen nach der Entnahme aus der gekühlten Lagerung verwenden**

**Wobei \* = Buchstabe A, K, L, M, N, W und Y der Chargenbezeichnung**

Bitte beachten Sie, dass die Empfehlungen für die nachfolgend aufgeführten Chargen unverändert bleiben:

- Chargen \*20100 bis \*20339: innerhalb von 3 Tagen nach der Entnahme aus der gekühlten Lagerung verwenden
- Chargen \*20340 bis \*21134: innerhalb von 7 Tagen nach der Entnahme aus der gekühlten Lagerung verwenden

Wobei \* = Buchstabe A, K, L, M, N, W und Y der Chargenbezeichnung

Abbott Point of Care hat **keine** höher als erwarteten Ergebnisse für den Test auf ionisiertes Kalzium festgestellt, wenn die i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen aus der gekühlten Lagerung entnommen und zur Verwendung innerhalb der oben aufgeführten Anzahl an Tagen oder Wochen auf Raumtemperatur erwärmt werden.

Wie bereits mitgeteilt, **empfiehlt Abbott Point of Care für den Fall, dass Ihre Einrichtung die oben aufgeführten Maßnahmen nicht ergreifen kann, die Einstellung und keine Weitergabe von Ergebnissen des Tests auf ionisiertes Kalzium mit den i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen und stattdessen die Verwendung einer alternativen i-STAT Kartusche oder Methode zur Messung von ionisiertem Kalzium.**

Weitere Informationen zur Deaktivierung des Tests auf ionisiertes Kalzium für diese Kartuschen finden Sie nachfolgend. Wenn Ihre Einrichtung beschließt, mit der Deaktivierung des Tests auf ionisiertes Kalzium fortzufahren, finden Sie Informationen hierzu am Ende dieser Mitteilung. Wenn Tests auf ionisiertes Kalzium mit der Schnittstelle des Laborinformationssystems (LIS) verbunden sind, kann die Deaktivierung des Analyten eine Änderung der Schnittstelle erfordern. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an den Hersteller Ihrer Schnittstelle.

Wenn Sie i-STAT CG8+ oder EG7+ Kartuschen an eine andere Einrichtung weitergeleitet haben, möchten wir Sie bitten, eine Kopie dieses Schreibens an diese Einrichtung weiterzuleiten. Bitte verwenden Sie dieses Schreiben zur Aktualisierung der Empfehlungen, die in der vorherigen Mitteilung APOC2020-007 enthalten waren.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

In den nächsten 6-8 Wochen plant Abbott Point of Care eine Umstellung zur Auslieferung von Chargen mit empfohlener Verwendung innerhalb von 4 Wochen nach der Entnahme aus der gekühlten Lagerung.

**Abbott**

Wenn Sie Fragen zu diesen Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Abbott Point of Care Kundendienst. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Durchführung des Tests auf ionisiertes Kalzium mit den i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschen an Ihren Abbott Point of Care Kundendienst oder an [oustechsvc@apoc.abbott.com](mailto:oustechsvc@apoc.abbott.com).

Für Abbott Point of Care hat diese Situation höchste Priorität. Wir werden Sie während des gesamten Prozesses unterstützen.

### Informationen zur Konfiguration des i-STAT Alinity Systems:

- Gehen Sie zu <https://www.pointofcare.abbott/int/en/home> und navigieren Sie zu Support > i-STAT Alinity Resources Login > Operator Documentation > i-STAT Alinity System Operations Manual (Sprache: Englisch):
  - **Kunden, die AlinIQ CWi verwenden**, finden Informationen zur Konfiguration dieser Option im i-STAT Alinity Systembetriebshandbuch, Abschnitt 3.1 - AlinIQ CWi - Arbeitsbereich-Anpassung für i-STAT, *Kategorie Analyteneinstellungen, Analyten aktivieren/deaktivieren*. **HINWEIS: Zur Konfiguration dieser Funktion ist AlinIQ Cwi erforderlich.**

### Informationen zur Konfiguration des i-STAT 1 Systems:

- Gehen Sie zu <https://www.pointofcare.abbott/int/en/home> und navigieren Sie zu Support > i-STAT 1 Resources Login > Administrator Documentation > Technical Bulletins (Sprache: English United Kingdom) > Data Management User Documentation und wählen Sie i-STAT DE Documentation aus:
  - Siehe i-STAT DE User Guide v2.10 Art:754472, Kapitel 3.15 Customizing Analyte Enable Options
- Gehen Sie zu <https://www.pointofcare.abbott/int/en/home> und navigieren Sie zu Support > i-STAT 1 Resources Login > Operator Documentation > i-STAT 1 System Manuals
  - Für i-STAT **Kunden ohne i-STAT/DE**: Lesen Sie das i-STAT Systemhandbuch, i-STAT 1 System Art:714364, *Ändern des Profils* für Anweisungen zum Öffnen des Ergebnismenüs und anschließend des Menüs Einheiten und Bereiche, um die Einstellung zu ändern.



**Abbott**

**i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschenchargen**

Liste der potentiell betroffenen i-STAT CG8+ und EG7+ Kartuschenchargen, die seit dem 7. Dezember 2021 versandt wurden. Bitte befolgen Sie weiterhin die in diesem Schreiben empfohlenen Maßnahmen für alle i-STAT CG8+ und EG7+ Chargen.

Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge
EG7+	L20106A	CG8+	W20188	CG8+	W20261	CG8+	W20336	CG8+	W21056
CG8+	W20106	CG8+	W20188A	EG7+	N20262	CG8+	W20337	EG7+	N21057
CG8+	W20108	EG7+	L20189	CG8+	W20262	EG7+	N20338	CG8+	W21057
EG7+	L20107	CG8+	W20191	EG7+	N20263	CG8+	L20339	EG7+	N21058
EG7+	L20108A	CG8+	W20191A	CG8+	W20263	EG7+	N20339	EG7+	W21058
CG8+	W20110	CG8+	W20191B	CG8+	W20263A	CG8+	W20339	EG7+	N21059
EG7+	L20110A	CG8+	W20191C	EG7+	N20264	CG8+	W20339A	CG8+	W21059
CG8+	W20111	CG8+	W20192	CG8+	W20265	EG7+	N20341	CG8+	W21060
CG8+	W20112A	CG8+	W20192A	CG8+	W20266	CG8+	L20341A	CG8+	W21060A
CG8+	W20113	EG7+	N20193	CG8+	W20268	CG8+	W20341	EG7+	N21061
EG7+	N20113	CG8+	W20193	EG7+	N20269	EG7+	N20342	CG8+	W21062
EG7+	N20114	CG8+	W20194	CG8+	L20270	EG7+	N20342A	CG8+	W21063
CG8+	W20113A	CG8+	W20194A	CG8+	L20270A	CG8+	W20342	CG8+	W21064
CG8+	W20114	EG7+	W20194B	CG8+	W20270	EG7+	N20343	EG7+	N21065
EG7+	N20115	EG7+	N20195	CG8+	W20271	CG8+	W20343	EG7+	N21065A
CG8+	W20116	EG7+	N20196	CG8+	W20272	EG7+	N20344	CG8+	W21065
EG7+	N20117	EG7+	N20196A	CG8+	W20272A	CG8+	W20345	CG8+	W21065A
CG8+	W20117	EG7+	N20197	EG7+	N20273	CG8+	W20346	EG7+	N21066
CG8+	W20117A	CG8+	W20197	CG8+	W20273	EG7+	N20348A	CG8+	W21066
CG8+	W20118	EG7+	N20198	EG7+	N20274	CG8+	W20348	EG7+	N21067
EG7+	N20119	EG7+	N20198A	CG8+	W20275	CG8+	W20348A	EG7+	N21067A
CG8+	W20119	CG8+	W20198	EG7+	N20276	EG7+	N20349	CG8+	W21067
EG7+	N20120	CG8+	W20198A	CG8+	W20276	EG7+	N20350	CG8+	W21068
CG8+	W20120	EG7+	N20199	EG7+	N20277	CG8+	W20350	EG7+	N21069
EG7+	N20121	CG8+	W20199	CG8+	W20277	EG7+	N20351	EG7+	N21069A
EG7+	N20121A	EG7+	N20200	CG8+	W20279	CG8+	W20351A	CG8+	W21069
CG8+	W20122	EG7+	N20200A	CG8+	W20279A	CG8+	W20352	CG8+	W21070
EG7+	N20124	CG8+	W20200	CG8+	W20280	EG7+	N20353	CG8+	W21070A
CG8+	W20124	EG7+	N20201	CG8+	W20280A	EG7+	N20354	CG8+	W21071
CG8+	W20126	EG7+	N20201A	EG7+	N20281A	CG8+	W20357	EG7+	N21072
CG8+	W20126A	EG7+	N20202	EG7+	N20282	CG8+	W20358	CG8+	W21072
EG7+	N20127	EG7+	N20203	CG8+	W20282	CG8+	L20359	CG8+	W21073
CG8+	W20127	EG7+	N20204	EG7+	N20283	EG7+	N20363	EG7+	N21074
EG7+	N20128	EG7+	N20204A	CG8+	W20284	EG7+	N20363A	EG7+	N21076
EG7+	L20129	CG8+	W20204	CG8+	W20285	CG8+	L20363	CG8+	W21076
CG8+	W20129	CG8+	W20205	EG7+	N20286	CG8+	W20363	EG7+	N21077
EG7+	N20130	CG8+	W20205A	CG8+	W20287	CG8+	L20364	CG8+	W21077
CG8+	W20131	EG7+	N20206A	EG7+	N20288	CG8+	W20364	EG7+	N21078
EG7+	N20132	EG7+	N20206B	EG7+	N20288A	EG7+	N20365	CG8+	W21078

**APOC2020-007B**

i-STAT ist ein eingetragenes Warenzeichen von Abbott.

Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge
CG8+	W20132	EG7+	N20207	EG7+	N20289	EG7+	N20365A	EG7+	N21079
EG7+	N20133	EG7+	N20207A	EG7+	N20290	CG8+	L20365	CG8+	W21079
CG8+	W20133	EG7+	N20208	CG8+	W20290	CG8+	W20365	EG7+	N21080A
CG8+	W20134	EG7+	N20208A	EG7+	N20291	CG8+	W20366	CG8+	W21080
CG8+	W20135	EG7+	N20209	EG7+	N20291A	EG7+	N21002	CG8+	W21080A
EG7+	N20136	EG7+	N20209A	CG8+	W20291	CG8+	W21002	EG7+	N21081
CG8+	W20136	CG8+	W20209	CG8+	W20292	CG8+	W21002A	CG8+	W21081
EG7+	N20137	CG8+	W20209A	CG8+	W20293	EG7+	N21003	EG7+	N21082
CG8+	W20137	EG7+	N20210	EG7+	N20294	EG7+	N21003A	EG7+	N21083
CG8+	W20137A	CG8+	W20210	EG7+	N20294A	CG8+	W21004	EG7+	N21083
CG8+	W20138	CG8+	W20211	CG8+	W20294	EG7+	N21005	EG7+	N21084
EG7+	N20139	EG7+	N20212	CG8+	W20294A	CG8+	W21005	CG8+	W21084
CG8+	W20139	CG8+	W20212	CG8+	W20294B	CG8+	W21006	EG7+	N21085
EG7+	N20140	EG7+	N20213	EG7+	N20295	EG7+	N21007	CG8+	W21085A
CG8+	W20140	EG7+	N20214	EG7+	N20295A	EG7+	N21007A	EG7+	N21087
CG8+	W20140A	EG7+	N20214A	EG7+	N20295B	CG8+	W21007	EG7+	N21091
CG8+	W20141	CG8+	W20214	CG8+	W20295	CG8+	W21007A	CG8+	W21091
CG8+	W20142A	CG8+	W20215	CG8+	W20295A	EG7+	N21008	CG8+	W21092
EG7+	N20143A	CG8+	W20216	EG7+	N20296	CG8+	W21008	EG7+	N21093
CG8+	W20143	EG7+	N20220	EG7+	N20296A	EG7+	N21009	CG8+	W21093
CG8+	W20143A	EG7+	N20220A	EG7+	N20297	EG7+	N21010	EG7+	N21094
CG8+	W20144	EG7+	N20222	EG7+	N20297A	CG8+	W21010	CG8+	W21094
EG7+	N20145B	EG7+	N20223	EG7+	N20298	EG7+	N21011	CG8+	W21095
CG8+	W20145	CG8+	W20223	EG7+	N20298A	CG8+	W21011	EG7+	N21096
CG8+	W20145A	CG8+	W20223A	EG7+	N20300	EG7+	N21012	CG8+	W21096
EG7+	L20146	EG7+	N20224	CG8+	W20300	CG8+	W21012	EG7+	N21098
EG7+	N20146	EG7+	N20224A	EG7+	N20301	EG7+	N21013	CG8+	W21098
CG8+	W20146	CG8+	W20224	CG8+	W20301	CG8+	W21013	EG7+	N21099
EG7+	N20147	EG7+	N20225	EG7+	N20302	EG7+	N21014	EG7+	W21099
CG8+	W20147	CG8+	W20226	EG7+	N20302A	CG8+	W21014	EG7+	N21100
EG7+	N20148	EG7+	N20227	EG7+	N20303	EG7+	N21015	EG7+	W21101
CG8+	W20148	CG8+	W20227	CG8+	W20303	CG8+	W21015	EG7+	N21102
EG7+	N20149	EG7+	N20228	EG7+	N20304	EG7+	N21016	CG8+	W21102
EG7+	N20149A	EG7+	N20228A	CG8+	W20304	EG7+	N21016A	EG7+	N21103
EG7+	W20149	EG7+	N20229	EG7+	N20305	CG8+	W21016	CG8+	W21104
EG7+	N20150	CG8+	W20229	EG7+	N20305A	CG8+	W21016A	EG7+	N21105
EG7+	N20150A	CG8+	W20229A	CG8+	W20305	EG7+	N21017	CG8+	W21105
EG7+	W20152	EG7+	N20230	CG8+	W20305A	EG7+	N21018A	EG7+	N21106
CG8+	W20152A	EG7+	N20230A	CG8+	W20306	EG7+	N21020	CG8+	W21106A
CG8+	W20153	CG8+	W20230	EG7+	N20307	CG8+	W21020	EG7+	N21107
CG8+	W20154	CG8+	W20231	EG7+	N20308	EG7+	N21021	CG8+	W21107
EG7+	N20155	CG8+	W20231A	EG7+	W20308	CG8+	W21021	CG8+	W21107A

## APOC2020-007B

i-STAT ist ein eingetragenes Warenzeichen von Abbott.

Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge	Kartusche	Charge
CG8+	W20155	CG8+	W20231B	EG7+	N20309	CG8+	W21021A	CG8+	W21109
CG8+	W20156	EG7+	N20233	EG7+	W20309	EG7+	N21022	EG7+	N21111
EG7+	N20158	CG8+	W20233	EG7+	W20309A	EG7+	N21023	CG8+	W21111
EG7+	N20159	CG8+	W20233A	EG7+	N20310	CG8+	W21023	CG8+	W21112
CG8+	W20159	CG8+	W20234	CG8+	W20310A	CG8+	W21023A	EG7+	N21113
EG7+	N20160	EG7+	N20236	EG7+	N20311	CG8+	W21028	CG8+	W21114
CG8+	W20160	CG8+	W20236	CG8+	W20311	CG8+	W21030	EG7+	N21116
CG8+	W20161	EG7+	N20237	EG7+	N20312	EG7+	N21035	EG7+	N21118
EG7+	W20161A	CG8+	W20237	CG8+	W20312A	CG8+	W21035	EG7+	N21120
EG7+	N20162	EG7+	N20238	CG8+	W20312	EG7+	N21036	CG8+	W21120
CG8+	W20162	CG8+	W20238	EG7+	N20313	EG7+	N21037B	CG8+	W21120A
EG7+	N20163	CG8+	W20240	EG7+	N20314	EG7+	N21037C	CG8+	W21120
CG8+	W20163	CG8+	W20240A	EG7+	N20315	EG7+	N21038	EG7+	N21121
EG7+	N20164	EG7+	N20241	CG8+	W20316	CG8+	W21038	EG7+	N21121A
EG7+	N20166A	EG7+	N20241A	EG7+	N20317	EG7+	N21039	CG8+	W21121
CG8+	W20167	CG8+	W20242	CG8+	W20317	EG7+	N21040	EG7+	N21122
CG8+	W20167A	EG7+	N20243	EG7+	N20318	CG8+	W21041	CG8+	W21122
EG7+	W20168	EG7+	N20244	CG8+	W20318	EG7+	N21042A	EG7+	N21123
EG7+	N20170	CG8+	W20244	CG8+	W20319	CG8+	W21043	EG7+	N21124
EG7+	L20175	EG7+	N20245	CG8+	W20319A	CG8+	W21043A	CG8+	W21124
EG7+	N20175	CG8+	W20245	EG7+	N20320	EG7+	N21044	CG8+	W21126A
CG8+	W20176	EG7+	N20246	CG8+	W20321	CG8+	W21044	EG7+	N21127
CG8+	W20176A	CG8+	W20246	EG7+	N20323	EG7+	N21045	CG8+	W21127
CG8+	W20178	EG7+	N20247A	CG8+	W20323	EG7+	N21046	CG8+	W21127A
EG7+	L20179	EG7+	N20251A	EG7+	N20324	CG8+	W21046	EG7+	N21128
CG8+	W20179	EG7+	N20252	CG8+	W20324	CG8+	W21046A	CG8+	W21128
EG7+	W20179A	CG8+	W20253	EG7+	N20325	EG7+	L21047	CG8+	W21129
EG7+	W20179B	EG7+	N20254	CG8+	W20325	CG8+	W21047	CG8+	W21131
EG7+	W20180	EG7+	N20255	CG8+	W20325A	EG7+	N21050	EG7+	N21132
CG8+	W20181	CG8+	W20255	EG7+	N20327	CG8+	W21050	CG8+	W21132
CG8+	W20181A	EG7+	N20256	CG8+	W20327	EG7+	L21051A	CG8+	W21133
CG8+	W20182	CG8+	W20256	EG7+	N20329	EG7+	N21051	EG7+	N21134
CG8+	W20182A	CG8+	L20257	EG7+	N20330	CG8+	W21051	CG8+	W21134
EG7+	L20183	EG7+	N20257	EG7+	N20331	CG8+	W21052	CG8+	W21134A
CG8+	L20183A	CG8+	W20257	CG8+	W20331	EG7+	W21053	<b>CG8+</b>	<b>W21195A</b>
CG8+	W20183	EG7+	N20258	CG8+	W20332	EG7+	W21054	<b>EG7+</b>	<b>N21197</b>
CG8+	W20184	CG8+	W20258	EG7+	N20333	EG7+	N21055	<b>CG8+</b>	<b>W21198</b>
CG8+	W20184A	CG8+	L20259	EG7+	N20334	EG7+	N21055A	<b>CG8+</b>	<b>W21198A</b>
CG8+	W20187	CG8+	W20259	EG7+	N20335	CG8+	W21055		
EG7+	N20188	CG8+	W20260	EG7+	N20226	CG8+	W21055A		

## APOC2020-007B

i-STAT ist ein eingetragenes Warenzeichen von Abbott.

**KUNDEN-ANTWORTFORMULAR**

**Abbott Point of Care  
Produktmaßnahmen**

**APOC2020-007B**

**Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es** innerhalb von **zehn (10)** Werktagen per Fax **(xxxxxx)** oder **E-Mail (xxxxx)** an Inmar zurück.

Mit der Rücksendung dieses Formulars bestätigen Sie, dass Sie die aktualisierten Empfehlungen erhalten und verstanden und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen haben. Weitere Informationen enthält das beigefügte Schreiben. Wir bitten um Ihre rechtzeitige Antwort auf diese Mitteilung.

Name des Kunden \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Stadt \_\_\_\_\_ Bundesland \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_

Name der Kontaktperson (in Druckbuchstaben) \_\_\_\_\_ Telefonnr. \_\_\_\_\_

Unterschrift der Kontaktperson \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Bestellnummer</b>
<b>i-STAT CG8+ Kartuschen</b>	<b>03P88-25</b>
<b>i-STAT EG7+ Kartuschen</b>	<b>03P76-25</b>

Bei Fragen zu diesem Formular wenden Sie sich bitte an xxx unter xxx.

**Faxen Sie dieses Formular bitte an: xxxx oder xxxx**