

Dicembre 2020

COMUNICAZIONE URGENTE SUL DISPOSITIVO MEDICO

Nome prodotto	Numero di listino	Nome prodotto	Numero di listino
i-STAT CG8+ cartridges	03P88-25	i-STAT EG7+cartridges	03P76-25

Gentile Cliente,

La presente comunicazione contiene informazioni importanti relative alle cartucce i-STAT® CG8+ e EG7+ indicate sopra. Se utilizza queste cartucce, la Sua struttura potrebbe essere interessata e potrebbero essere necessarie ulteriori revisioni e azioni.

Nota: le informazioni contenute in questa comunicazione sono specifiche per numero di lotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La cartuccia i-STAT CG8+ contiene otto sensori di misurazione (sodio, potassio, calcio ionizzato, pH, pCO₂, pO₂, glucosio ed ematocrito) e la cartuccia i-STAT EG7+ contiene sette sensori di misurazione (sodio, potassio, calcio ionizzato, pH, pCO₂, pO₂ ed ematocrito).

Il sensore per il calcio ionizzato, quale parte dell'i-STAT System, è previsto per la quantificazione *in vitro* del calcio ionizzato nel sangue intero arterioso, venoso o capillare.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA

I foglietti illustrativi delle cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ riportano che queste cartucce possono essere conservate per 2 mesi a temperatura ambiente (tra 18 e 30°C). Abbott verifica regolarmente la prestazione delle cartucce i-STAT, compresa la stabilità analitica delle cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ a vari intervalli di tempo dopo la conservazione in frigorifero e a 30°C.

Attraverso questo processo analitico interno successivo alla conservazione a 30°C per 14 giorni, Abbott Point of Care ha osservato che circa il 5,2% delle cartucce mostra risultati più alti del previsto per il calcio ionizzato. Abbott Point of Care ha osservato che il calcio ionizzato su **alcune** cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ può **presentare risultati più alti del previsto**, se le cartucce vengono conservate a temperatura ambiente (tra 18 e 30°C) per periodi superiori a:

- 3 giorni per i numeri di lotto da *20100 a *20339
- 7 giorni per i numeri di lotto da *20340 e superiori

L'asterisco * corrisponde alla lettera del lotto A, K, L, M, N, W o Y.

Abbott Point of Care **non** ha osservato risultati più alti del previsto per il test del calcio ionizzato quando le cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ vengono tolte dal frigorifero e lasciate a temperatura ambiente prima dell'uso entro il numero di giorni sopra indicato.

Abbott Point of Care non ha osservato questo problema con nessun altro test dell'i-STAT CG8+ o EG7+ che non sia quello del calcio ionizzato.

Abbott Point of Care sta informando tutti i clienti potenzialmente interessati. Si consiglia ai medici di tenere in considerazione i segnali, i sintomi, l'anamnesi e i risultati di altri test diagnostici del paziente quando si interpretano i risultati del calcio ionizzato con queste cartucce. Se i risultati non corrispondono al quadro clinico del paziente, il campione del paziente deve essere analizzato nuovamente utilizzando un'altra cartuccia i-STAT o un metodo alternativo. Il trattamento del calcio ionizzato falsamente alto può causare danni facendo precipitare l'ipocalcemia. Abbott Point of Care ha accertato che la probabilità complessiva di un danno associato a questo problema è rara. I sintomi più comuni di ipocalcemia includono parestesia, spasmi muscolari, crampi, tetania, intorpidimento circumorale e convulsioni. Anche se improbabile, nei casi più estremi, l'ipocalcemia potrebbe potenzialmente provocare una morte cardiaca improvvisa. Abbott Point of Care **non** ha ricevuto alcuna segnalazione di danni ai pazienti associati a questo problema.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Dai nostri archivi risulta che il Suo laboratorio fa uso della cartuccia i-STAT CG8+ o EG7+. Mentre Abbott Point of Care prosegue con le indagini, se è necessario analizzare il calcio ionizzato, **si raccomanda di utilizzare le cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ solo:**

- entro 3 giorni dopo averli rimossi dalla conservazione in frigorifero per i lotti con numeri compresi tra *20100 e *20339
- entro 7 giorni dopo averli rimossi dalla conservazione in frigorifero per i lotti con numeri compresi da *20340 e superiori

L'asterisco * corrisponde alla lettera del lotto A, K, L, M, N, W e Y

APOC2020-007

i-STAT è un marchio commerciale registrato di Abbott Group of Companies in diverse giurisdizioni.



Se la Sua struttura non è in grado di eseguire l'azione raccomandata sopra descritta, Abbott Point of Care raccomanda che la Sua struttura disattivi e non riporti i risultati del test del calcio ionizzato delle cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ e utilizzi una cartuccia i-STAT alternativa o un metodo alternativo per l'analisi del calcio ionizzato. Fare riferimento alle seguenti informazioni aggiuntive relative alla disattivazione del test del calcio ionizzato per queste cartucce.

Confermare la ricezione e la comprensione della presente comunicazione compilando il modulo di risposta allegato alla presente comunicazione.

Qualora le cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ siano state spedite ad altre strutture, Le chiediamo di informarle inviando loro una copia della presente comunicazione.

In allegato è disponibile un elenco dei lotti delle cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ potenzialmente interessati che sono stati distribuiti fino alla data della presente comunicazione. Continuare a seguire le azioni raccomandate nella presente comunicazione per tutti i nuovi lotti i-STAT CG8+ e EG7+ ricevuti fino a quando la Sua struttura non riceverà una comunicazione Abbott Point of Care aggiornata.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Il personale delle vendite e dell'assistenza Abbott Point of Care è disponibile per esaminare soluzioni provvisorie relative alle possibili problematiche legate alla presente comunicazione. Per eventuali chiarimenti relativi alla presente informativa, si prega di contattare il Servizio Clienti Abbott Point of Care locale. Inoltre potrà rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Abbott Point of Care locale all'indirizzo di posta elettronica additaly.quality@abbott.com per eventuali domande o dubbi relativi alla prestazione del test del calcio ionizzato delle cartucce i-STAT CG8+ e EG7+.

Se la Sua struttura decidesse di disattivare il test del calcio ionizzato, in fondo alla presente comunicazione troverà indicate le risorse necessarie. Se il test del calcio ionizzato è gestito dall'interfaccia LIS (Laboratory Information System), la disattivazione dell'analita potrebbe richiedere una modifica all'interfaccia. Rivolgersi al fornitore dell'interfaccia.

Abbott Point of Care intende affrontare prontamente e con il massimo impegno l'attuale situazione, assistendoLa durante l'intero processo. **Abbott Point of Care fornirà tempestivamente le successive comunicazioni quando saranno disponibili dati a supporto di una conservazione più lunga a temperatura ambiente e dopo il completamento dell'indagine.**



Risorse per la personalizzazione dello strumento i-STAT Alinity:

- Andare sul sito <https://www.pointofcare.abbott/int/en/home> e passare a Support > i-STAT Alinity Resources Login > Operator Documentation > i-STAT Alinity System Operations Manual ((lingua: inglese) :
 - **Per i clienti che usano AlinIQ CWi** fare riferimento all'i-STAT Alinity System Operations Manual, sezione 3.1 - AlinIQ CWi - Customization Workspace for i-STAT, *Analyte Settings Category, Enable/Disable Analyte* per le informazioni relative alla personalizzazione di questa opzione.

NOTA: per personalizzare questa funzione è necessario l'AlinIQ Cwi.

Risorse per la personalizzazione dell'analizzatore i-STAT 1:

- Andare sul sito <https://www.pointofcare.abbott/int/en/home> e passare a Support > i-STAT 1 Resources Login > Administrator Documentation > Technical Bulletins (lingua: inglese Regno Unito) > Data Management User Documentation e selezionare i-STAT DE Documentation:
 - fare riferimento alla i-STAT DE User Guide v2.10 Art:754472, sezione 3.15 Customizing Analyte Enable Options
- Andare sul sito <https://www.pointofcare.abbott/int/en/home> e passare a Support > i-STAT 1 Resources Login > User Documentation > i-STAT 1 System Manuals
 - **Per i clienti i-STAT senza i-STAT/DE o CDS** fare riferimento all'i-STAT System Manual, i-STAT 1 Analyzer 2 Art:714364, *Changing the Profile* per le indicazioni relative al passaggio al menu Results, quindi al menu Units e Ranges per la modifica delle impostazioni.

Personalizzazione delle opzioni di attivazione dell'analita utilizzando la tastiera dell'analizzatore i-STAT 1


Gli analizzatori nuovi o sostitutivi avranno i set delle unità standard installati e tutti gli analiti attivati. Per disattivare o impostare globalmente un'unità di misurazione differente di un particolare analita, accedere a *Change Customization > Units and Ranges*. Eseguire i seguenti passaggi:

NOTA: questa impostazione verrà applicata globalmente a tutti i tipi di cartucce utilizzati. Per disattivare gli analiti in base al pannello della cartuccia i-STAT gli utenti devono utilizzare l'i-STAT/DE o il CDS.

1. Premere  per accendere l'analizzatore.
2. Press  per passare al menu Administration
3. Press  Customization
4. Press  Change
(quando è attivato inserire la password)
5. Press  Results
6. Press  Units and Ranges
7. Press  Units and Ranges
8. Premere il tasto numerico corrispondente all'analita che si desidera disattivare o di cui si vuole modificare l'unità di misura.

Premere il tasto freccia  o  per muoversi tra le pagine e visualizzare gli analiti.
9. Premere 1- (Disabled), per disattivare l'analita
OPPURE
Premere 2- (Enabled) per cambiare l'unità di misura.
10. Quando si cambiano le unità di misura, premere il tasto numerico corrispondente alle unità di misura in cui si vogliono riportare gli analiti.
11. Una volta che tutti gli analiti sono impostati come si desidera, premere due volte per salvare ritornare al menu principale.

NOTA: quando un analita è disattivato, ciò verrà segnalato sulla schermata del menu Units and Ranges. Per l'analita non verranno visualizzate le unità di misura e i range.

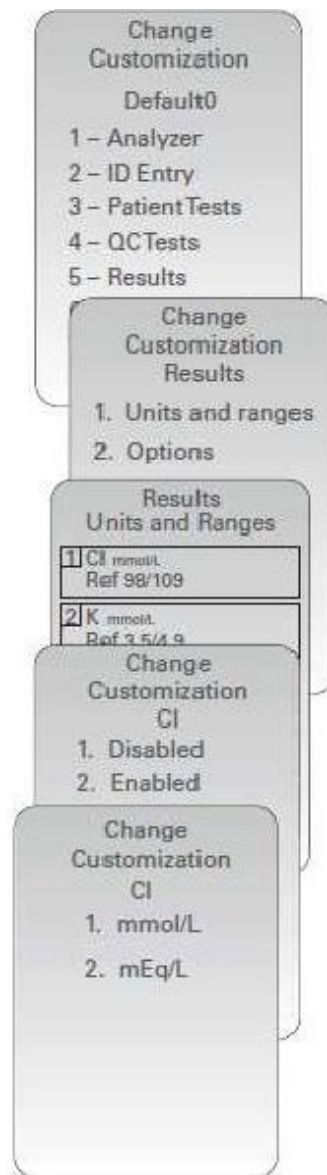

**Abbott****i-STAT CG8+ and EG7+ cartridge lots**

List of the potentially impacted i-STAT CG8+ and EG7+ cartridge lots that have been distributed as of 22 December 2020. Please continue to follow the recommended actions in this communication for all newly received i-STAT CG8+ and EG7+ lots until your facility receives an updated communication from Abbott Point of Care.

Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number
EG7+	L20106A	EG7+	W20149	EG7+	N20200	EG7+	N20244	EG7+	N20295
CG8+	W20106	EG7+	N20150	EG7+	N20200A	CG8+	W20244	EG7+	N20295A
CG8+	W20108	EG7+	N20150A	CG8+	W20200	EG7+	N20245	EG7+	N20295B
EG7+	L20107	EG7+	W20152	EG7+	N20201	CG8+	W20245	CG8+	W20295
EG7+	L20108A	CG8+	W20152A	EG7+	N20201A	EG7+	N20246	CG8+	W20295A
CG8+	W20110	CG8+	W20153	EG7+	N20202	CG8+	W20246	EG7+	N20296
EG7+	L20110A	CG8+	W20154	EG7+	N20203	EG7+	N20247A	EG7+	N20296A
CG8+	W20111	EG7+	N20155	EG7+	N20204	EG7+	N20251A	EG7+	N20297
CG8+	W20112A	CG8+	W20155	EG7+	N20204A	EG7+	N20252	EG7+	N20297A
CG8+	W20113	CG8+	W20156	CG8+	W20204	CG8+	W20253	EG7+	N20298
EG7+	N20113	EG7+	N20158	CG8+	W20205	EG7+	N20254	EG7+	N20298A
EG7+	N20114	EG7+	N20159	CG8+	W20205A	EG7+	N20255	EG7+	N20300
CG8+	W20113A	CG8+	W20159	EG7+	N20206A	CG8+	W20255	CG8+	W20300
CG8+	W20114	EG7+	N20160	EG7+	N20206B	EG7+	N20256	EG7+	N20301
EG7+	N20115	CG8+	W20160	EG7+	N20207	CG8+	W20256	CG8+	W20301
CG8+	W20116	CG8+	W20161	EG7+	N20207A	CG8+	L20257	EG7+	N20302
EG7+	N20117	EG7+	W20161A	EG7+	N20208	EG7+	N20257	EG7+	N20302A
CG8+	W20117	EG7+	N20162	EG7+	N20208A	CG8+	W20257	EG7+	N20303
CG8+	W20117A	CG8+	W20162	EG7+	N20209	EG7+	N20258	CG8+	W20303
CG8+	W20118	EG7+	N20163	EG7+	N20209A	CG8+	W20258	EG7+	N20304
EG7+	N20119	CG8+	W20163	CG8+	W20209	CG8+	L20259	CG8+	W20304
CG8+	W20119	EG7+	N20164	CG8+	W20209A	CG8+	W20259	EG7+	N20305
EG7+	N20120	EG7+	N20166A	EG7+	N20210	CG8+	W20260	EG7+	N20305A
CG8+	W20120	CG8+	W20167	CG8+	W20210	CG8+	W20261	CG8+	W20305
EG7+	N20121	CG8+	W20167A	CG8+	W20211	EG7+	N20262	CG8+	W20305A
EG7+	N20121A	EG7+	W20168	EG7+	N20212	CG8+	W20262	CG8+	W20306
CG8+	W20122	EG7+	N20170	CG8+	W20212	CG8+	W20263	EG7+	N20307
EG7+	N20124	EG7+	L20175	EG7+	N20213	CG8+	W20263A	EG7+	N20308
CG8+	W20124	EG7+	N20175	EG7+	N20214	CG8+	W20265	EG7+	W20308
CG8+	W20126	CG8+	W20176	EG7+	N20214A	CG8+	W20266	EG7+	N20309
CG8+	W20126A	CG8+	W20176A	CG8+	W20214	CG8+	W20268	EG7+	W20309
EG7+	N20127	CG8+	W20178	CG8+	W20215	EG7+	N20269	EG7+	W20309A
CG8+	W20127	EG7+	L20179	CG8+	W20216	CG8+	L20270	EG7+	N20310
EG7+	N20128	CG8+	W20179	EG7+	N20220	CG8+	L20270A	CG8+	W20310A
EG7+	L20129	EG7+	W20179A	EG7+	N20220A	CG8+	W20270	EG7+	N20311
CG8+	W20129	EG7+	W20179B	EG7+	N20222	CG8+	W20271	CG8+	W20311
EG7+	N20130	EG7+	W20180	EG7+	N20223	CG8+	W20272	EG7+	N20312

APOC2020-007

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions.

Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number	Cartridge	Lot Number
CG8+	W20131	CG8+	W20181	CG8+	W20223	CG8+	W20272A	CG8+	W20312A
EG7+	N20132	CG8+	W20181A	CG8+	W20223A	EG7+	N20273	EG7+	N20313
CG8+	W20132	CG8+	W20182	EG7+	N20224	CG8+	W20273	EG7+	N20314
EG7+	N20133	CG8+	W20182A	EG7+	N20224A	EG7+	N20274	EG7+	N20315
CG8+	W20133	EG7+	L20183	CG8+	W20224	CG8+	W20275	CG8+	W20316
CG8+	W20134	CG8+	L20183A	EG7+	N20225	EG7+	N20276	EG7+	N20317
CG8+	W20135	CG8+	W20183	CG8+	W20226	CG8+	W20276	CG8+	W20317
EG7+	N20136	CG8+	W20184	EG7+	N20227	EG7+	N20277	EG7+	N20318
CG8+	W20136	CG8+	W20184A	CG8+	W20227	CG8+	W20277	CG8+	W20318
EG7+	N20137	CG8+	W20187	EG7+	N20228	CG8+	W20279	CG8+	W20319
CG8+	W20137	EG7+	N20188	EG7+	N20228A	CG8+	W20279A	CG8+	W20319A
CG8+	W20137A	CG8+	W20188	EG7+	N20229	CG8+	W20280	EG7+	N20320
CG8+	W20138	CG8+	W20188A	CG8+	W20229	CG8+	W20280A	CG8+	W20321
EG7+	N20139	EG7+	L20189	CG8+	W20229A	EG7+	N20281A	EG7+	N20323
CG8+	W20139	CG8+	W20191	EG7+	N20230	EG7+	N20282	EG7+	N20324
EG7+	N20140	CG8+	W20191A	EG7+	N20230A	CG8+	W20282	CG8+	W20324
CG8+	W20140	CG8+	W20191B	CG8+	W20230	EG7+	N20283	EG7+	N20325
CG8+	W20140A	CG8+	W20191C	CG8+	W20231	CG8+	W20284	CG8+	W20325
CG8+	W20141	CG8+	W20192	CG8+	W20231A	CG8+	W20285	CG8+	W20325A
CG8+	W20142A	CG8+	W20192A	CG8+	W20231B	EG7+	N20286	EG7+	N20327
EG7+	N20143A	EG7+	N20193	EG7+	N20233	CG8+	W20287	CG8+	W20327
CG8+	W20143	CG8+	W20193	CG8+	W20233	EG7+	N20288	EG7+	N20329
CG8+	W20143A	CG8+	W20194	CG8+	W20233A	EG7+	N20288A	EG7+	N20330
CG8+	W20144	CG8+	W20194A	CG8+	W20234	EG7+	N20289	EG7+	N20331
EG7+	N20145B	EG7+	W20194B	EG7+	N20236	EG7+	N20290	CG8+	W20331
CG8+	W20145	EG7+	N20195	CG8+	W20236	CG8+	W20290	CG8+	W20332
CG8+	W20145A	EG7+	N20196	EG7+	N20237	EG7+	N20291	EG7+	N20333
EG7+	L20146	EG7+	N20196A	CG8+	W20237	EG7+	N20291A	EG7+	N20334
EG7+	N20146	EG7+	N20197	EG7+	N20238	CG8+	W20291	EG7+	N20335
CG8+	W20146	CG8+	W20197	CG8+	W20238	CG8+	W20292	CG8+	W20336
EG7+	N20147	EG7+	N20198	CG8+	W20240	CG8+	W20293	CG8+	W20337
CG8+	W20147	EG7+	N20198A	CG8+	W20240A	EG7+	N20294	EG7+	N20338
EG7+	N20148	CG8+	W20198	EG7+	N20241	EG7+	N20294A	CG8+	L20339
CG8+	W20148	CG8+	W20198A	EG7+	N20241A	CG8+	W20294	EG7+	N20339
EG7+	N20149	EG7+	N20199	CG8+	W20242	CG8+	W20294A	CG8+	W20339
EG7+	N20149A	CG8+	W20199	EG7+	N20243	CG8+	W20294B	CG8+	W20339A

APOC2020-007

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions.

**Abbott****Lotti delle cartucce i-STAT CG8+ e EG7+**

Elenco dei lotti delle cartucce i-STAT CG8+ e EG7+ potenzialmente interessati che sono stati distribuiti fino al 22 dicembre 2020. Continuare a seguire le azioni raccomandate nella presente comunicazione per tutti i nuovi lotti i-STAT CG8+ e EG7+ ricevuti fino a quando la Sua struttura non riceverà una comunicazione Abbott Point of Care aggiornata.

Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto
EG7+	L20106A	EG7+	W20149	EG7+	N20200	EG7+	N20244	EG7+	N20295
CG8+	W20106	EG7+	N20150	EG7+	N20200A	CG8+	W20244	EG7+	N20295A
CG8+	W20108	EG7+	N20150A	CG8+	W20200	EG7+	N20245	EG7+	N20295B
EG7+	L20107	EG7+	W20152	EG7+	N20201	CG8+	W20245	CG8+	W20295
EG7+	L20108A	CG8+	W20152A	EG7+	N20201A	EG7+	N20246	CG8+	W20295A
CG8+	W20110	CG8+	W20153	EG7+	N20202	CG8+	W20246	EG7+	N20296
EG7+	L20110A	CG8+	W20154	EG7+	N20203	EG7+	N20247A	EG7+	N20296A
CG8+	W20111	EG7+	N20155	EG7+	N20204	EG7+	N20251A	EG7+	N20297
CG8+	W20112A	CG8+	W20155	EG7+	N20204A	EG7+	N20252	EG7+	N20297A
CG8+	W20113	CG8+	W20156	CG8+	W20204	CG8+	W20253	EG7+	N20298
EG7+	N20113	EG7+	N20158	CG8+	W20205	EG7+	N20254	EG7+	N20298A
EG7+	N20114	EG7+	N20159	CG8+	W20205A	EG7+	N20255	EG7+	N20300
CG8+	W20113A	CG8+	W20159	EG7+	N20206A	CG8+	W20255	CG8+	W20300
CG8+	W20114	EG7+	N20160	EG7+	N20206B	EG7+	N20256	EG7+	N20301
EG7+	N20115	CG8+	W20160	EG7+	N20207	CG8+	W20256	CG8+	W20301
CG8+	W20116	CG8+	W20161	EG7+	N20207A	CG8+	L20257	EG7+	N20302
EG7+	N20117	EG7+	W20161A	EG7+	N20208	EG7+	N20257	EG7+	N20302A
CG8+	W20117	EG7+	N20162	EG7+	N20208A	CG8+	W20257	EG7+	N20303
CG8+	W20117A	CG8+	W20162	EG7+	N20209	EG7+	N20258	CG8+	W20303
CG8+	W20118	EG7+	N20163	EG7+	N20209A	CG8+	W20258	EG7+	N20304
EG7+	N20119	CG8+	W20163	CG8+	W20209	CG8+	L20259	CG8+	W20304
CG8+	W20119	EG7+	N20164	CG8+	W20209A	CG8+	W20259	EG7+	N20305
EG7+	N20120	EG7+	N20166A	EG7+	N20210	CG8+	W20260	EG7+	N20305A
CG8+	W20120	CG8+	W20167	CG8+	W20210	CG8+	W20261	CG8+	W20305
EG7+	N20121	CG8+	W20167A	CG8+	W20211	EG7+	N20262	CG8+	W20305A
EG7+	N20121A	EG7+	W20168	EG7+	N20212	CG8+	W20262	CG8+	W20306
CG8+	W20122	EG7+	N20170	CG8+	W20212	CG8+	W20263	EG7+	N20307
EG7+	N20124	EG7+	L20175	EG7+	N20213	CG8+	W20263A	EG7+	N20308
CG8+	W20124	EG7+	N20175	EG7+	N20214	CG8+	W20265	EG7+	W20308
CG8+	W20126	CG8+	W20176	EG7+	N20214A	CG8+	W20266	EG7+	N20309
CG8+	W20126A	CG8+	W20176A	CG8+	W20214	CG8+	W20268	EG7+	W20309
EG7+	N20127	CG8+	W20178	CG8+	W20215	EG7+	N20269	EG7+	W20309A
CG8+	W20127	EG7+	L20179	CG8+	W20216	CG8+	L20270	EG7+	N20310
EG7+	N20128	CG8+	W20179	EG7+	N20220	CG8+	L20270A	CG8+	W20310A
EG7+	L20129	EG7+	W20179A	EG7+	N20220A	CG8+	W20270	EG7+	N20311
CG8+	W20129	EG7+	W20179B	EG7+	N20222	CG8+	W20271	CG8+	W20311

APOC2020-007

i-STAT è un marchio commerciale registrato di Abbott Group of Companies in diverse giurisdizioni.

Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto	Cartuccia	Numero di lotto
EG7+	N20130	EG7+	W20180	EG7+	N20223	CG8+	W20272	EG7+	N20312
CG8+	W20131	CG8+	W20181	CG8+	W20223	CG8+	W20272A	CG8+	W20312A
EG7+	N20132	CG8+	W20181A	CG8+	W20223A	EG7+	N20273	EG7+	N20313
CG8+	W20132	CG8+	W20182	EG7+	N20224	CG8+	W20273	EG7+	N20314
EG7+	N20133	CG8+	W20182A	EG7+	N20224A	EG7+	N20274	EG7+	N20315
CG8+	W20133	EG7+	L20183	CG8+	W20224	CG8+	W20275	CG8+	W20316
CG8+	W20134	CG8+	L20183A	EG7+	N20225	EG7+	N20276	EG7+	N20317
CG8+	W20135	CG8+	W20183	CG8+	W20226	CG8+	W20276	CG8+	W20317
EG7+	N20136	CG8+	W20184	EG7+	N20227	EG7+	N20277	EG7+	N20318
CG8+	W20136	CG8+	W20184A	CG8+	W20227	CG8+	W20277	CG8+	W20318
EG7+	N20137	CG8+	W20187	EG7+	N20228	CG8+	W20279	CG8+	W20319
CG8+	W20137	EG7+	N20188	EG7+	N20228A	CG8+	W20279A	CG8+	W20319A
CG8+	W20137A	CG8+	W20188	EG7+	N20229	CG8+	W20280	EG7+	N20320
CG8+	W20138	CG8+	W20188A	CG8+	W20229	CG8+	W20280A	CG8+	W20321
EG7+	N20139	EG7+	L20189	CG8+	W20229A	EG7+	N20281A	EG7+	N20323
CG8+	W20139	CG8+	W20191	EG7+	N20230	EG7+	N20282	EG7+	N20324
EG7+	N20140	CG8+	W20191A	EG7+	N20230A	CG8+	W20282	CG8+	W20324
CG8+	W20140	CG8+	W20191B	CG8+	W20230	EG7+	N20283	EG7+	N20325
CG8+	W20140A	CG8+	W20191C	CG8+	W20231	CG8+	W20284	CG8+	W20325
CG8+	W20141	CG8+	W20192	CG8+	W20231A	CG8+	W20285	CG8+	W20325A
CG8+	W20142A	CG8+	W20192A	CG8+	W20231B	EG7+	N20286	EG7+	N20327
EG7+	N20143A	EG7+	N20193	EG7+	N20233	CG8+	W20287	CG8+	W20327
CG8+	W20143	CG8+	W20193	CG8+	W20233	EG7+	N20288	EG7+	N20329
CG8+	W20143A	CG8+	W20194	CG8+	W20233A	EG7+	N20288A	EG7+	N20330
CG8+	W20144	CG8+	W20194A	CG8+	W20234	EG7+	N20289	EG7+	N20331
EG7+	N20145B	EG7+	W20194B	EG7+	N20236	EG7+	N20290	CG8+	W20331
CG8+	W20145	EG7+	N20195	CG8+	W20236	CG8+	W20290	CG8+	W20332
CG8+	W20145A	EG7+	N20196	EG7+	N20237	EG7+	N20291	EG7+	N20333
EG7+	L20146	EG7+	N20196A	CG8+	W20237	EG7+	N20291A	EG7+	N20334
EG7+	N20146	EG7+	N20197	EG7+	N20238	CG8+	W20291	EG7+	N20335
CG8+	W20146	CG8+	W20197	CG8+	W20238	CG8+	W20292	CG8+	W20336
EG7+	N20147	EG7+	N20198	CG8+	W20240	CG8+	W20293	CG8+	W20337
CG8+	W20147	EG7+	N20198A	CG8+	W20240A	EG7+	N20294	EG7+	N20338
EG7+	N20148	CG8+	W20198	EG7+	N20241	EG7+	N20294A	CG8+	L20339
CG8+	W20148	CG8+	W20198A	EG7+	N20241A	CG8+	W20294	EG7+	N20339
EG7+	N20149	EG7+	N20199	CG8+	W20242	CG8+	W20294A	CG8+	W20339
EG7+	N20149A	CG8+	W20199	EG7+	N20243	CG8+	W20294B	CG8+	W20339A

APOC2020-007

i-STAT è un marchio commerciale registrato di Abbott Group of Companies in diverse giurisdizioni.

MODULO DI RISPOSTA

**Abbott Point of Care
Product Action Program**

APOC2020-007

Restituire il presente modulo compilato entro **dieci (10) giorni lavorativi via fax (**X-XXX-XXX-XXXX**) o per e-mail (**XXXXXX@XXXX.com**).**

La restituzione del presente modulo confermerà che sono state lette e capite le istruzioni e che sono state adottate le dovute misure. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla comunicazione acclusa. Si richiede una risposta tempestiva a questa notifica.

Nome del cliente _____

Indirizzo _____

Città _____ Paese _____ CAP _____

Nome (in stampatello) _____ N. di telefono _____

Firma _____ Data _____

Descrizione del prodotto	Numero di listino
Cartucce i-STAT CG8+	03P88-25
Cartucce i-STAT EG7+	03P76-25

Per qualsiasi domanda relativa a questo modulo contattare XXXX al numero 1-XXX-XXX-XXX.

Inviare questo modulo via fax a: 1-XXX-XXX-XXXX oppure per email a: XXXXX@XXXXX.com