

6. Juli 2021

DRINGEND: SICHERHEITSHINWEIS – PI-21-4115

**ECOFLEX Körbchen, HIGHFLEX Körbchen und
GASTROTOP Gallen-Endoprothesen Sets**

REF- und Lot-Nummern: Siehe Anhang 1

Art der Maßnahme: Produktentfernung

**Z. Hd.: Klinisches Personal, Risikomanager, biomedizinisches Personal,
Beauftragte für Medizinproduktesicherheit**

Dieses Schreiben enthält wichtige Informationen, die Ihre **umgehende** Aufmerksamkeit erfordern.

Sehr geehrter Kunde,

Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Becton Dickinson and Company (BD), führt eine Sicherheitskorrekturmaßnahme durch, um bestimmte Chargen der Produkte **ECOFLEX Körbchen**, **HIGHFLEX Körbchen** und **GASTROTOP Gallen-Endoprothesen Sets** von Markt zu nehmen. Aus unseren Vertriebsunterlagen geht hervor, dass Ihre Organisation möglicherweise betroffene Produkte erhalten hat.

Beschreibung des Problems

Die betroffenen **ECOFLEX Körbchen**, **HIGHFLEX Körbchen** und **GASTROTOP Gallen-Endoprothesen Sets** werden zurückgenommen, da BD durch Tests auf einen stecknadelkopfgroßen Defekt an der Verpackung aufmerksam geworden ist, der möglicherweise die Sterilität des Produkts beeinträchtigt. BD schätzt basierend auf Produkttests, dass etwa 50 % der Produkte betroffen sein könnten. Bislang gab es keine Kundenmeldungen im Zusammenhang mit diesem Problem. Der Defekt ist auf den folgenden Bildern veranschaulicht:



Diese Produktentfernung beschränkt sich auf die Katalog- und/Lot-Nummern, die in Anhang 1 aufgeführt sind. Es sind keine anderen Katalog- und Lot-Nummern betroffen. Anhang 2 zeigt repräsentative Produktetiketten.

Klinische Auswirkungen

Dieser Defekt kann zu gesundheitlichen Folgen führen, einschließlich einer mehr oder weniger starken Infektion. Das Behandlungsmanagement des Patienten, darunter die Verabreichung einer antimikrobiellen Therapie und jegliche Nachsorge, liegen im Ermessen des behandelnden Arztes. BD sind keine Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Produktproblem bekannt.

Empfehlungen zu den vom Anwender vorzunehmenden Maßnahmen:

1. Überprüfen Sie Ihren Bestand, lokalisieren Sie alle Einheiten der betroffenen ECOFLEX Körbchen, HIGHFLEX Körbchen und GASTROTOP Gallen-Endoprothesen Sets, die in Anhang 1 aufgelistet sind, und vernichten Sie diese.
2. Sollten Sie das Produkt weitervertrieben haben, ermitteln Sie bitte die jeweiligen Einrichtungen, benachrichtigen Sie diese umgehend über diese Produktentfernung und bitten Sie sie, die betroffenen Produkte zu vernichten.
3. Füllen Sie das Kundenantwortformular auf Seite 3 aus und geben Sie folgendes an:
 - die vernichtete Menge **ODER**
 - dass sich im Bestand Ihrer Einrichtung keine der betroffenen Produkte mehr befinden.
4. Senden Sie das ausgefüllte Kundenantwortformular so **schnell wie möglich an BDRRegAffairs_GSA@bd.com, spätestens jedoch bis zum 6. August 2021**

Ansprechpartner

Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren BD Vertreter vor Ort.

Wir bestätigen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden von dieser Maßnahme in Kenntnis gesetzt wurden.

BD setzt sich für den Fortschritt in der Welt der Gesundheit ein. Unsere Hauptziele sind die Sicherheit von Patienten und Anwendern sowie die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch diese Situation möglicherweise entstanden sind, und danken Ihnen im Voraus dafür, dass Sie BD dabei helfen, diese Angelegenheit so schnell und effektiv wie möglich zu klären.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Darrock'.

Lorna Darrock
Sr. Manager, Post Market Quality
EMEA

Kundenantwortformular – PI-21-4115

ECOFLEX / HIGHFLEX Körbchen und GASTROTOP Gallen- Endoprothesen Sets REF und Lot-Nummern: Siehe Anhang 1

Bitte lesen Sie diesen Anhang zusammen mit dem Sicherheitshinweis PI-21-4115 durch und senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Kundenantwortformular umgehend **spätestens jedoch bis zum 6. August 2021** an **BDRRegAffairs_GSA@bd.com**.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass diese Mitteilung gelesen und verstanden wurde und dass alle empfohlenen Maßnahmen wie gefordert umgesetzt wurden.

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an.

Es befinden sich keine der betroffenen Produkte, die in Anhang 1 aufgeführt sind, in unserem Besitz.

ODER

Wir haben Einheiten der betroffenen Produkte, in unserem Besitz, und bestätigen, dass die Produkte vernichtet wurden (*Bitte füllen Sie Anhang 1 mit der Anzahl der vernichteten Produkte aus und senden Sie ihn zusammen mit Ihrem Antwortformular zurück, damit ein Ersatzprodukt bereitgestellt werden kann*).

Name des Kunden/Unternehmens:	
Abteilung (falls zutreffend):	
Adresse:	
Postleitzahl:	Ort:
Ansprechperson:	
Berufsbezeichnung:	
Telefonnummer der Ansprechperson:	E-Mail-Adresse der Ansprechperson:
Unterschrift:	Datum:

Dieses Formular muss an BD zurückgesendet werden, bevor diese Maßnahme für Sie als abgeschlossen angesehen werden kann.

Anhang 1 – Betroffener Produktcode/Chargen-Nummern

GASTROTOP Gallen-Endoprothesen Sets

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
36220010	ANER3982	GT-SP 8/15	24-Apr-23	
36430010	ANEU4273	GT-DP 9/ 4	31-Jul-23	
	ANEV0629	GT-DP 9/ 4	07-Aug-23	
36430020	ANEU4270	GT-DP 9/ 7	31-Jul-23	
	ANEV0635	GT-DP 9/ 7	07-Aug-23	

ECOFLEX Körbchen

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
42285080	ANEU0615	EFK 4,0/20/30/ 90/5	03-Jul-23	
42245060	ANEQ3802	EFK 2,5/10/20/ 90/4/H	20-Mar-23	
42245070	ANEW3001	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
	ANEX4445	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	23-Oct-23	
	ANEX4446	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	23-Oct-23	
	ANEP4974	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEP4978	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEP4988	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEQ3803	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
	ANEQ3805	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
	ANEQ3807	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
	ANEQ3809	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
	ANER2601	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	17-Apr-23	
	ANER1609	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	10-Apr-23	
	ANER3991	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23	
	ANER2603	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	17-Apr-23	
	ANER2606	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	17-Apr-23	
ANER3992	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23		
ANER3994	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23		

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
	ANER3995	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23	
	ANES3926	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	29-May-23	
	ANEU3335	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Jul-23	
	ANEU4277	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	31-Jul-23	
	ANEV0639	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	07-Aug-23	
	ANEV2879	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	21-Aug-23	
	ANEV1908	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	14-Aug-23	

HIGHFLEX Körbchen

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
42240010	ANER4854	HFK 2,5F/10/20/ 65/3/H	30-Apr-23	
42240060	ANEP4989	HFK 2,5F/10/20/ 90/3/H	28-Feb-23	
42240070	ANES1983	HFK 2,5F/15/25/90/30/H	15-May-23	
42241060	ANEP2560	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	14-Feb-23	
	ANEP4972	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEP4976	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEP4980	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEP4983	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEP4987	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEQ0918	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	06-Mar-23	
42241070	ANEW1595	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	11-Sep-23	
	ANEW2999	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
	ANEW1598	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	11-Sep-23	
	ANEW2995	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
	ANEW2997	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
	ANEW1599	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	11-Sep-23	
	ANEX4442	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	23-Oct-23	
	ANEX5669	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	30-Oct-23	
	ANEX5672	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	30-Oct-23	
	ANEP2558	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	14-Feb-23	
	ANEP2561	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	14-Feb-23	
	ANEP4973	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
42241070	ANEP4977	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEP4981	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANES0838	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	08-May-23	
	ANES0840	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	08-May-23	
	ANES1981	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	15-May-23	
	ANES1987	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	15-May-23	
	ANES1986	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	15-May-23	
	ANES2818	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	20-May-23	
	ANES2822	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	20-May-23	
42241110	ANET3664	HFK 2,5F/10/20/120/4/H	26-Jun-23	
42241120	ANEP2562	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	14-Feb-23	
	ANEP4984	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	28-Feb-23	
	ANER4860	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	30-Apr-23	
	ANES2819	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	20-May-23	
	ANES2823	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	20-May-23	
	ANET0715	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	05-Jun-23	
42245010	ANEQ5143	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	27-Mar-23	
	ANER2604	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	17-Apr-23	
	ANES3924	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	29-May-23	
	ANES3925	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	29-May-23	
	ANET0718	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	05-Jun-23	
	ANET0719	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	05-Jun-23	
	ANET1656	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	12-Jun-23	
42251030	ANET2655	HFK 4,0F/20/30/ 65/4/H	19-Jun-23	
42251080	ANEP4990	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEQ3808	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	20-Mar-23	
	ANEQ3804	HFK 4,0F/20/30/90/4/H	20-Mar-23	
	ANET3663	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	26-Jun-23	
	ANEU0614	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	03-Jul-23	
42252030	ANEQ2454	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	13-Mar-23	
	ANER0633	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	03-Apr-23	
	ANER4855	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	30-Apr-23	
	ANEU0610	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	03-Jul-23	
	ANEU1366	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	10-Jul-23	

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
42252080	ANEV2880	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	21-Aug-23	
	ANEY1794	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	12-Nov-23	
	ANEP2563	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	14-Feb-23	
	ANEQ2459	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	13-Mar-23	
	ANER3998	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	24-Apr-23	
	ANER4858	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	30-Apr-23	
42263030	ANER0635	HFK 4,6F/20/30/ 65/6/H	03-Apr-23	
42270060	ANEW2996	HFK 2,5F/10/20/ 90/3	18-Sep-23	
	ANEX4440	HFK 2,5F/10/20/ 90/3	23-Oct-23	
	ANET3665	HFK 2,5F/10/20/ 90/3	26-Jun-23	
42270070	ANER4856	HFK 2,5F/15/25/ 90/3	30-Apr-23	
	ANET1650	HFK 2,5F/15/25/ 90/3	12-Jun-23	
	ANEU0611	HFK 2,5F/15/25/ 90/3	03-Jul-23	
42270110	ANEQ5147	HFK 2,5F/10/20/120/3	27-Mar-23	
	ANER2600	HFK 2,5F/10/20/120/3	17-Apr-23	
	ANER1613	HFK 2,5F/10/20/120/3	10-Apr-23	
42271010	ANEZ1838	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	11-Dec-23	
	ANEZ3173	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	17-Dec-23	
	ANEQ0914	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ0915	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ0925	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ0926	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ2452	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	13-Mar-23	
	ANEQ2458	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	13-Mar-23	
	ANES1979	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	15-May-23	
	ANES2820	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	20-May-23	
	ANEV2881	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	21-Aug-23	
42771020	ANEQ5275	HFK 2,5F/15/25/ 65/4	27-Mar-23	
	ANER0630	HFK 2,5F/15/25/ 65/4	03-Apr-23	
	ANER4851	HFK 2,5F/15/25/ 65/4	30-Apr-23	
42271060	ANEW0650	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	04-Sep-23	
	ANEV1906	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	14-Aug-23	
	ANEV3791	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	28-Aug-23	
	ANEW3000	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	18-Sep-23	

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
	ANEW1597	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	11-Sep-23	
	ANEX0388	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	02-Oct-23	
	ANEX0393	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	02-Oct-23	
	ANEX1771	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	09-Oct-23	
	ANEX3275	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	16-Oct-23	
	ANEY1790	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	12-Nov-23	
	ANEY3336	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	20-Nov-23	
	ANEY4411	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	27-Nov-23	
	ANEZ1839	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	11-Dec-23	
	ANEZ3174	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	17-Dec-23	
	ANEZ3175	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	17-Dec-23	
	ANFN1246	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	14-Jan-24	
	ANEP4982	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	28-Feb-23	
	ANEP4975	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	28-Feb-23	
	ANER0631	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	03-Apr-23	
	ANER1612	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	10-Apr-23	
	ANER1611	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	10-Apr-23	
	ANER2602	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	17-Apr-23	
	ANES3927	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	29-May-23	
	ANET1651	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	12-Jun-23	
	ANET2654	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	19-Jun-23	
	ANEU0607	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	03-Jul-23	
	ANEU3333	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	24-Jul-23	
	ANEU4275	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	31-Jul-23	
	ANEU4276	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	31-Jul-23	
	ANEU4278	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	31-Jul-23	
42271070	ANEV0645	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	07-Aug-23	
	ANEY1796	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	12-Nov-23	
	ANEP2559	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	14-Feb-23	
	ANEQ0917	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	06-Mar-23	
	ANEQ0922	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	06-Mar-23	
	ANEQ0924	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	06-Mar-23	
	ANEQ2450	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	13-Mar-23	
	ANEQ2455	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	13-Mar-23	

Produktcode (REF.)	Chargen-Nummer	Produktbeschreibung	Ablaufdatum des Produkts	Anzahl der vernichteten Geräte
	ANEQ2457	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	13-Mar-23	
	ANER4852	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	30-Apr-23	
	ANET1652	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	12-Jun-23	
	ANEU1367	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	10-Jul-23	
	ANEU2175	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	17-Jul-23	
42271110	ANEQ0916	HFK 2,5F/10/20/120/4	06-Mar-23	
	ANER4859	HFK 2,5F/10/20/120/4	30-Apr-23	
42271120	ANEQ3806	HFK 2,5F/15/25/120/4	20-Mar-23	
42281080	ANEX1770	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	09-Oct-23	
	ANEX4448	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	23-Oct-23	
	ANEY1789	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	12-Nov-23	
	ANEY4409	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	27-Nov-23	
	ANFN1248	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	14-Jan-24	
	ANEQ3810	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	20-Mar-23	
	ANEQ3811	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	20-Mar-23	
42282030	ANER4861	HFK 4,0F/20/30/ 65/5	30-Apr-23	
42282080	ANES1984	HFK 4,0F/20/30/ 90/5	15-May-23	
42293080	ANEP4985	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	28-Feb-23	
	ANER4857	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	30-Apr-23	
	ANET0717	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	05-Jun-23	
	ANEU1365	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	10-Jul-23	
	ANEU1368	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	10-Jul-23	

Anhang 2 – Repräsentative Produktetiketten

Etiketten zur Veranschaulichung	
<p>ECOFLEX basket, helical panier, hélicoïdal Körbchen, helikal cestino, elicoidale cesta, espiral korfje, spiraalvormig</p> <p>angiomed ECOFLEX BASKET 4-wire; 2.5F-cath. - 65cm REF 42245010 LOT ANUGXXXX</p> <p>angiomed ECOFLEX BASKET 4-wire; 2.5F-cath. - 65cm REF 42245010 LOT ANUGXXXX</p> <p>wire / fil / Draht / filo / guia / draad</p> <p>catheter / cathéter / Katheter / catetere / catéter / katheter</p> <p>10mm 20mm 4 2,5F[0,83mm] 65cm</p> <p>REF 42245010 2999-01 LOT ANUGXXXX 2999-01</p> <p>* + H 3 0 2 4 2 2 4 5 0 1 0 0 * * + S S 9 0 0 0 0 1 0 1 9 9 A N U G X X X X A *</p> <p>CE 2797</p> <p>804980 Vers. 3/03-98</p>	<p>Katalognummer</p> <p>Lot-Nummer</p>
<p>GASTROTOP Biliary Endoprosthesis Set Kit d'Endoprothèse Biliaire Gallen-Endoprothesen Set Set Endoprotesi Biliare Equipo de Endoprotésis Biliar Gal-Endoprothese-Set</p> <p>angiomed GASTROTOP- biliary stent - set *SINGLE PIGTAIL MODEL* REF 36220010 LOT ANUGXXXX</p> <p>angiomed GASTROTOP- biliary stent - set *SINGLE PIGTAIL MODEL* REF 36220010 LOT ANUGXXXX</p> <p>single pigtail/pigtail unique/Einfachpigtail/ pigtail singolo/pigtail sencillo/enkelvoudige pigtail</p> <p>15cm 8F[2,67mm]</p> <p>REF 36220010 2999-01 LOT ANUGXXXX 2999-01</p> <p>* + H 3 0 2 3 6 2 2 0 0 1 0 1 Z * * + S S 9 0 0 0 0 5 0 1 9 9 A N U G X X X X Z B *</p> <p>CE 2797</p> <p>804980 Vers. 3/03-98</p>	<p>Katalognummer</p> <p>Lot-Nummer</p>
<p>HIGHFLEX basket, helical panier, hélicoïdal Körbchen, helikal cestino, elicoidale cesta, espiral korfje, spiraalvormig</p> <p>angiomed High flex basket 3-wire; 2.5F-cath. - 65cm; REF 42240010 LOT ANUGXXXX</p> <p>angiomed High flex basket 3-wire; 2.5F-cath. - 65cm; REF 42240010 LOT ANUGXXXX</p> <p>wire / fil / Draht / filo / guia / draad</p> <p>catheter / cathéter / Katheter / catetere / catéter / katheter</p> <p>10mm 20mm 3 2,5F[0,83mm] 65cm</p> <p>REF 42240010 2999-01-01 LOT ANUGXXXX 2999-01-01</p> <p>(01)0080174117664 7 (17)990101 (10)ANUGXXXX</p> <p>CE 2797</p> <p>804980 Vers. 3/03-98</p>	<p>Katalognummer</p> <p>Lot-Nummer</p>