

Medtronic (Schweiz) AG

Talstrasse 9
3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.com

Tel. 031 868 01 00
Fax 031 868 01 99
E-Mail swisscontact@medtronic.com

Information Urgente de Sécurité

Dispositif d'embolisation Pipeline™ Flex et Pipeline™ Flex avec Shield Technology™

Toutes les références produit

Rappel

Juillet 2021

Référence Medtronic : FA985

Cher professionnel de santé,

L'objet de cette lettre est de vous informer que Medtronic rappelle volontairement des lots spécifiques de production des **dispositifs d'embolisation Pipeline™ Flex, y compris le dispositif d'embolisation Pipeline™ Flex avec Shield Technology.**

Description du problème :

Medtronic a reçu des rapports faisant état de blessures graves et de décès liés à une fracture du fil de poussée au niveau de la partie distale du système de mise en place Pipeline Flex™ pendant l'utilisation. À la suite d'une investigation, nous avons établi que la cause première a un impact sur les lots de production décrits dans la section Produits concernés ci-dessous. Des actions correctives ont été mis en œuvre pour résoudre le problème sous-jacent. Cette action de rappel se limite aux lots de production spécifiques énumérés à l'annexe 1.

Risque pour la santé :

Au 2 juillet 2021, Medtronic avait reçu des rapports de 71 fractures confirmées et non confirmées. Ces événements comprennent des rapports de dix (10) blessures graves et de deux (2) décès.

L'utilisation d'un dispositif concerné peut entraîner une fracture involontaire, dans laquelle la partie distale du fil de poussée se sépare du système de mise en place du dispositif pendant la mise en place et le déploiement. En cas de séparation, cela peut entraîner des blessures importantes pour le patient, y compris une intervention prolongée, un corps étranger, un accident vasculaire cérébral ischémique, une hémorragie intracrânienne, un déficit neurologique et/ou la mort.

Le risque de fracture ne se présente qu'en mode peropératoire. Si un dispositif d'embolisation Pipeline™ Flex a déjà été implanté avec succès, il n'y a pas de risque accru pour les patients en

raison du problème. Les patients porteurs d'un dispositif implanté doivent poursuivre leur traitement habituel.

Produits concernés :

Numéros de lot spécifiques de tous les modèles des dispositifs d'embolisation Pipeline™ Flex et des dispositifs d'embolisation Pipeline™ Flex avec Shield Technology fabriqués entre avril-octobre 2019 (Dates d'expiration : avril 2022 – octobre 2022) et avril-mai 2020 (Dates d'expiration : avril 2023 – mai 2023) sont concernés par le problème. Reportez-vous à l'annexe 1 – Liste de produits pour connaître les numéros de lots de production spécifiques concernés.

| Noms des produits, Identifiant unique du dispositif (le cas échéant) | Numéro de produit/numéro de catalogue du fabricant |
|--|---|
| Dispositif d'embolisation Pipeline™ Flex | PED-250-XX, PED-275-XX, PED-300-XX, PED-325-XX, PED-350-XX, PED-375-XX, PED-400-XX, PED-425-XX, PED-450-XX, PED-475-XX, PED-500-XX |
| Dispositif d'embolisation Pipeline™ Flex avec Shield Technology™ | PED2-250-XX, PED2-275-XX, PED2-300-XX, PED2-325-XX, PED2-350-XX, PED2-375-XX, PED2-400-XX, PED2-425-XX, PED2-450-XX, PED2-475-XX, PED2-500-XX |

Actions requises :

Nos données indiquent que votre établissement a reçu un ou plusieurs lots des produits concernés. Les numéros de lots des produits concernés sont énumérés dans l'annexe 1. La liste des produits concernés est regroupée par plages de date d'expiration de 3 mois pour faciliter l'examen des stocks.

Par conséquent, Medtronic exige que vous preniez immédiatement les mesures suivantes :

1. En fonction du produit sous votre contrôle, veuillez examiner la plage d'expiration par rapport à la date d'expiration figurant sur les dispositifs Pipeline. (Reportez-vous aux exemples d'étiquettes dans l'annexe 1 pour comprendre où trouver la date d'expiration sur les étiquettes de Pipeline).
2. Si un dispositif se trouve dans les plages d'expiration suivants : avril 2022 – octobre 2022 ou avril 2023 – mai 2023, veuillez consulter la pièce jointe 1 pour identifier le groupe d'expiration et examiner le numéro de lot figurant sur votre dispositif.
3. Les dispositifs qui portent l'un des numéros de lot énumérés dans l'annexe 1 sont considérés comme faisant partie du champ d'application de l'avis de rappel.
4. N'utilisez aucun produit concerné. Retirez tous les produits concernés de vos stocks et mettez-les en quarantaine.
5. Renvoyez les produits concernés à Medtronic. Votre représentant Medtronic peut vous aider, si nécessaire, pour le retour de ce produit. Si vous avez besoin d'un dispositif de rechange, votre représentant Medtronic peut vous aider à identifier le produit de remplacement approprié.

Medtronic a pris les mesures nécessaires pour arrêter toute nouvelle expédition de dispositif concerné par ce problème.

Transmission de cette communication :

Cette notification doit être transmise à toutes les personnes appropriées de votre organisation ainsi qu'à toute organisation et services où les dispositifs concernés ont été transférés.

Veuillez conserver une copie de cette lettre pour vos dossiers.

Informations complémentaires :

Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques a été informée de cette action.

Nous regrettons tout inconvénient que cela pourrait causer. Nous nous engageons à assurer la sécurité des patients et nous vous remercions de votre prompt attention à cette communication.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant Medtronic.

Cordialement,
Medtronic (Schweiz) AG

Annexe 1 – Lots de produits concernés

Pipeline™ Flex Embolization Device

Contents: 1x [Device], 1x [Accessories] (202 cm)

Dimensions: A = 2.50 mm, B = 10 mm

REF PED-250-10
LOT A123456
2019-06-10

US and Foreign Patents: Pending

Micro Therapeutics, Inc. d/b/a ev3 Neurovascular
9775 Toledo Way
Irvine, CA 92618 USA
Tel: +1.949.837.3700

STERILE EO, Rx ONLY, No fire, No heat, No steam, No microwave, No autoclave, No X-ray, No MRI

www.medtronic.com/manuals

Country of Origin: United States of America

REF PED-250-10
LOT A123456
2019-06-10 2.50 mm / 10 mm Pipeline™ Flex Embolization Device

Pipeline™ Flex Embolization Device with Shield Technology™

Contents: 1x [Device], 1x [Accessories] (202 cm)

Dimensions: A = 2.50 mm, B = 10 mm

REF PED2-250-10
LOT A123456
2019-07-16

US and Foreign Patents: Pending

Micro Therapeutics, Inc. d/b/a ev3 Neurovascular
9775 Toledo Way
Irvine, CA 92618 USA
Tel: +1.949.837.3700

STERILE EO, Rx ONLY, No fire, No heat, No steam, No microwave, No autoclave, No X-ray, No MRI

www.medtronic.com/manuals

Country of Origin: United States of America

REF PED2-250-10
LOT A123456
2019-07-16 2.50 mm / 10 mm Pipeline™ Flex Embolization Device with Shield Technology™

Légende :

LOT = Numéro de lot = Date d'expiration

Lots de produits concernés : Plage de dates d'expiration 01/04/2022 au 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A810945 | A810946 | A811477 | A811479 | A811480 | A812095 | A812097 | A812119 | A812724 | A812725 | A812726 |
| A812727 | A812728 | A812729 | A812730 | A812731 | A812732 | A812733 | A812734 | A813318 | A813319 | A813320 |
| A813321 | A813323 | A813324 | A813325 | A813326 | A813327 | A813329 | A813907 | A813908 | A813909 | A813912 |
| A813913 | A813915 | A813916 | A813917 | A813920 | A813921 | A815062 | A815063 | A815064 | A815065 | A815066 |
| A815067 | A815068 | A815069 | A815071 | A815073 | A815074 | A815075 | A815076 | A815077 | A815078 | A815079 |
| A815080 | A815691 | A815692 | A815693 | A815694 | A815695 | A815696 | A815697 | A815698 | A815699 | A815702 |
| A816329 | A816330 | A816334 | A816335 | A816338 | A816341 | A816342 | A816343 | A816345 | A816346 | A816347 |
| A816348 | A816349 | A817106 | A817107 | A817108 | A817109 | A817110 | A817111 | A817112 | A817113 | A817115 |
| A817116 | A817117 | A817119 | A817123 | A817126 | A817130 | A817751 | A817753 | A817754 | A817756 | A817758 |
| A817759 | A817761 | A817762 | A817763 | A817764 | A817765 | A817766 | A817767 | A817769 | A818290 | A818291 |
| A818292 | A818295 | A818296 | A818297 | A818298 | A818299 | A818300 | A818301 | A818459 | A818460 | A818461 |
| A818462 | A819062 | A819102 | A819105 | A819110 | A819116 | A819135 | A819136 | A819168 | A819169 | A819170 |
| A819171 | A819172 | A819203 | A819204 | A819205 | A819208 | A819209 | A820989 | A821009 | A821010 | A821011 |
| A821012 | A821013 | A821014 | A821016 | A821017 | A821018 | A821019 | A821020 | A821029 | A821504 | A821505 |
| A821506 | A821507 | A821508 | A821511 | A821512 | A821514 | A821515 | A821517 | A821519 | A821521 | A822208 |
| A822209 | A822210 | A822211 | A822212 | A822213 | A822215 | A822627 | A822630 | A822664 | A822666 | A822667 |
| A822668 | A822669 | A822670 | A822671 | A822673 | A822938 | A822939 | A822941 | A822942 | A822943 | A822944 |
| A822945 | A822946 | A822947 | A822948 | A822949 | A822950 | A822951 | A823540 | A823542 | A823544 | A823545 |
| A823546 | A823548 | A823549 | A823550 | A823551 | A823553 | A823554 | A823555 | A823556 | A823559 | A823560 |
| A823561 | A824249 | A824251 | A824252 | A824253 | A824257 | A824258 | A824259 | A824260 | A824262 | A824263 |
| A824264 | A824266 | A825688 | A825689 | A825690 | A825691 | A825692 | A825693 | A825695 | A825696 | A825697 |
| A825698 | A825699 | A825700 | A826269 | A826272 | A826273 | A826275 | A826276 | A826462 | A826463 | A826464 |
| A826465 | A826466 | A826467 | A826919 | A826920 | A826921 | A826922 | A826923 | A826924 | A826925 | A826926 |
| A826927 | A826928 | A826930 | A826931 | A826932 | A826933 | A826934 | A827586 | A827587 | A827589 | A827591 |
| A827592 | A827593 | A827594 | A827595 | A827596 | A827599 | A827600 | A827602 | A827603 | A827605 | A827606 |
| A827607 | A827608 | A827609 | A828614 | A828615 | A828616 | A828617 | A828618 | A829030 | A829031 | A829033 |
| A829034 | A829036 | A829037 | A829039 | A829042 | A829043 | A829044 | A829045 | A829047 | A829048 | A829744 |
| A829745 | A829746 | A829747 | A829748 | A829750 | A829751 | A830302 | A830303 | A830304 | A830766 | A830768 |
| A830770 | A830771 | A830772 | A830774 | A830775 | A830776 | A830777 | A830778 | A830779 | A830780 | A830781 |
| A830782 | A830783 | A830785 | A832005 | A832006 | A832007 | A832008 | A832010 | A832011 | A832012 | A832013 |
| A832014 | A832016 | A833044 | A833045 | A833046 | A833105 | A833107 | A833109 | A833111 | A833113 | A833114 |
| A833115 | A833117 | A833119 | A833120 | A833121 | A833122 | A833123 | A833700 | A833701 | A833702 | A833703 |
| A833704 | A833706 | A833707 | A833709 | A833710 | A833711 | A833712 | A833713 | A833714 | A833715 | A834386 |

Lots de produits concernés : Plage de dates d'expiration 01/04/2022 au 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A834388 | A834389 | A834390 | A834391 | A834393 | A834396 | A834397 | A834398 | A835004 | A835005 | A835008 |
| A835009 | A835010 | A835012 | A835014 | A835015 | A835018 | A835019 | A835020 | A835021 | A835022 | A835645 |
| A835646 | A835648 | A835649 | A835650 | A835651 | A835652 | A835653 | A835655 | A835656 | A835657 | A835658 |
| A835659 | A835660 | A835661 | A835662 | A835663 | A835664 | A836543 | A836546 | A836549 | A836550 | A836551 |
| A836552 | A836553 | A836554 | A836555 | A837011 | A837012 | A837014 | A837015 | A837018 | A837019 | A837020 |
| A837021 | A837022 | A837024 | A837026 | A837027 | A837028 | A837029 | A837030 | A838062 | A838063 | A838064 |
| A838065 | A838084 | A838085 | A838086 | A838089 | A838092 | A838095 | A838097 | A838100 | A838102 | A838104 |
| A838105 | A838752 | A838754 | A838755 | A838756 | A838757 | A838758 | A838759 | A838760 | A838761 | A838762 |
| A839454 | A839455 | A839456 | A839459 | A839463 | A839466 | A839468 | A839471 | A839474 | A839878 | A839879 |
| A839880 | A839881 | A839883 | A839886 | A839887 | A839889 | A841067 | A841068 | A841069 | A841072 | A841073 |
| A841074 | A841075 | A841076 | A841077 | A841081 | A841084 | A841086 | A841088 | A841090 | A841091 | A841092 |
| A841093 | A842684 | A842687 | A842688 | A842689 | A842690 | A842691 | A842692 | A842693 | A842694 | A842695 |
| A842696 | A843367 | A843368 | A843371 | A843372 | A843374 | A843375 | A843376 | A843378 | A843379 | A843381 |
| A843385 | A843387 | A843389 | A843391 | A843393 | A843396 | A844327 | A844328 | A844329 | A844330 | A844331 |
| A844333 | A844335 | A844336 | A844759 | A844760 | A844761 | A844762 | A844763 | A844764 | A844765 | A844766 |
| A844767 | A845199 | A845201 | A845202 | A845204 | A845205 | A845206 | A845207 | A845208 | A845209 | A845210 |
| A845211 | A845212 | A845213 | A846023 | A846024 | A846025 | A846027 | A846028 | A846030 | A846032 | A846033 |
| A846034 | A846035 | A846036 | A846037 | A846038 | A846039 | A846919 | A846920 | A846922 | A846924 | A846927 |
| A846930 | A846931 | A846932 | A846933 | A847555 | A847556 | A847557 | A847558 | A847559 | A847560 | A847561 |
| A847562 | A847563 | A847564 | A847565 | A847635 | A847636 | A847637 | A848260 | A848261 | A848262 | A848263 |
| A848660 | A848661 | A848676 | A848677 | A848678 | A848679 | A848680 | A848681 | A848720 | A848722 | A848723 |
| A848724 | A848725 | A848726 | A848727 | A848744 | A848745 | A848746 | A848747 | A848749 | A848750 | A848751 |
| A849265 | A849266 | A849267 | A849269 | A849270 | A849271 | A849720 | A849721 | A849722 | A849723 | A849724 |
| A849725 | A849731 | A849732 | A849733 | A849891 | A849892 | A849893 | A849895 | A849896 | A849897 | A849898 |
| A849904 | A849905 | A849906 | A849911 | A850777 | A850778 | A850780 | A850781 | A850788 | A850789 | A850790 |
| A850791 | A850792 | A850793 | A850795 | A850796 | A851427 | A851428 | A851429 | A851431 | A851432 | A851433 |
| A851434 | A851436 | A852252 | A852253 | A852254 | A852255 | A852256 | A852257 | A852543 | A852544 | A852545 |
| A852546 | A852547 | A852548 | A852549 | A852550 | A852551 | A852552 | A852553 | A852554 | A852555 | A852556 |
| A852557 | A852711 | A852712 | A852713 | A852714 | A852715 | A852716 | A852717 | A852718 | A852720 | A852721 |
| A854046 | A854048 | A854049 | A854050 | A854051 | A854052 | A854055 | A854056 | A854061 | A854063 | A854607 |
| A854608 | A854822 | A854823 | A854824 | A854825 | A854826 | A854827 | A854828 | A854829 | A854832 | A854833 |
| A854834 | A855375 | A855377 | A855378 | A855382 | A855383 | A855384 | A855386 | A855387 | A855388 | A855389 |
| A855391 | A855392 | A855393 | A855394 | A855395 | A856680 | A856681 | A856682 | A856683 | A856684 | A856685 |
| A856686 | A856687 | A856742 | A856743 | A856744 | A856745 | A856746 | A856747 | A856748 | A856749 | A856750 |
| A856751 | A856752 | A856753 | A856754 | A856755 | A856756 | A856757 | A858331 | A858332 | A858334 | A858335 |
| A858337 | A858340 | A858341 | A858342 | A858343 | A858345 | A859165 | A859166 | A859167 | A859168 | A859169 |
| A859171 | A859172 | A859174 | A859177 | A859750 | A859751 | A859752 | A859753 | A859754 | A859755 | A859756 |
| A859757 | A859761 | A859762 | A859763 | A859764 | A859765 | A859766 | A859774 | A859777 | A859780 | A861603 |

Lots de produits concernés : Plage de dates d'expiration 01/07/2022 au 30/09/2022

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A859164 | A859758 | A859759 | A859760 | A859767 | A859768 | A859769 | A859770 | A859771 | A859772 | A859773 |
| A859775 | A859776 | A859778 | A859779 | A861600 | A861601 | A861602 | A861604 | A861605 | A861606 | A861607 |
| A861608 | A861609 | A861756 | A861757 | A861758 | A861759 | A861761 | A861763 | A861764 | A861765 | A861766 |
| A861767 | A861768 | A861769 | A861771 | A862900 | A862901 | A862902 | A862904 | A862905 | A862906 | A862907 |
| A862908 | A862909 | A862910 | A862911 | A862912 | A862914 | A862916 | A862917 | A862918 | A862919 | A862920 |
| A862921 | A863674 | A863675 | A863676 | A863677 | A863678 | A863679 | A863680 | A863681 | A863682 | A863683 |
| A864456 | A864457 | A864459 | A864460 | A864462 | A864463 | A864469 | A864470 | A864472 | A864474 | A864475 |
| A864476 | A864477 | A864480 | A864482 | A864484 | A864485 | A864487 | A865228 | A865229 | A865230 | A865231 |
| A865232 | A865233 | A865234 | A865235 | A865236 | A865239 | A865240 | A865241 | A865242 | A866003 | A866004 |
| A866005 | A866006 | A866008 | A866009 | A866010 | A866011 | A866012 | A866014 | A866016 | A866017 | A866018 |
| A866019 | A866021 | A866023 | A866025 | A866412 | A867208 | A867209 | A867210 | A867212 | A867213 | A867214 |
| A867215 | A867216 | A867713 | A867714 | A867715 | A867716 | A867717 | A867718 | A867719 | A867721 | A867722 |
| A867723 | A867838 | A867839 | A867840 | A867841 | A867843 | A867844 | A867845 | A867846 | A867847 | A867848 |
| A867849 | A868552 | A868555 | A868564 | A868565 | A868566 | A868567 | A868568 | A868571 | A868572 | A868573 |
| A869078 | A869079 | A869081 | A869082 | A869083 | A869085 | A869087 | A869088 | A869091 | A869092 | A869097 |
| A869098 | A869101 | A869102 | A869105 | A869897 | A869898 | A869899 | A869900 | A869901 | A869902 | A869903 |
| A869904 | A869905 | A869906 | A869907 | A869908 | A870618 | A870621 | A870625 | A870630 | A870631 | A870632 |
| A871380 | A871382 | A871384 | A871386 | A871390 | A871391 | A871392 | A871393 | A871636 | A871637 | A871639 |
| A871640 | A871933 | A871934 | A871935 | A871936 | A871937 | A871938 | A871941 | A871943 | A871944 | A871947 |
| A871949 | A871951 | A871952 | A871953 | A871954 | A871955 | A873187 | A873188 | A873189 | A873190 | A873191 |
| A873192 | A873193 | A873194 | A873195 | A873197 | A873198 | A873200 | A873201 | A873204 | A873205 | A874035 |
| A874036 | A874039 | A874042 | A874045 | A874046 | A874049 | A874050 | A874053 | A874057 | A874059 | A874062 |
| A874064 | A875013 | A875015 | A875017 | A875022 | A875030 | A875033 | A875034 | A875035 | A875036 | A875037 |
| A875039 | A875042 | A875048 | A875051 | A875056 | A875062 | A876738 | A876740 | A876741 | A876742 | A876743 |
| A876744 | A876745 | A876746 | A876747 | A876748 | A876749 | A877514 | A877516 | A877517 | A877518 | A877519 |
| A877520 | A877521 | A877523 | A877524 | A877525 | A877526 | A877527 | A877532 | A877533 | A877534 | A878414 |
| A878417 | A878418 | A878419 | A878420 | A878840 | A878842 | A878844 | A878845 | A878846 | A878848 | A878849 |
| A878850 | A878851 | A878853 | A878854 | A878855 | A878856 | A879717 | A879718 | A879719 | A879720 | A879721 |
| A879723 | A879724 | A879725 | A879726 | A879727 | A879728 | A879731 | A879732 | A879733 | A879734 | A879735 |
| A880355 | A880357 | A880359 | A880361 | A880362 | A880363 | A880365 | A880366 | A880367 | A880368 | A880369 |
| A880370 | A880371 | A880372 | A880373 | A881403 | A881405 | A881406 | A881407 | A881408 | A881409 | A881410 |
| A881412 | A881414 | A881415 | A881416 | A881417 | A881418 | A881419 | A881420 | A882122 | A882134 | A882135 |
| A882136 | A882137 | A882138 | A882139 | A882141 | A882143 | A882146 | A882147 | A882796 | A882797 | A882798 |
| A882799 | A882800 | A882801 | A882802 | A882804 | A882805 | A882806 | A883575 | A883576 | A883577 | A883578 |
| A883579 | A883581 | A883582 | A883583 | A883585 | A883586 | A883587 | A883588 | A883589 | A883590 | A883591 |
| A883593 | A884540 | A884541 | A884542 | A884543 | A884544 | A884546 | A884549 | A884551 | A884552 | A884576 |
| A884579 | A884580 | A884581 | A884583 | A884585 | A884589 | A884594 | A884598 | A885863 | A885864 | A885865 |
| A885866 | A885867 | A885868 | A885869 | A885870 | A885871 | A885872 | A885873 | A885874 | A885877 | A885880 |
| A886638 | A886640 | A886642 | A886644 | A886647 | A886649 | A886650 | A886651 | A886652 | A886653 | A886654 |

Lots de produits concernés : Plage de dates d'expiration 01/07/2022 au 30/09/2022

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A886655 | A886656 | A887300 | A887301 | A887302 | A887303 | A887304 | A887306 | A887308 | A887311 | A887314 |
| A887316 | A887317 | A887318 | A887319 | A887320 | A887321 | A887928 | A887929 | A887930 | A887931 | A887932 |
| A887933 | A887934 | A887937 | A887938 | A887940 | A887941 | A888378 | A888379 | A888380 | A888381 | A888383 |
| A889026 | A889027 | A889028 | A889029 | A889033 | A889034 | A889035 | A889037 | A889039 | A889041 | A890031 |
| A890034 | A890035 | A890036 | A890037 | A890038 | A890039 | A890041 | A890605 | A890606 | A890609 | A890612 |
| A890613 | A890614 | A890615 | A890619 | A890623 | A890625 | A890626 | A890627 | A890628 | A890629 | A890630 |
| A890631 | A894159 | A894160 | A894161 | A894162 | A894163 | A894164 | A894165 | A894393 | A894394 | A894396 |
| A894397 | A894398 | A894400 | A894401 | A894402 | A894404 | A894405 | A894406 | A894597 | A894599 | A894600 |
| A894601 | A894602 | A894603 | A894604 | A894605 | A894606 | A894607 | A894609 | A894611 | A894613 | A894614 |
| A895293 | A895294 | A895295 | A895296 | A895302 | A895303 | A895304 | A895305 | A895306 | A895307 | A895308 |
| A895309 | A895310 | A895312 | A895313 | A895314 | A895315 | A896153 | A896154 | A896155 | A896157 | A896158 |
| A896159 | A896160 | A896161 | A896162 | A896163 | A896936 | A896937 | A896938 | A896941 | A896942 | A896944 |
| A896945 | A896946 | A896947 | A896948 | A897345 | A897347 | A897348 | A897350 | A897354 | A897358 | A897361 |
| A897363 | A897365 | A897367 | A897369 | A897371 | A897373 | A897375 | A897377 | A897378 | A897379 | A898544 |
| A898545 | A898546 | A898549 | A898551 | A898552 | A898555 | A898557 | A898558 | A898559 | A898562 | A898564 |
| A899357 | A899360 | A899361 | A899362 | A899364 | A899366 | A899368 | A899369 | A899370 | A899372 | A899373 |
| A899375 | A899376 | A900253 | A900254 | A900255 | A900256 | A900258 | A900260 | A900262 | A900263 | A900265 |
| A900266 | A900736 | A900739 | A900740 | A900741 | A900742 | A900744 | A900745 | A900746 | A900747 | A900749 |
| A900750 | A900752 | A900753 | A900754 | A900755 | A900756 | A900757 | A900758 | A900759 | A902089 | A902090 |
| A902091 | A902092 | A902093 | A902094 | A902095 | A902096 | A902097 | A902098 | A902100 | A902101 | A902102 |
| A902103 | A902104 | A902106 | A902107 | A902751 | A902753 | A902755 | A902756 | A902758 | A902759 | A902760 |
| A902761 | A902762 | A902764 | A902767 | A902772 | A903537 | A903538 | A903540 | A903541 | A903543 | A903544 |
| A903545 | A903560 | A903561 | A903562 | A903563 | A903564 | A903565 | A903566 | A903567 | A904230 | A904232 |
| A904234 | A904237 | A904239 | A904241 | A904243 | A904246 | A904252 | A904253 | A904254 | A904255 | A904256 |
| A904257 | A904258 | A904870 | A904871 | A904873 | A904875 | A904876 | A904906 | A906053 | A906054 | A906055 |
| A906057 | A906062 | A906063 | A906064 | A906065 | A906066 | A906067 | A906068 | A906069 | A906070 | A906071 |
| A906072 | A906073 | A906074 | A906076 | A906077 | A906079 | A906080 | A906724 | A906725 | A906726 | A906727 |
| A906728 | A906729 | A906730 | A906731 | A906733 | A906734 | A906735 | A906736 | A906737 | A907480 | A907481 |
| A907482 | A907483 | A907484 | A907490 | A907491 | A907496 | A907497 | A907498 | A907499 | A907500 | A908288 |
| A908291 | A908292 | A908295 | A908296 | A908626 | A908627 | A908628 | A908629 | A908631 | A908633 | A908634 |
| A908635 | A908636 | A909350 | A909351 | A909353 | A909354 | A909355 | A909356 | A909357 | A909358 | A909360 |
| A909361 | A909362 | A909363 | A909370 | A909371 | A909372 | A909373 | A909375 | A909377 | A909378 | A910385 |
| A910387 | A910389 | A910390 | A910392 | A910393 | A910394 | A910395 | A910396 | A910397 | A910398 | A910918 |
| A910919 | A910920 | A910922 | A910924 | A910925 | A910926 | A910927 | A910928 | A910929 | A911793 | A911794 |
| A911795 | A911797 | A911798 | A911799 | A911800 | A911801 | A911802 | A912441 | | A912447 | |

Lots de produits concernés : Plage de dates d'expiration 01/10/2022 au 31/10/2022

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A909374 | A910391 | A910923 | A910930 | A911796 | A911803 | A912440 | A912442 | A912443 | A912444 | A912445 |
| A912449 | A912451 | A913140 | A913143 | A913144 | A913145 | A913148 | A913149 | A913155 | A913156 | A913157 |
| A913158 | A913160 | A913162 | A914075 | A914076 | A914077 | A914141 | A914142 | A914143 | A914144 | A914206 |
| A914207 | A914208 | A914209 | A914210 | A914211 | A914212 | A914214 | A914804 | A914805 | A914806 | A914808 |
| A914809 | A914810 | A914811 | A914812 | A914814 | A914815 | A914816 | A914817 | A915508 | A915516 | A915518 |
| A915520 | A915521 | A915523 | A915524 | A915527 | A915529 | A915537 | A915539 | A915540 | A915541 | A915542 |
| A916289 | A916290 | A916291 | A916292 | A916293 | A916294 | A916295 | A916296 | A916297 | A916298 | A916299 |
| A916300 | A917147 | A917148 | A917150 | A917152 | A917154 | A917155 | A917157 | A917159 | A917160 | A917837 |
| A917839 | A918056 | A918057 | A918058 | A918061 | A918062 | A918063 | A918065 | A918066 | A918068 | A918069 |
| A918070 | | | | | | | | | | |

Lots de produits concernés : Plage de dates d'expiration 01/04/2023 au 31/05/2023

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B002744 | B002749 | B002757 | B005837 | B005838 | B005839 | B005840 | B005844 | B005846 | B005848 | B005849 |
| B005850 | B005851 | B005852 | B005853 | B005855 | B005859 | B005860 | B005862 | B005863 | B005864 | B005865 |
| B005867 | B007366 | B007367 | B007368 | B007369 | B007370 | B007371 | B007372 | B007373 | B007374 | B007375 |
| B007376 | B007377 | B007378 | B007400 | B007401 | B007402 | B007403 | B007404 | B007405 | B007406 | B007407 |
| B007408 | B008202 | B008203 | B008204 | B008206 | B008207 | B008208 | B008215 | B008216 | B008217 | B008219 |
| B013889 | B015360 | B016955 | B016957 | B016960 | B016962 | B016964 | B016966 | B017057 | B017058 | B017059 |
| B017067 | B017069 | B017070 | B017071 | B017072 | B017073 | B017074 | B017075 | B017076 | B017077 | B017078 |
| B017079 | B017080 | B017082 | B017083 | B017084 | B017085 | B018619 | B018620 | B018621 | B018622 | B018624 |
| B018625 | B018627 | B018628 | B018629 | B018630 | B018631 | B018632 | B019181 | B019182 | B019184 | B019186 |
| B027513 | B027921 | B031111 | | | | | | | | |