



17.10.2022

**DRINGEND: Sicherheitsanweisung**

**Bitte lesen Sie diese Mitteilung vollständig und bestätigen Sie, dass Sie diese Mitteilung erhalten und verstanden haben.**

Sehr geehrte Fachkraft im Gesundheitswesen,

Hiermit möchten wir Ihnen dringende Sicherheitsinformationen zum Omnipod DASH® Personal Diabetes Manager (PDM) mitteilen. Wir haben von einigen Omnipod DASH®-Benutzern Berichte über Probleme mit dem PDM-Akku erhalten, darunter das Aufblähen des Akkus, das Auslaufen von Flüssigkeit aus dem Akku und in seltenen Fällen extreme Überhitzung, die eine Brandgefahr darstellen kann.

Die beigefügte Mitteilung <http://omnipod.com/de-ch/fsn-10-2022> wurde als freiwillige Sicherheitskorrekturmaßnahme an alle bekannten Anwenderinnen und Anwender des Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystems verschickt.

Erforderliche Maßnahmen:

1. Bitte lesen Sie die beigefügte Sicherheitsanweisung und geben Sie diese Informationen an das zuständige klinische Personal an Ihrem Standort weiter.
2. Bitte geben Sie diese Sicherheitsanweisung an Ihre Patientinnen und Patienten weiter, die das Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystem verwenden.
3. Wenn Sie und Ihre Klinik über Omnipod DASH®-Demonstrationsgeräte oder -Mustergeräte verfügen, befolgen Sie bitte die Hinweise in der Sicherheitsanweisung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
4. Bitte bestätigen Sie elektronisch, dass Sie diese Sicherheitsanweisung verstanden haben, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen:

**Bestätigungs-Link**

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung in dieser wichtigen Angelegenheit. Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0800 89 76 18 (aus dem Ausland: +41 44 585 9019).

Mit freundlichen Grüßen

Trang Ly  
Insulet Corporation

Senior Vice President,  
Clinical & Medical Affairs

