



17/10/2022

URGENT : Avis de sécurité

Veillez lire cet avis dans son intégralité, en accuser réception et confirmer que vous avez compris cet avis.

Cher/chère professionnel(le) de santé,

Nous vous écrivons pour vous communiquer des informations de sécurité importantes concernant le Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel du diabète, PDM) Omnipod DASH®. Nous avons reçu des signalements de la part de certains utilisateurs Omnipod DASH® concernant des problèmes liés à la batterie du PDM, qui incluent un gonflement de la batterie, des fuites de liquide depuis la batterie, et dans de rares cas, une surchauffe extrême susceptible de présenter un risque d'incendie.

L'avis ci-joint

<http://omnipod.com/fr-ch/fsn-10-2022>

a été envoyé en tant que correctif volontaire à tous les utilisateurs connus du système de gestion de l'insuline Omnipod DASH®.

Actions requises de votre part :

1. Veuillez passer en revue l'avis de sécurité ci-joint et partager ces informations aux équipes concernées sur votre site.
2. Veuillez partager cet avis de sécurité avec vos patients utilisant le système de gestion de l'insuline Omnipod DASH®.
3. Si vous-même ou votre établissement êtes en possession d'un PDM de démonstration Omnipod DASH ou d'échantillons, veuillez suivre les recommandations de l'avis de sécurité afin de vous assurer que le dispositif fonctionne correctement.
4. Veuillez confirmer votre bonne compréhension de cet avis de sécurité en cliquant sur le lien ci-dessous, et suivre les instructions qui apparaîtront à l'écran.

Accuser réception ici

<http://omnipod.com/fr-ch/fsn>

Nous vous remercions, cher professionnel de santé, de votre coopération sur cet avis de sécurité. Pour toute questions, veuillez nous contacter au : 0800 89 76 18 (depuis l'étranger : +41 44 585 9019).



Cordialement,

Insulet Corporation