

Siemens Healthcare GmbH, HC DI XP F&U PRM, Siemensstr. 3, Healthcare Gebäude 1,  
91301 Forchheim

An alle Anwender\*innen der SIEMENS-Systeme AXIOM  
Luminos TF, AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200,  
AXIOM Luminos Agile, Luminos Agile Max, AXIOM  
Luminos dRF, Luminos dRF Max und LUMINOS Lotus  
Max

Datum November, 2022

## **Kundenwarnbrief**

### **Betreff: Potenzielles Risiko, dass sich die Fußbank vom Patiententisch löst**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über eine vorbeugende Maßnahme informieren, die dazu dient, ein potenzielles Verletzungsrisiko für Patient\*innen auszuschließen, das dadurch entstehen kann, dass sich die Fußbank während einer Untersuchung vom Patiententisch löst.

#### **Wann könnte dieses Problem auftreten und was sind die potenziellen Risiken?**

Falls die Fußbank nicht ordnungsgemäß am Patiententisch angebracht und eingerastet ist, besteht die Gefahr, dass sie sich löst und die zu untersuchende Person vom Tisch rutscht und verletzt wird.

#### **Welche Maßnahmen kann der oder die Anwender\*in ergreifen, um das potenzielle Risiko dieses Problems zu vermeiden?**

- Der oder die Anwender\*in muss sich jedes Mal vergewissern, dass die Fußbank sicher befestigt und eingerastet ist, bevor er die zu untersuchende Person darauf sitzen oder stehen lässt.
- Die beiden grünen Leisten auf jeder Seite der Fußbank müssen sichtbar sein.
- Die Fußbank darf nur bei horizontaler Tischposition angebracht und entfernt werden.

Beachten Sie beim Anbringen der Fußbank die Anleitung in der beiliegenden Ergänzung zur Gebrauchsanweisung für Ihr System.

**Siemens Healthcare GmbH**  
Vorstand: Bernhard Montag, Vorsitzender und Chief Executive Officer;  
Darleen Caron, Jochen Schmitz, Christoph Zindel

Siemensstr. 3  
91301 Forchheim  
Deutschland

Tel.: +49 (9191) 180  
siemens.com/healthcare

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ralf P. Thomas  
Sitz der Gesellschaft: München, Deutschland; Handelsregister: München, HRB 213821  
WEEE-Reg.-Nr. DE 64872105

**Wie wird dieses Problem endgültig behoben und die Korrekturmaßnahme umgesetzt?**

Dieses Informationsschreiben wird zusammen mit einer Ergänzung zur Gebrauchsanweisung an alle betroffenen Kund\*innen verteilt. Die Ergänzung enthält zusätzliche Details und Abbildungen zum sicheren Anbringen der Fußbank, die ein besseres Verständnis der Handhabung der Fußbank vermitteln.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das System bedienen, über den Inhalt dieses Schreibens und der Ergänzung zur Gebrauchsanweisung informiert sind.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation im Umgang mit diesem Sicherheits- und Warnhinweis und bitten Sie, diese Informationen unverzüglich an Ihre Mitarbeiter\*innen weiterzugeben. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Sicherheits- und Warnhinweis sowie die Ergänzung zur Gebrauchsanweisung zusammen mit der Gebrauchsanweisung des Systems aufbewahrt werden.

Wenn Sie dieses Gerät verkauft haben und es nicht mehr in Ihrem Besitz ist, möchten wir Sie bitten, diesen Sicherheitshinweis an den oder die neue Besitzer\*in des Gerätes weiterzuleiten. Bitte teilen Sie uns den oder die neue Besitzer\*in des Gerätes mit.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Healthcare GmbH