

Chemin des Quatre-Vents 7F
CH-1166 Perroy
Tel. +41 26 323 20 30

info@medstrom.ch
www.medstrom.ch

Sicherheitshinweis für SOLO Bett

Produktname:: Medstrom Solo[®] bed

Datum : 30 août 2023

Referenz: M2023002

Achtung: Alle Benutzer des elektrisch betriebenen Pflegebetts Medstrom Solo[®].

Betroffene Geräte: Alle Medstrom Solo[®]-Betten mit geteilten Seitengittern, die vor dem 31. Juli 2023 ausgeliefert wurden.

Serien- oder Chargennummer Nicht anwendbar

Beschreibung:

Bei Medstrom Solo[®]-Betten mit geteilten Seitengittern kann es zu einem Problem kommen, wenn die Seitengitter schwer in der oberen Position zu verriegeln oder aus der oberen Position zu entriegeln sind. Im Normalbetrieb ist jedes Seitengitter leicht zu handhaben, funktioniert reibungslos und es ist ein hörbares Klicken zu vernehmen, wenn das Seitengitter in der oberen, verriegelten Position einrastet. Wenn die Seitengitter starr sind, nicht reibungslos funktionieren, nicht in der oberen Position einrasten, sich nicht aus der oberen Position lösen oder wenn kein Klick zu hören ist, kann dies auf ein Problem hinweisen. Hinweis: Medstrom-Betten, die nach Juli 2023 hergestellt wurden, sind nicht betroffen.

Ratschläge zu den zu ergreifenden Massnahmen:

1. stellen Sie sicher, dass die Benutzer im Umgang mit dem Bett geschult sind.
2. Die Seitengitter sind so konstruiert, dass sie mit einer Hand bedient werden können. Lesen, verstehen und führen Sie die in Abschnitt 8.6.1 des Benutzerhandbuchs für den Medstrom Solo[®] (SM510, Revision 8.2) aufgeführten und illustrierten Handlungen durch. Zusätzliche Exemplare des Benutzerhandbuchs sind auf Anfrage erhältlich.

a. Bringen Sie das Seitengitter mit einer Hand in Position, heben Sie es an und verriegeln Sie es. Achten Sie auf das hörbare Einrasten.



b. Um das Seitengitter abzusenken, klicken Sie mit einer Hand auf den grauen Kunststoffgriff in der Mitte des Gitters und lassen ihn los. Die Absenkgeschwindigkeit wird mithilfe eines eingebauten Dämpfungsmechanismus verringert.



c. Wenn die Schutzpolster für die Seitengitter verwendet werden, kann das Seitengitter an der Oberseite der Schutzvorrichtung gefasst werden, um es anzuheben. Ausserdem ist die Position des Entriegelungsgriffs auf dem Bezug deutlich markiert. Klicken Sie auf den Griff in der Mitte des Seitengitters und lassen Sie ihn los. Die Absenkgeschwindigkeit wird mithilfe eines eingebauten Dämpfungsmechanismus reduziert. Überarbeitete Bezüge, die einen leichteren Zugang zum Anheben und Absenken der Seitengitter ermöglichen, befinden sich derzeit in der Entwicklung. Wir werden alle Besitzer informieren, sobald diese neue Version verfügbar ist.



3. Benutzen Sie nicht beide Hände, um ein Seitengitter zu betätigen.

4. Legen Sie Ihre Hand nicht unter ein Seitengitter und versuchen Sie nicht, es mit Gewalt zu verriegeln oder zu entriegeln. Es besteht die Gefahr eines Einklemmens oder einer Verletzung, wenn die Finger unter das Seitengitter geraten und Kraft ausgeübt wird.

5. Wenn bei der Verwendung eines Seitengitters dieses schwer zu bedienen oder "starr" ist und sich nicht in der oberen Position verriegeln oder aus der oberen Position entriegeln lässt, nehmen Sie das Bett zur Inspektion und Reparatur ausser Betrieb. Es kann eine Gefahr für den Patienten bestehen, wenn ein Seitengitter nicht in der oberen Position verriegelt oder aus der oberen Position entriegelt werden kann.

Weiterleitung dieses Sicherheitshinweises vor Ort:

Bitte leiten Sie diesen Hinweis an alle Personen weiter, die innerhalb Ihrer Organisation informiert werden müssen, sowie an jede andere Organisation, an die die betroffenen Geräte möglicherweise weitergegeben wurden.

Laurent James



Geschäftsführer