

Chemin des Quatre-Vents 7F
CH-1166 Perroy
Tel. +41 26 323 20 30

info@medstrom.ch
www.medstrom.ch

Avis de Sécurité pour lit SOLO

Nom du Produit: Medstrom Solo® bed

Date : 30 août 2023

Référence: M2023002

Attention: tous les utilisateurs du lit médicalisé électrique Medstrom Solo®.

Appareils concernés: Tous les lits Medstrom Solo®, avec des barrières demis-barrières latérales, livrés avant le 31 juillet 2023.

Numéros de série ou de lot Non applicable

Description:

Les lits Medstrom Solo® équipés de demi-barrières latérales peuvent rencontrer un problème lorsque les barrières latérales sont difficiles à verrouiller en position haute ou à déverrouiller de la position haute. En fonctionnement normal, chaque barrière latérale est facile à manipuler, fonctionne en douceur et un clic audible se fait entendre lorsque la barrière latérale s'enclenche en position supérieure verrouillée. Si la demi-barrière est rigide, ne fonctionne pas en douceur, ne se verrouille pas en position supérieure, ne se libère pas de la position supérieure ou si aucun clic ne se fait entendre, cela peut indiquer qu'il y a un problème.

Remarque : les lits Medstrom fabriqués après juillet 2023 ne sont pas concernés.

Conseils sur les mesures à prendre:

1. Vérifiez que les utilisateurs sont formés à l'utilisation du lit.
2. Les barrières latérales sont conçues pour être actionnées d'une seule main. Lisez, comprenez et effectuez les actions énumérées et illustrées dans la section 8.6.1 du manuel de l'utilisateur Medstrom Solo® (SM510, révision 8.2). Des exemplaires supplémentaires du manuel de l'utilisateur sont disponibles sur demande.

a. D'une main, mettez la barrière latérale en position, soulevez-la et verrouillez-la en place. Écoutez le déclic audible.



b. Pour abaisser la barrière latérale, d'une main, cliquez et relâchez la poignée en plastique gris au centre de la barrière. La vitesse de descente est réduite à l'aide d'un mécanisme d'amortissement intégré.



c. Lorsque les protections des barrières latérales, sont utilisées, la barrière latérale peut être saisie par le haut de la protection pour la soulever. De plus, l'emplacement de la poignée de déverrouillage est clairement indiqué sur la housse. Cliquez et relâchez la poignée au centre de la barrière. La vitesse de descente est réduite à l'aide d'un mécanisme d'amortissement intégré. Des housses révisées permettant un accès plus facile pour soulever et abaisser les barrières latérales sont actuellement en cours de développement. Nous informerons tous les propriétaires dès que la mise à jour sera disponible.



3. Ne pas utiliser les deux mains pour actionner une barrière latérale.

4. Ne placez pas votre main sous une barrière latérale et n'essayez pas de la forcer à se verrouiller ou à se déverrouiller. Il existe un risque de coincement ou de blessure si les doigts sont placés sous la barrière latérale et qu'une force est appliquée.

5. Lors de l'utilisation d'une barrière latérale, si elle est difficile à utiliser ou "rigide" et ne se verrouille pas en position haute ou ne se déverrouille pas de la position haute, mettez le lit hors service pour qu'il soit inspecté et réparé. Il peut y avoir un risque pour le patient si une barrière latérale ne peut pas être verrouillée en position haute ou déverrouillée de la position haute.

Transmission de cet avis de sécurité sur le terrain :

Veuillez transmettre cet avis à toutes les personnes qui doivent être informées au sein de votre organisation et à toute autre organisation où les appareils concernés ont pu être transférés.

Laurent James



Directeur