

<**Riferimento: 92977025-FA**>

30 novembre 2023

## **Avviso urgente di sicurezza PRM ZOOM modello 3120 con software modello 2892**

**Oggetto: Avviso di sicurezza** – A partire dal 10 gennaio 2024, il parametro dell'orologio utilizzato dall'applicazione software modello 2892 sul programmatore ZOOM™ modello 3120 visualizzerà in modo errato alcune date di diagnostica. Riferimento azione sul campo Boston Scientific: 92977025-FA.

Egregio Medico o Professionista sanitario (HCP),

Le scriviamo per informarLa che a partire dal 10 gennaio 2024, il parametro dell'orologio utilizzato dall'applicazione software modello 2892 sul programmatore modello ZOOM 3120 visualizzerà in modo errato alcune date di diagnostica, mostrando un anno del decennio a partire dal 1990. L'applicazione software modello 2892 supporta circa 8.400 pacemaker rimanenti della famiglia ALTRUA™, INSIGNIA™ e NEXUS™ impiantati tra ottobre 2001 e agosto 2018. Questo comportamento non influisce sulla funzionalità del pacemaker. Il programmatore ZOOM modello 3120 sta per raggiungere la fine del servizio e viene sostituito dal programmatore modello 3300 LATITUDE™.

### **Descrizione di comportamenti imprevisti e degli impatti clinici:**

L'applicazione software modello 2892 determina le informazioni sulla data utilizzando l'orologio del programmatore ZOOM modello 3120. In base alla progettazione dell'applicazione software modello 2892, il parametro dell'orologio supporta date dal 1° gennaio 1990 al 10 gennaio 2024. Dopo questa data, il parametro orologio si riavvierà e visualizzerà in modo errato alcune date di diagnostica sulla schermata del programmatore, sul salvataggio su disco e nei rapporti stampati.

- Le date di diagnostica interessate che verranno visualizzate in modo errato a partire dal 10 gennaio 2024 includono la data dell'ultimo test della batteria, l'ultima data di programmazione, la data dell'ultima interrogazione, l'ultimo azzeramento dei contatori/istogrammi e le date dei test di follow-up come l'ampiezza intrinseca, l'impedenza di stimolazione e i test di soglia di stimolazione.

Nota: tutte le date vengono visualizzate correttamente su un programmatore LATITUDE modello 3300.

- Le date degli indicatori di sostituzione e la data degli eventi nel registro aritmie non sono interessate e vengono visualizzate correttamente.
- Non vi è alcun impatto sulle prestazioni del pacemaker, sull'effettiva longevità residua del pacemaker o sulla visualizzazione dell'indicatore di carica della batteria.

Questo comportamento riguarda solo i pacemaker supportati con il software modello 2892 sul programmatore ZOOM modello 3120 e non influisce sulle date visualizzate sul programmatore LATITUDE modello 3300 o sul sistema LATITUDE Consult™.

#### **Raccomandazione:**

- Conservare questa lettera con tutti i programmatori modello 3120 del proprio centro o inviare questa lettera a tutti i professionisti sanitari che eseguono controlli dei pacemaker utilizzando un programmatore modello ZOOM 3120. Quando si utilizza l'applicazione software modello 2892 sul programmatore ZOOM modello 3120, se una data include un anno del decennio 1990, i professionisti sanitari possono:
  - Individuare una data precisa interrogando un pacemaker ALTRUA, INSIGNIA o NEXUS con un programmatore LATITUDE modello 3300; oppure
  - Individuare una data approssimativa (entro un intervallo di due giorni) utilizzando la tabella dell'Appendice A.
- Boston Scientific non raccomanda la sostituzione preventiva dei pacemaker dovuta alle date errate.
- Si prega di **compilare il Modulo di conferma** e di **inviarlo a Boston Scientific tramite il numero di fax «Customer\_Service\_Fax\_Number» entro il 22 dicembre 2023**. Ogni struttura che riceve questa lettera deve inviare un modulo compilato.

#### **Informazioni aggiuntive:**

L'autorità competente del Suo Paese ha ricevuto il presente Avviso di sicurezza in loco (FSN). Riconosciamo l'impatto delle comunicazioni di questo tipo su di Lei e intendiamo essere trasparenti nella comunicazione con i medici e professionisti sanitari per assicurare che dispongano sempre di informazioni pertinenti e tempestive per la gestione dei loro pazienti. Per qualsiasi domanda riguardante le presenti informazioni o per segnalare un evento avverso, La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Boston Scientific o i Servizi tecnici e l'autorità locale competente, a seconda dei casi.

Cordiali saluti,



Alexandra Naughton  
Vice Presidente, Assicurazione qualità

## Appendice A

In base alla progettazione dell'applicazione software modello 2892, il parametro dell'orologio supporta date dal 1° gennaio 1990 fino alle 13:37 ora locale del 10 gennaio 2024. Dopo questa data, il parametro orologio si riavvierà e visualizzerà in modo errato alcune date di diagnostica sulla schermata del programmatore, sul salvataggio su disco e nei rapporti stampati.

Poiché il parametro dell'orologio si riavvia alle 13:37 ora locale del 10 gennaio 2024, la data effettiva sarà quella approssimativa elencata di seguito o il giorno successivo, a seconda dell'ora della data di diagnostica. La data precisa può essere determinata interrogando il pacemaker con un programmatore LATITUDE modello 3300.

Data visualizzata	Data approssimativa						
Displayed Date	Approximate Date						
1-Jan-1990	10-Jan-2024	4-Feb-1990	13-Feb-2024	10-Mar-1990	18-Mar-2024	13-Apr-1990	21-Apr-2024
2-Jan-1990	11-Jan-2024	5-Feb-1990	14-Feb-2024	11-Mar-1990	19-Mar-2024	14-Apr-1990	22-Apr-2024
3-Jan-1990	12-Jan-2024	6-Feb-1990	15-Feb-2024	12-Mar-1990	20-Mar-2024	15-Apr-1990	23-Apr-2024
4-Jan-1990	13-Jan-2024	7-Feb-1990	16-Feb-2024	13-Mar-1990	21-Mar-2024	16-Apr-1990	24-Apr-2024
5-Jan-1990	14-Jan-2024	8-Feb-1990	17-Feb-2024	14-Mar-1990	22-Mar-2024	17-Apr-1990	25-Apr-2024
6-Jan-1990	15-Jan-2024	9-Feb-1990	18-Feb-2024	15-Mar-1990	23-Mar-2024	18-Apr-1990	26-Apr-2024
7-Jan-1990	16-Jan-2024	10-Feb-1990	19-Feb-2024	16-Mar-1990	24-Mar-2024	19-Apr-1990	27-Apr-2024
8-Jan-1990	17-Jan-2024	11-Feb-1990	20-Feb-2024	17-Mar-1990	25-Mar-2024	20-Apr-1990	28-Apr-2024
9-Jan-1990	18-Jan-2024	12-Feb-1990	21-Feb-2024	18-Mar-1990	26-Mar-2024	21-Apr-1990	29-Apr-2024
10-Jan-1990	19-Jan-2024	13-Feb-1990	22-Feb-2024	19-Mar-1990	27-Mar-2024	22-Apr-1990	30-Apr-2024
11-Jan-1990	20-Jan-2024	14-Feb-1990	23-Feb-2024	20-Mar-1990	28-Mar-2024	23-Apr-1990	1-May-2024
12-Jan-1990	21-Jan-2024	15-Feb-1990	24-Feb-2024	21-Mar-1990	29-Mar-2024	24-Apr-1990	2-May-2024
13-Jan-1990	22-Jan-2024	16-Feb-1990	25-Feb-2024	22-Mar-1990	30-Mar-2024	25-Apr-1990	3-May-2024
14-Jan-1990	23-Jan-2024	17-Feb-1990	26-Feb-2024	23-Mar-1990	31-Mar-2024	26-Apr-1990	4-May-2024
15-Jan-1990	24-Jan-2024	18-Feb-1990	27-Feb-2024	24-Mar-1990	1-Apr-2024	27-Apr-1990	5-May-2024
16-Jan-1990	25-Jan-2024	19-Feb-1990	28-Feb-2024	25-Mar-1990	2-Apr-2024	28-Apr-1990	6-May-2024
17-Jan-1990	26-Jan-2024	20-Feb-1990	29-Feb-2024	26-Mar-1990	3-Apr-2024	29-Apr-1990	7-May-2024
18-Jan-1990	27-Jan-2024	21-Feb-1990	1-Mar-2024	27-Mar-1990	4-Apr-2024	30-Apr-1990	8-May-2024
19-Jan-1990	28-Jan-2024	22-Feb-1990	2-Mar-2024	28-Mar-1990	5-Apr-2024	1-May-1990	9-May-2024
20-Jan-1990	29-Jan-2024	23-Feb-1990	3-Mar-2024	29-Mar-1990	6-Apr-2024	2-May-1990	10-May-2024
21-Jan-1990	30-Jan-2024	24-Feb-1990	4-Mar-2024	30-Mar-1990	7-Apr-2024	3-May-1990	11-May-2024
22-Jan-1990	31-Jan-2024	25-Feb-1990	5-Mar-2024	31-Mar-1990	8-Apr-2024	4-May-1990	12-May-2024
23-Jan-1990	1-Feb-2024	26-Feb-1990	6-Mar-2024	1-Apr-1990	9-Apr-2024	5-May-1990	13-May-2024
24-Jan-1990	2-Feb-2024	27-Feb-1990	7-Mar-2024	2-Apr-1990	10-Apr-2024	6-May-1990	14-May-2024
25-Jan-1990	3-Feb-2024	28-Feb-1990	8-Mar-2024	3-Apr-1990	11-Apr-2024	7-May-1990	15-May-2024
26-Jan-1990	4-Feb-2024	1-Mar-1990	9-Mar-2024	4-Apr-1990	12-Apr-2024	8-May-1990	16-May-2024
27-Jan-1990	5-Feb-2024	2-Mar-1990	10-Mar-2024	5-Apr-1990	13-Apr-2024	9-May-1990	17-May-2024
28-Jan-1990	6-Feb-2024	3-Mar-1990	11-Mar-2024	6-Apr-1990	14-Apr-2024	10-May-1990	18-May-2024
29-Jan-1990	7-Feb-2024	4-Mar-1990	12-Mar-2024	7-Apr-1990	15-Apr-2024	11-May-1990	19-May-2024
30-Jan-1990	8-Feb-2024	5-Mar-1990	13-Mar-2024	8-Apr-1990	16-Apr-2024	12-May-1990	20-May-2024
31-Jan-1990	9-Feb-2024	6-Mar-1990	14-Mar-2024	9-Apr-1990	17-Apr-2024	13-May-1990	21-May-2024
1-Feb-1990	10-Feb-2024	7-Mar-1990	15-Mar-2024	10-Apr-1990	18-Apr-2024	14-May-1990	22-May-2024
2-Feb-1990	11-Feb-2024	8-Mar-1990	16-Mar-2024	11-Apr-1990	19-Apr-2024	15-May-1990	23-May-2024
3-Feb-1990	12-Feb-2024	9-Mar-1990	17-Mar-2024	12-Apr-1990	20-Apr-2024	16-May-1990	24-May-2024

Data visualizzata	Data approssimativa						
Displayed Date	Approximate Date						
17-May-1990	25-May-2024	4-Jul-1990	12-Jul-2024	21-Aug-1990	29-Aug-2024	8-Oct-1990	16-Oct-2024
18-May-1990	26-May-2024	5-Jul-1990	13-Jul-2024	22-Aug-1990	30-Aug-2024	9-Oct-1990	17-Oct-2024
19-May-1990	27-May-2024	6-Jul-1990	14-Jul-2024	23-Aug-1990	31-Aug-2024	10-Oct-1990	18-Oct-2024
20-May-1990	28-May-2024	7-Jul-1990	15-Jul-2024	24-Aug-1990	1-Sep-2024	11-Oct-1990	19-Oct-2024
21-May-1990	29-May-2024	8-Jul-1990	16-Jul-2024	25-Aug-1990	2-Sep-2024	12-Oct-1990	20-Oct-2024
22-May-1990	30-May-2024	9-Jul-1990	17-Jul-2024	26-Aug-1990	3-Sep-2024	13-Oct-1990	21-Oct-2024
23-May-1990	31-May-2024	10-Jul-1990	18-Jul-2024	27-Aug-1990	4-Sep-2024	14-Oct-1990	22-Oct-2024
24-May-1990	1-Jun-2024	11-Jul-1990	19-Jul-2024	28-Aug-1990	5-Sep-2024	15-Oct-1990	23-Oct-2024
25-May-1990	2-Jun-2024	12-Jul-1990	20-Jul-2024	29-Aug-1990	6-Sep-2024	16-Oct-1990	24-Oct-2024
26-May-1990	3-Jun-2024	13-Jul-1990	21-Jul-2024	30-Aug-1990	7-Sep-2024	17-Oct-1990	25-Oct-2024
27-May-1990	4-Jun-2024	14-Jul-1990	22-Jul-2024	31-Aug-1990	8-Sep-2024	18-Oct-1990	26-Oct-2024
28-May-1990	5-Jun-2024	15-Jul-1990	23-Jul-2024	1-Sep-1990	9-Sep-2024	19-Oct-1990	27-Oct-2024
29-May-1990	6-Jun-2024	16-Jul-1990	24-Jul-2024	2-Sep-1990	10-Sep-2024	20-Oct-1990	28-Oct-2024
30-May-1990	7-Jun-2024	17-Jul-1990	25-Jul-2024	3-Sep-1990	11-Sep-2024	21-Oct-1990	29-Oct-2024
31-May-1990	8-Jun-2024	18-Jul-1990	26-Jul-2024	4-Sep-1990	12-Sep-2024	22-Oct-1990	30-Oct-2024
1-Jun-1990	9-Jun-2024	19-Jul-1990	27-Jul-2024	5-Sep-1990	13-Sep-2024	23-Oct-1990	31-Oct-2024
2-Jun-1990	10-Jun-2024	20-Jul-1990	28-Jul-2024	6-Sep-1990	14-Sep-2024	24-Oct-1990	1-Nov-2024
3-Jun-1990	11-Jun-2024	21-Jul-1990	29-Jul-2024	7-Sep-1990	15-Sep-2024	25-Oct-1990	2-Nov-2024
4-Jun-1990	12-Jun-2024	22-Jul-1990	30-Jul-2024	8-Sep-1990	16-Sep-2024	26-Oct-1990	3-Nov-2024
5-Jun-1990	13-Jun-2024	23-Jul-1990	31-Jul-2024	9-Sep-1990	17-Sep-2024	27-Oct-1990	4-Nov-2024
6-Jun-1990	14-Jun-2024	24-Jul-1990	1-Aug-2024	10-Sep-1990	18-Sep-2024	28-Oct-1990	5-Nov-2024
7-Jun-1990	15-Jun-2024	25-Jul-1990	2-Aug-2024	11-Sep-1990	19-Sep-2024	29-Oct-1990	6-Nov-2024
8-Jun-1990	16-Jun-2024	26-Jul-1990	3-Aug-2024	12-Sep-1990	20-Sep-2024	30-Oct-1990	7-Nov-2024
9-Jun-1990	17-Jun-2024	27-Jul-1990	4-Aug-2024	13-Sep-1990	21-Sep-2024	31-Oct-1990	8-Nov-2024
10-Jun-1990	18-Jun-2024	28-Jul-1990	5-Aug-2024	14-Sep-1990	22-Sep-2024	1-Nov-1990	9-Nov-2024
11-Jun-1990	19-Jun-2024	29-Jul-1990	6-Aug-2024	15-Sep-1990	23-Sep-2024	2-Nov-1990	10-Nov-2024
12-Jun-1990	20-Jun-2024	30-Jul-1990	7-Aug-2024	16-Sep-1990	24-Sep-2024	3-Nov-1990	11-Nov-2024
13-Jun-1990	21-Jun-2024	31-Jul-1990	8-Aug-2024	17-Sep-1990	25-Sep-2024	4-Nov-1990	12-Nov-2024
14-Jun-1990	22-Jun-2024	1-Aug-1990	9-Aug-2024	18-Sep-1990	26-Sep-2024	5-Nov-1990	13-Nov-2024
15-Jun-1990	23-Jun-2024	2-Aug-1990	10-Aug-2024	19-Sep-1990	27-Sep-2024	6-Nov-1990	14-Nov-2024
16-Jun-1990	24-Jun-2024	3-Aug-1990	11-Aug-2024	20-Sep-1990	28-Sep-2024	7-Nov-1990	15-Nov-2024
17-Jun-1990	25-Jun-2024	4-Aug-1990	12-Aug-2024	21-Sep-1990	29-Sep-2024	8-Nov-1990	16-Nov-2024
18-Jun-1990	26-Jun-2024	5-Aug-1990	13-Aug-2024	22-Sep-1990	30-Sep-2024	9-Nov-1990	17-Nov-2024
19-Jun-1990	27-Jun-2024	6-Aug-1990	14-Aug-2024	23-Sep-1990	1-Oct-2024	10-Nov-1990	18-Nov-2024
20-Jun-1990	28-Jun-2024	7-Aug-1990	15-Aug-2024	24-Sep-1990	2-Oct-2024	11-Nov-1990	19-Nov-2024
21-Jun-1990	29-Jun-2024	8-Aug-1990	16-Aug-2024	25-Sep-1990	3-Oct-2024	12-Nov-1990	20-Nov-2024
22-Jun-1990	30-Jun-2024	9-Aug-1990	17-Aug-2024	26-Sep-1990	4-Oct-2024	13-Nov-1990	21-Nov-2024
23-Jun-1990	1-Jul-2024	10-Aug-1990	18-Aug-2024	27-Sep-1990	5-Oct-2024	14-Nov-1990	22-Nov-2024
24-Jun-1990	2-Jul-2024	11-Aug-1990	19-Aug-2024	28-Sep-1990	6-Oct-2024	15-Nov-1990	23-Nov-2024
25-Jun-1990	3-Jul-2024	12-Aug-1990	20-Aug-2024	29-Sep-1990	7-Oct-2024	16-Nov-1990	24-Nov-2024
26-Jun-1990	4-Jul-2024	13-Aug-1990	21-Aug-2024	30-Sep-1990	8-Oct-2024	17-Nov-1990	25-Nov-2024
27-Jun-1990	5-Jul-2024	14-Aug-1990	22-Aug-2024	1-Oct-1990	9-Oct-2024	18-Nov-1990	26-Nov-2024
28-Jun-1990	6-Jul-2024	15-Aug-1990	23-Aug-2024	2-Oct-1990	10-Oct-2024	19-Nov-1990	27-Nov-2024
29-Jun-1990	7-Jul-2024	16-Aug-1990	24-Aug-2024	3-Oct-1990	11-Oct-2024	20-Nov-1990	28-Nov-2024
30-Jun-1990	8-Jul-2024	17-Aug-1990	25-Aug-2024	4-Oct-1990	12-Oct-2024	21-Nov-1990	29-Nov-2024
1-Jul-1990	9-Jul-2024	18-Aug-1990	26-Aug-2024	5-Oct-1990	13-Oct-2024	22-Nov-1990	30-Nov-2024
2-Jul-1990	10-Jul-2024	19-Aug-1990	27-Aug-2024	6-Oct-1990	14-Oct-2024	23-Nov-1990	1-Dec-2024
3-Jul-1990	11-Jul-2024	20-Aug-1990	28-Aug-2024	7-Oct-1990	15-Oct-2024	24-Nov-1990	2-Dec-2024

Data visualizzata	Data approssimativa						
Displayed Date	Approximate Date						
25-Nov-1990	3-Dec-2024	12-Jan-1991	20-Jan-2025	1-Mar-1991	9-Mar-2025	18-Apr-1991	26-Apr-2025
26-Nov-1990	4-Dec-2024	13-Jan-1991	21-Jan-2025	2-Mar-1991	10-Mar-2025	19-Apr-1991	27-Apr-2025
27-Nov-1990	5-Dec-2024	14-Jan-1991	22-Jan-2025	3-Mar-1991	11-Mar-2025	20-Apr-1991	28-Apr-2025
28-Nov-1990	6-Dec-2024	15-Jan-1991	23-Jan-2025	4-Mar-1991	12-Mar-2025	21-Apr-1991	29-Apr-2025
29-Nov-1990	7-Dec-2024	16-Jan-1991	24-Jan-2025	5-Mar-1991	13-Mar-2025	22-Apr-1991	30-Apr-2025
30-Nov-1990	8-Dec-2024	17-Jan-1991	25-Jan-2025	6-Mar-1991	14-Mar-2025	23-Apr-1991	1-May-2025
1-Dec-1990	9-Dec-2024	18-Jan-1991	26-Jan-2025	7-Mar-1991	15-Mar-2025	24-Apr-1991	2-May-2025
2-Dec-1990	10-Dec-2024	19-Jan-1991	27-Jan-2025	8-Mar-1991	16-Mar-2025	25-Apr-1991	3-May-2025
3-Dec-1990	11-Dec-2024	20-Jan-1991	28-Jan-2025	9-Mar-1991	17-Mar-2025	26-Apr-1991	4-May-2025
4-Dec-1990	12-Dec-2024	21-Jan-1991	29-Jan-2025	10-Mar-1991	18-Mar-2025	27-Apr-1991	5-May-2025
5-Dec-1990	13-Dec-2024	22-Jan-1991	30-Jan-2025	11-Mar-1991	19-Mar-2025	28-Apr-1991	6-May-2025
6-Dec-1990	14-Dec-2024	23-Jan-1991	31-Jan-2025	12-Mar-1991	20-Mar-2025	29-Apr-1991	7-May-2025
7-Dec-1990	15-Dec-2024	24-Jan-1991	1-Feb-2025	13-Mar-1991	21-Mar-2025	30-Apr-1991	8-May-2025
8-Dec-1990	16-Dec-2024	25-Jan-1991	2-Feb-2025	14-Mar-1991	22-Mar-2025	1-May-1991	9-May-2025
9-Dec-1990	17-Dec-2024	26-Jan-1991	3-Feb-2025	15-Mar-1991	23-Mar-2025	2-May-1991	10-May-2025
10-Dec-1990	18-Dec-2024	27-Jan-1991	4-Feb-2025	16-Mar-1991	24-Mar-2025	3-May-1991	11-May-2025
11-Dec-1990	19-Dec-2024	28-Jan-1991	5-Feb-2025	17-Mar-1991	25-Mar-2025	4-May-1991	12-May-2025
12-Dec-1990	20-Dec-2024	29-Jan-1991	6-Feb-2025	18-Mar-1991	26-Mar-2025	5-May-1991	13-May-2025
13-Dec-1990	21-Dec-2024	30-Jan-1991	7-Feb-2025	19-Mar-1991	27-Mar-2025	6-May-1991	14-May-2025
14-Dec-1990	22-Dec-2024	31-Jan-1991	8-Feb-2025	20-Mar-1991	28-Mar-2025	7-May-1991	15-May-2025
15-Dec-1990	23-Dec-2024	1-Feb-1991	9-Feb-2025	21-Mar-1991	29-Mar-2025	8-May-1991	16-May-2025
16-Dec-1990	24-Dec-2024	2-Feb-1991	10-Feb-2025	22-Mar-1991	30-Mar-2025	9-May-1991	17-May-2025
17-Dec-1990	25-Dec-2024	3-Feb-1991	11-Feb-2025	23-Mar-1991	31-Mar-2025	10-May-1991	18-May-2025
18-Dec-1990	26-Dec-2024	4-Feb-1991	12-Feb-2025	24-Mar-1991	1-Apr-2025	11-May-1991	19-May-2025
19-Dec-1990	27-Dec-2024	5-Feb-1991	13-Feb-2025	25-Mar-1991	2-Apr-2025	12-May-1991	20-May-2025
20-Dec-1990	28-Dec-2024	6-Feb-1991	14-Feb-2025	26-Mar-1991	3-Apr-2025	13-May-1991	21-May-2025
21-Dec-1990	29-Dec-2024	7-Feb-1991	15-Feb-2025	27-Mar-1991	4-Apr-2025	14-May-1991	22-May-2025
22-Dec-1990	30-Dec-2024	8-Feb-1991	16-Feb-2025	28-Mar-1991	5-Apr-2025	15-May-1991	23-May-2025
23-Dec-1990	31-Dec-2024	9-Feb-1991	17-Feb-2025	29-Mar-1991	6-Apr-2025	16-May-1991	24-May-2025
24-Dec-1990	1-Jan-2025	10-Feb-1991	18-Feb-2025	30-Mar-1991	7-Apr-2025	17-May-1991	25-May-2025
25-Dec-1990	2-Jan-2025	11-Feb-1991	19-Feb-2025	31-Mar-1991	8-Apr-2025	18-May-1991	26-May-2025
26-Dec-1990	3-Jan-2025	12-Feb-1991	20-Feb-2025	1-Apr-1991	9-Apr-2025	19-May-1991	27-May-2025
27-Dec-1990	4-Jan-2025	13-Feb-1991	21-Feb-2025	2-Apr-1991	10-Apr-2025	20-May-1991	28-May-2025
28-Dec-1990	5-Jan-2025	14-Feb-1991	22-Feb-2025	3-Apr-1991	11-Apr-2025	21-May-1991	29-May-2025
29-Dec-1990	6-Jan-2025	15-Feb-1991	23-Feb-2025	4-Apr-1991	12-Apr-2025	22-May-1991	30-May-2025
30-Dec-1990	7-Jan-2025	16-Feb-1991	24-Feb-2025	5-Apr-1991	13-Apr-2025	23-May-1991	31-May-2025
31-Dec-1990	8-Jan-2025	17-Feb-1991	25-Feb-2025	6-Apr-1991	14-Apr-2025	24-May-1991	1-Jun-2025
1-Jan-1991	9-Jan-2025	18-Feb-1991	26-Feb-2025	7-Apr-1991	15-Apr-2025	25-May-1991	2-Jun-2025
2-Jan-1991	10-Jan-2025	19-Feb-1991	27-Feb-2025	8-Apr-1991	16-Apr-2025	26-May-1991	3-Jun-2025
3-Jan-1991	11-Jan-2025	20-Feb-1991	28-Feb-2025	9-Apr-1991	17-Apr-2025	27-May-1991	4-Jun-2025
4-Jan-1991	12-Jan-2025	21-Feb-1991	1-Mar-2025	10-Apr-1991	18-Apr-2025	28-May-1991	5-Jun-2025
5-Jan-1991	13-Jan-2025	22-Feb-1991	2-Mar-2025	11-Apr-1991	19-Apr-2025	29-May-1991	6-Jun-2025
6-Jan-1991	14-Jan-2025	23-Feb-1991	3-Mar-2025	12-Apr-1991	20-Apr-2025	30-May-1991	7-Jun-2025
7-Jan-1991	15-Jan-2025	24-Feb-1991	4-Mar-2025	13-Apr-1991	21-Apr-2025	31-May-1991	8-Jun-2025
8-Jan-1991	16-Jan-2025	25-Feb-1991	5-Mar-2025	14-Apr-1991	22-Apr-2025	1-Jun-1991	9-Jun-2025
9-Jan-1991	17-Jan-2025	26-Feb-1991	6-Mar-2025	15-Apr-1991	23-Apr-2025	2-Jun-1991	10-Jun-2025
10-Jan-1991	18-Jan-2025	27-Feb-1991	7-Mar-2025	16-Apr-1991	24-Apr-2025	3-Jun-1991	11-Jun-2025
11-Jan-1991	19-Jan-2025	28-Feb-1991	8-Mar-2025	17-Apr-1991	25-Apr-2025	4-Jun-1991	12-Jun-2025

«Sold\_to» - «Hospital\_Name» - «City» - «Country»

-----  
**Modulo di conferma – Avviso urgente di sicurezza**

**PRM ZOOM modello 3120 con software modello 2892**

**92977025-FA**  
-----

**Firmando questo modulo, confermo di  
aver letto e compreso  
i Avviso di sicurezza di Boston Scientific**

**datati 30 novembre 2023 relativi a:**

**PRM ZOOM modello 3120 con software modello 2892**

**NOME\*** \_\_\_\_\_ **Titolo** \_\_\_\_\_

**Telefono** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**FIRMA\*** \_\_\_\_\_ **DATA\*** \_\_\_\_\_

\* Campo obbligatorio

gg/mm/aaaa