


Montageanleitung für Dolomite® Gloss®




i Benötigte Zeit für den Austausch der Kreuzstrebe | ca. fünfzehn Minuten (15')

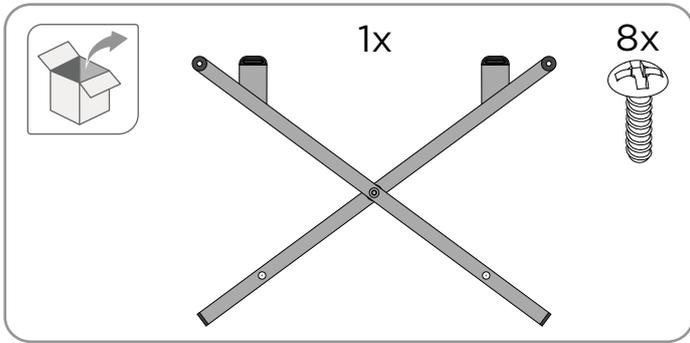


i Dieses Dokument enthält Anweisungen für den Austausch der **Original-Kreuzstrebe** durch eine optimierte Version, die dazu dient, Stabilitäts- und Leistungsprobleme bei diesem Produkt zu beheben.

i Es ist **wichtig**, dass Sie die Unversehrtheit des Sitzes prüfen. Führen Sie eine gründliche Untersuchung des aktuellen Zustands des Produkts durch, bevor Sie mit dem Austausch beginnen (siehe „Checkliste für Inspektionen“ im Servicehandbuch des Produkts).

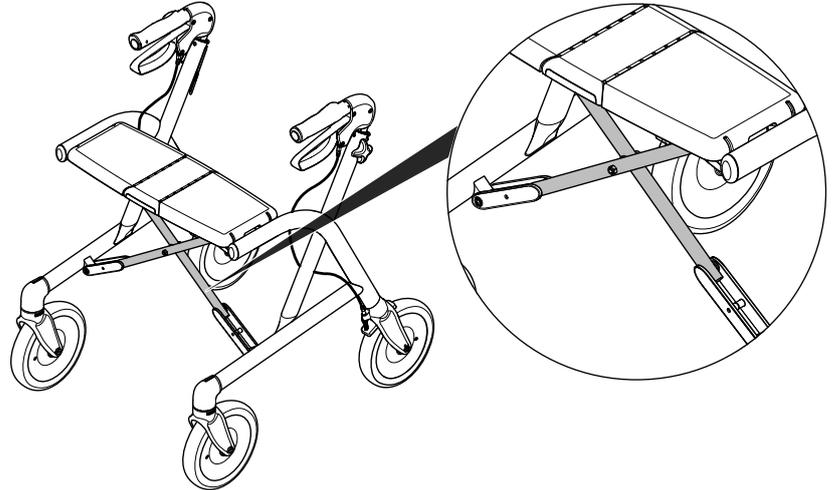


1. Entfernen des Sitzes vom Rollator*

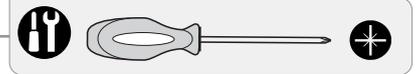

- Lösen und entfernen Sie alle **acht Schrauben** (2x**A**, 2x**B**, 2x**C** und 2x**D**), und die vier Halterungen, mit denen der Sitz am Rahmen des Rollators befestigt ist.
- Nehmen Sie den Sitz vom Rollator ab.



i *Alternativ zu Schritt 1., können Sie die vier **Innenschrauben** (1x**A**, 1x**B**, 1x**C** und 1x**D**) entfernen und die äußeren Schrauben nur lösen, so dass Sie die Halterungen um 90 ° nach außen drehen können. Dann können Sie den Sitz vom Rahmen des Rollators abnehmen. Bei dieser Vorgehensweise bleiben die vier Halterungen am Sitz befestigt, so dass der Sitz nach der Montage der neuen Kreuzstrebe leichter wieder am Rahmen befestigt werden kann.

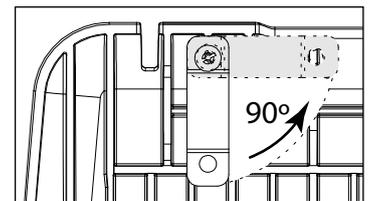




Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

Dolomite



2. Demontage der Kreuzstrebe vom Rahmen


i Die beiden Verbindungsstücke aus Kunststoff (A), dürfen bei der Demontage der Kreuzstrebe nicht vom Rahmen gelöst werden.

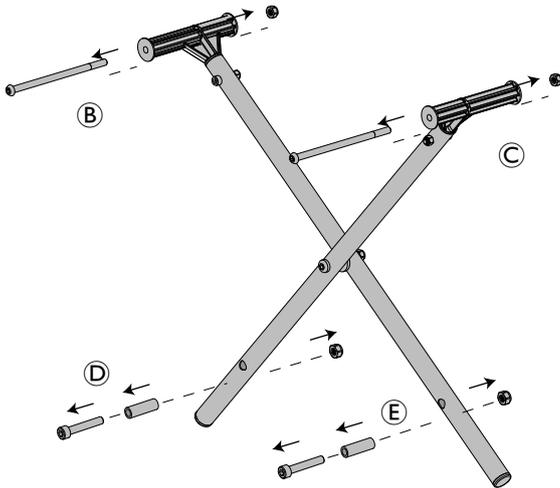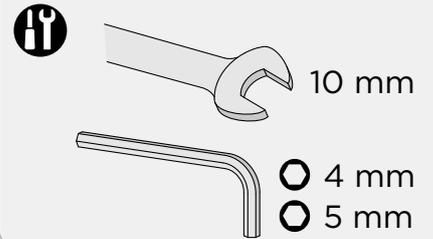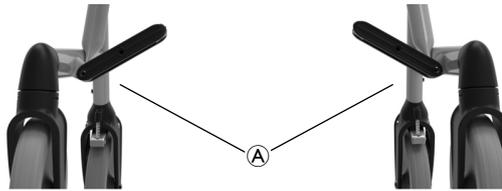

- Lösen Sie die Verbindungsstücke (Muttern und Schrauben) oben links (B) und oben rechts (C) zwischen der Kreuzstrebe und dem Rahmen des Rollators.
- Lösen Sie die Verbindungsstücke (Muttern, Abstandshalter und Schrauben) unten links (D) und unten rechts (E) zwischen der Kreuzstrebe und dem Rahmen des Rollators.
- Entfernen und entsorgen Sie die Kreuzstrebe.

3. Montage der neuen Kreuzstrebe


Siehe Schritt 2. in umgekehrter Reihenfolge.

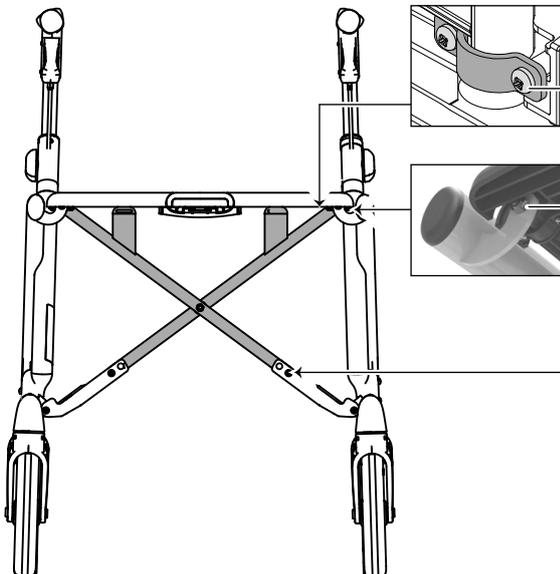

Drehmoment
 $3 \pm 0,5 \text{ Nm}$

Drehmoment
 $3 \pm 0,5 \text{ Nm}$


Drehmoment
 $3 \pm 0,5 \text{ Nm}$

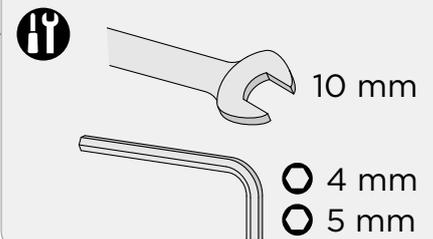

i Vergessen Sie **NICHT**, die Abstandshalter zu verwenden, wenn Sie die unteren Verbindungsstücke (D) und (E) zwischen dem Rahmen und der Kreuzstrebe befestigen.

4. Wiederanbringung des Sitzes am Rollator

Siehe Schritt 1. in umgekehrter Reihenfolge und Schritt 3. für Informationen zum Drehmoment.

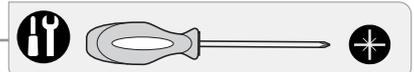

i Falls die Originalschrauben beschädigt wurden oder verloren gegangen sind, verwenden Sie die mit der neuen Kreuzstrebe gelieferten Schrauben, um den Sitz wieder zu befestigen.



Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

Dolomite

