





Instructions relatives à l'assemblage de Dolomite® Gloss®

i Temps approximatif nécessaire pour le remplacement du croisillon | quinze minutes (15')

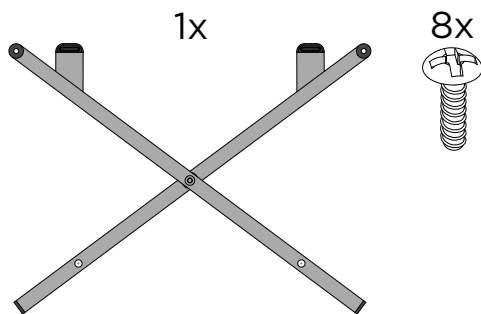


i Le présent document fournit les instructions relatives au remplacement du croisillon d'origine par une version nouvellement conçue, nécessaire pour résoudre les problèmes liés à la résistance et à la performance de ce produit.

i Il s'avère **important** de vérifier l'intégrité de l'assise. Avant de commencer cette procédure, effectuez une évaluation approfondie de l'état actuel du produit (reportez-vous à « Liste de vérification », dans Manuel de maintenance du produit).

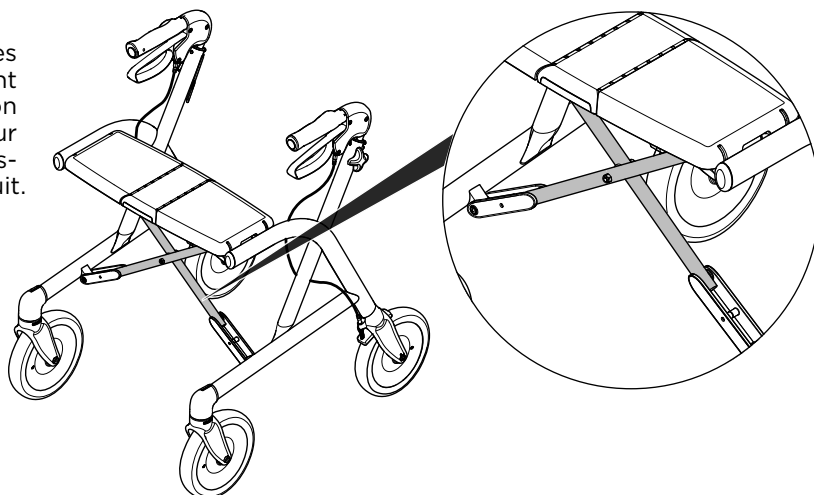

1. Séparation de l'assise du rollator*

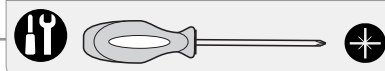


- Dévissez et retirez les huit vis (2xⒶ, 2xⒷ, 2xⒸ et 2xⒹ), et les quatre supports qui fixent l'assise au châssis du rollator.
- Séparez l'assise du rollator.



i *Alternativement à Étape 1. Vous pouvez retirer les quatre vis intérieures (1xⒶ, 1xⒷ, 1xⒸ et 1xⒹ), et desserrer uniquement les vis extérieures, de sorte à faire pivoter les supports vers l'extérieur à 90° et séparer l'assise du châssis du rollator.

En ayant recours à cette alternative, vous pouvez conserver les quatre supports fixés à l'assise, ce qui facilite l'installation de l'assise au châssis après avoir procédé à l'assemblage du nouveau croisillon.

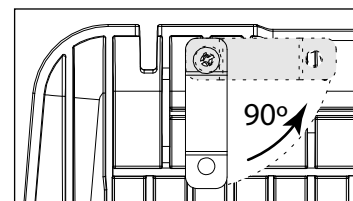

Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden




Dolomite



Yes, you can.®

2. Démontage du croisillon du châssis



i Les deux biellettes en plastique (A), ne doivent pas se détacher du cadre lors du démontage du croisillon.

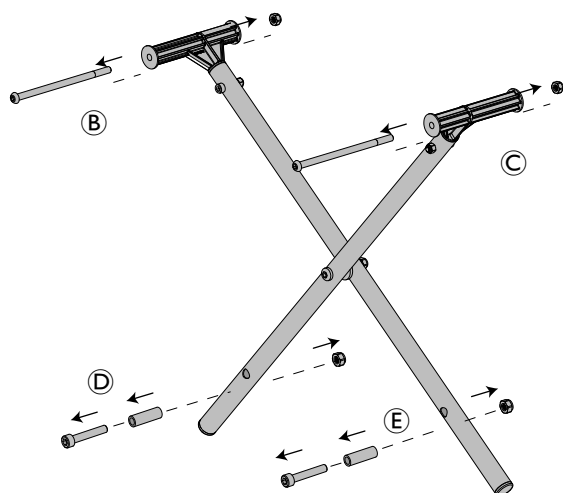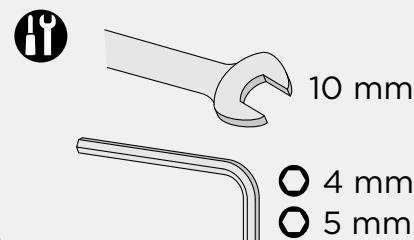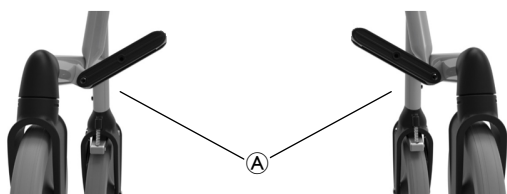

- Dévissez les connecteurs (écrous et boulons) supérieurs gauche (B) et droit (C) situés entre le croisillon et le châssis du rollator.
- Dévissez les biellettes (écrous, entretoises et boulons) inférieures gauche (D) et droit (E) situées entre le croisillon et le châssis du rollator.
- Retirez et jetez le croisillon d'origine.

3. Assemblage du nouveau croisillon


Voir Étape 2. dans l'ordre inverse.

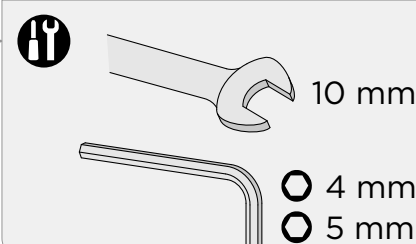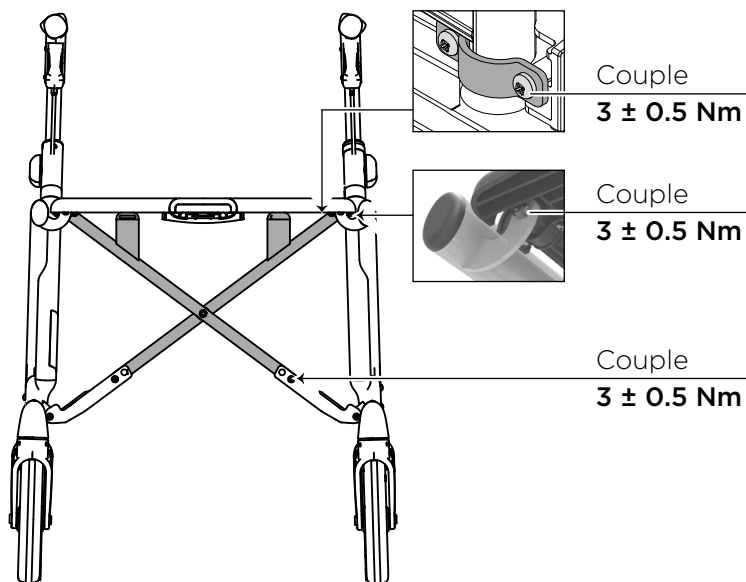

i Ne **PAS** oublier d'utiliser les entretoises lors de la fixation des biellettes inférieures (D) et (E) situées entre le châssis et le croisillon.

4. Rattachez à nouveau l'assise au rollator

Voir Étape 1. dans l'ordre inverse et Étape 3. pour les informations relatives au couplage.

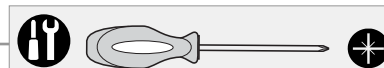

i En cas de dommage ou de perte des vis d'origine, utilisez les vis fournies avec le nouveau croisillon pour fixer à nouveau l'assise.



Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

Dolomite



Yes, you can.®