

Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

Data: 26/01/2024

Avviso urgente di sicurezza (FSN) REANIBEX 100

All'attenzione di:

- Vigilanza sui dispositivi medici
- Aziende che distribuiscono defibrillatori esterni
- Utenti di defibrillatori esterni

Dettagli di contatto del rappresentante locale



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

Avviso urgente di sicurezza (FSN) REANIBEX 100 Vedere la sezione 2.2

	1. Informazioni sui dispositivi interessati
1	1. Tipologia/e del/dei dispositivo/i
	Il REANIBEX 100 è un defibrillatore ad accesso pubblico destinato ad essere utilizzato per il trattamento dell'arresto cardiaco in pazienti adulti e pediatrici che non sono coscienti (non rispondono), né respirano. Quando è collegato ad un paziente, il REANIBEX 100 ne analizza automaticamente l'elettrocardiogramma (ECG) e decide se è necessario o meno erogare una scarica. Se viene raccomandata una scarica elettrica, il dispositivo caricherà automaticamente l'energia necessaria. A seconda della versione del dispositivo (automatico o semiautomatico), può essere necessario premere un pulsante per erogare la defibrillazione. Il dispositivo guiderà l'utente durante l'intervento mediante messaggi vocali.
	Boen Carso Carso Boen Carso Boen Carso
1	2. Nome/i commerciale/i
	REANIBEX 100
1	3. Uso clinico primario del/dei dispositivo/i
	Il REANIBEX 100 è indicato per l'uso su pazienti in arresto cardiorespiratorio che presentano i
	seguenti sintomi:
	 Il paziente e incosciente (non risponde) il paziente pop respire spontaneamente
1	A Modello/i del dispositivo
'	
	5 Versione software
	Versione software 2.06 e inferiore
1	6. Intervallo di numeri di serie interessati
	200700002, 200700004, 200700005, 200700009, 200700013, 200700014, 200700015,
	200700016, 200700018, 200700019, 200700020, 200700021,
	200700023200700026200700027, 200700030200700045, 200700047, 200700049,
	200700030, 200700032200700030, 200700039, 200700140, 200700070, 200700077,
	1 200700079 200700137 200700138 200700141 200700148 200700149
	200700079200700137, 200700138, 200700141200700148, 200700149, 200700151200700185, 200700186, 200700192, 200700194, 200700198,
	200700079200700137, 200700138, 200700141200700148, 200700149, 200700151200700185, 200700186, 200700192, 200700194, 200700198, 200700200200700201, 200700202, 200700206, 200700209, 200700210,
	200700079200700137, 200700138, 200700141200700148, 200700149, 200700151200700185, 200700186, 200700192, 200700194, 200700198, 200700200200700201, 200700202, 200700206, 200700209, 200700210, 200700212200700220200700221, 200700223, 200700224, 200700226200700234,
	200700079200700137, 200700138, 200700141200700148, 200700149, 200700151200700185, 200700186, 200700192, 200700194, 200700198, 200700200200700201, 200700202, 200700206, 200700209, 200700210, 200700212200700220200700221, 200700223, 200700224, 200700226200700234, 200700235, 200700238200700249, 200700250, 200700263, 200700266, 200700267, 200700231, 200700274, 200700252, 200700253, 200700258, 200700259, 200700250,
	200700079200700137, 200700138, 200700141200700148, 200700149, 200700151200700185, 200700186, 200700192, 200700194, 200700198, 200700200200700201, 200700202, 200700206, 200700209, 200700210, 200700212200700220200700221, 200700223, 200700224, 200700226200700234, 200700235, 200700238200700249, 200700250, 200700263, 200700266, 200700267, 200700271, 200700274, 200700352, 200700353, 200700354, 200700358, 200700359, 200700360200700363, 200700369, 200700370, 200700373, 200700377



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

200700403200700414, 200700415, 200700417, 200700418, 200700421...200700434, 200700435200700446, 200700448, 200700450...200700475, 200700476, 200700479...200700482200700483, 200700501, 200700503...200700505, 200700506, 200700521...200700523200700524, 200700526, 200700527, 200700541...200700564, 200700565, 200700577200700578, 200700586...200700596, 200700597, 200700602...200700604, 200700605200700610...200700612, 200700613, 200700615. 200700641...200700649, 200700650200700659, 200700721...200700740 Il numero di serie è riportato sull'etichetta posta sul retro del dispositivo ed è indicato dalla sigla "SN": MD Bexen cardio REANIBEX 100 SN 2020/200700001 COM WIFI SIGFOX OFULLY Osatu, S. Coop. Edificio Zearrekobuelta Subida de Areitio, nº 5 48260 ERMUA (Bizkaia) - SPAIN www.bexencardio.com Made in SPAIN CE 1434 IP55 In caso di difficoltà a individuare il numero di serie, contattare il rappresentante locale o direttamente il produttore Osatu S. Coop (Bexen cardio) all'indirizzo support@bexencardio.com.

	2 Motivo dell'azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA)
2	1. Descrizione del problema del prodotto
•	In alcune situazioni e a seconda della temperatura di funzionamento, i dispositivi REANIBEX 100 interessati potrebbero visualizzare un livello di carica della batteria sufficiente a erogare la terapia di defibrillazione, ma quando si tenta di erogare una scarica il defibrillatore si spegne all'improvviso.
	L'aggiornamento del software del dispositivo alla versione 2.07 o superiore modifica il metodo di compensazione del consumo della batteria in standby e il livello di batteria residua indicato risulta corretto.
2	Rischio alla base dell'azione correttiva di sicurezza
•	Il rischio potenziale è che il dispositivo possa indicare un livello di carica sufficiente per l'erogazione della terapia di defibrillazione anche in caso di livello insufficiente e che il dispositivo possa spegnersi all'improvviso quando si tenta di erogare una scarica.
2	3. Probabilità che il problema si verifichi
•	La probabilità che il problema si verifichi è elevata nei dispositivi con versione software 2.06 o inferiore, in particolare quando la batteria del dispositivo è installata da più di due anni.
2	4. Rischio previsto per pazienti/utenti
	Rischio di decesso del paziente per mancata erogazione della terapia di defibrillazione.
2	5. Informazioni di base sul problema
	Non sono stati riferiti incidenti nell'uso su pazienti. Nei controlli effettuati sui dispositivi e sui relativi componenti nell'ambito del sistema di qualità, Bexen cardio ha rilevato che per il modello Reanibex 100 il consumo potrebbe essere superiore a quello stimato in alcune situazioni, a seconda della temperatura di funzionamento. Nei dispositivi con versione software 2.06 o inferiore, ciò potrebbe determinare la visualizzazione di un livello di carica della batteria superiore al valore reale.



		3. Tipo di a	azione da intraprendere rischio	e per attenuare il
3.	1.	Azioni da intraprender	e da parte dell'utilizzatore	
		 Identificare il dispositivo dispositivo Distruggere il dispositivo Modifica/ispezione del disp Seguire le raccomandazior Prendere nota della modifica Altro: Aggiornamento softwomento 	☑ Mettere in quarantena il disponositivo in loco ni per la gestione del paziente ca/del rinforzo delle Istruzioni per l' vare ☐ Nessuna azione	ositivo 🗆 Restituire il Juso (IFU)
		Fornire ulteriori dettagli sulla/e az	ione/i individuata/e	
3.	2.	Entro quando dovrebbe essere completata l'azione correttiva?	L'identificazione, la l'aggiornamento de devono essere con dopo aver ricevuto dell'Avviso di sicure	i messa in quarantena e ei dispositivi interessati npletati il prima possibile, o essere stati informati ezza.
3.	3. (In pe	Si richiede la risposta del c caso affermativo, allegare n r l'invio della risposta)	liente? * nodulo specificando il termine	No
3.	4.	Azione intrapresa dal fa	abbricante	
		 Rimozione del prodotto Aggiornamento software Altro Fornire ulteriori dettagli sulla/e az	 Modifica/ispezione del dispos Modifica IFU o etichettatura Nessuna azione 	sitivo in loco
3	5.	Entro quando dovrebbe essere completata l'azione correttiva?	Quando la piattaforma RD dispositivi interessati sono	N indica che tutti i stati aggiornati.
3.	6.	Questo Avviso di sicurezza paziente/utente comune?	deve essere comunicato al	Sì
3	7.	In caso affermativo, il fabbr paziente/utente comune in comune o non professionis Sì Allegata a questo Av	icante ha fornito informazioni a una lettera/scheda informativa ta? vviso di sicurezza	ggiuntive adatte al per il paziente/utente



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

	4.	Informazioni generali
4.	1. Tipo di Avviso di sicurezza	Nuovo
4.	 Ulteriori consigli o informazioni già previsti per l'Avviso di sicurezza di controllo? 	No
4.	 Informazioni sul fabbricante (Per i dettagli di contatto del rappresentan sicurezza) 	te locale, vedere pagina 1 del presente Avviso di
	a. Nome della Società	OSATU, S. COOP.
	b. Indirizzo	Edificio Zearrekobuelta, Subida de Areitio 5 48260 Ermua-Bizkaia (España)
	c. Sito web	www.bexen.com
4.	 L'autorità (di regolamentazione) co comunicazione ai clienti. 	ompetente del Paese è stata informata di questa
4.	5. Elenco degli allegati/appendici:	Modulo di risposta del distributore Per la conferma di ricezione dell'Avviso di sicurezza e le risposte alle azioni da intraprendere da parte del Distributore
4.	6. Nome/Firma	Silvia Almaraz Hernández Persona Responsabile del rispetto della normativa (PRRC)
		0

Trasmissione del presente Avviso di sicurezza

Questo avviso deve essere trasmesso a tutte le persone interessate all'interno della sua organizzazione o a qualsiasi organizzazione a cui siano stati inviati i dispositivi potenzialmente interessati.

Inviare l'avviso a eventuali altre organizzazioni interessate da quest'azione.

Per garantire l'efficacia dell'azione correttiva, è necessario mantenere alta l'attenzione su questo avviso e sulle azioni conseguenti per un periodo di tempo appropriato.

Segnalare tutti gli incidenti relativi al dispositivo al produttore, al distributore o al rappresentante locale e, all'occorrenza, all'autorità nazionale competente perché ciò consente di ottenere un feedback importante.



ALLEGATO 1: ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO REANIBEX 100

- 1. Verificare che il numero di serie del REANIBEX 100 sia riportato nell'elenco dei numeri di serie interessati.
- 2. In caso affermativo, accedere alla piattaforma Reanibex Data Net (RDN) dalla pagina https://rdn.bexencardio.com/login con le proprie credenziali:



- 3. Qualora non sia stata effettuata la registrazione alla piattaforma Reanibex Data Net (RDN), procedere alla registrazione facendo clic su Crea account (Crea account).
- 4. Una volta compilati tutti i campi obbligatori (indicati con *), fare clic sul pulsante Crea account (Crea account). Inserire il numero di serie e il codice monouso riportato sulla GUIDA RAPIDA del REANIBEX 100. In caso di problemi durante la procedura di registrazione, contattare il distributore.



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

Indirizzo e-mail *	Conferma indirizzo e-mail *
Memail@mail.com	M email@mail.com
Password *	- Conferma password *
Nome *	Cognome *
S Nome	😫 Cognome
Numero di telefono "	- Area cardioprotetta *
$\mathbf{L}_{\mathbf{a}}$ +(XX) XXX XXX XXX	🔂 Città / Istituto / Area
Nº serie *	- Chiave *
♥ 2007XXXXX	©₽ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ho letto e accetto l'in	nformativa sulla privacy.

Richiesta di registrazione

5. Se è stata effettuata la registrazione alla piattaforma RDN ma il dispositivo non è stato ancora registrato, aggiungerlo a un gruppo esistente o creare un nuovo gruppo. A tal fine, fare clic su DISPOSITIVOS (DISPOSITIVI) nel menu laterale a sinistra per visualizzare l'elenco di tutti i dispositivi registrati:





.

Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

6. Nella schermata con l'elenco dei dispositivi, aggiungere il dispositivo facendo clic sul pulsante
 +

Bexen cardio	tivi -								
Coordinamento	Tutti i dispositivi								
 Programmi Gruppi 	Dispositivi								Aggiungi dispositivo
Contenuti	Q. Ricerca								s (+)
Dispositivi	Stato Nome	Nº serie	Modello	Software	Utilizzo	Produttore	Posizione	Collegato	Descrizione
Utenti Utenti	Casa Cultural Castilla la Mancha	200700256	Reanibex	0208		Bexen	0		B

7. Indicare il gruppo al quale si desidera aggiungere il dispositivo. Verificare che il modello indicato sia Reanibex 100.

× Nuovo dispositivo		
Seleziona il modero	Companya Landon Cossumo	O Ventica il referenzare
Guida	Reanibex 100	7

8. Inserire il numero di serie e il codice monouso riportato sulla GUIDA RAPIDA del REANIBEX 100:

eleziona il modello		2 Completa i camp	irichiesti		Verifica le intermazioni
	Dati del dispositivo				
	Nome*	Bexer) Camin		Rearabex 100	
	N ^e serie *		Chua	ve *	
	Seleziona la posizione La posizione del Reanibex 100 co	iniziale onnessi si aggiornerà automa	iticamente		
	Dov'è il dispositivo? *	Dettagli posizione *			
	Latitudine *		Longitudine*		
	Mapa Satélite	MAR DA	107-10		

SUCCESSIVO

9. Compilare tutti i campi obbligatori (indicati da *) e fare clic sul pulsante (Succesivo) per registrare il Reanibex 100. In caso di problemi durante la procedura, contattare il distributore.



10. Dopo la registrazione del dispositivo, verificare la versione del software del dispositivo. A tal fine, accedere nuovamente all'elenco dei dispositivi:

Tutti i dispo	sitivi								
Disp	ositivi								
Ricerca Q Rice	erca								¢ +
Stato	Nome	Nº serie	Modello	Software	Utilizzo	Produttore	Posizione	Collegato	Descrizione
	R100-978	200799978	Reanibex 100	0208	Ŧ	Bexen Cardio	0		8
	Equipo_8	200799981	Reanibex 100	612 0206	-	Bexen Cardio	0	*	8

11. Verificare che la piattaforma RDN indichi la disponibilità di una nuova versione software per il dispositivo.



IMPORTANTE: prima di avviare la procedura di aggiornamento, accertarsi che il livello di carica dell'unità sia sufficiente (almeno il 20%). A tal fine, fare clic sull'icona di stato del dispositivo di cui



ACCETTA



12. Accedere all'applicazione USB SYNC ed effettuare il login con le stesse credenziali utilizzate per accedere a RDN.

REANIBEX 100	Accedi	
	Password	Q
$(\mathcal{F})^{T}$	E-mail	•
Bexen Cardio	ACCESSO	
	REANIBEX USB SYNC	
	Be)(en cardio	

Se l'applicazione USB SYNC non è stata installata, è possibile scaricarla dalla sezione "<u>Centro de Recursos</u>" (<u>Centro risorse</u>) situata nel pannello laterale sinistro della piattaforma RDN.

		⊕ π ~
Coordinamento	Centra risarse	
 Programmi Gruppi 	Risorse Bexen Cardio	
Contenuti	Reanibex USB SYNC	Reanibex NFC Reader
Dispositivi	Applicazione PC per sincronizzare il defibrillatore Reanibex 100. Attraverso questa sincronizzazione, è possibile effettuare modifiche alla configurazione, aggiornamenti o trasferimenti di dati.	Applicazione mobile per verificare lo stato del defibrillatore e dei suoi accessori senza la necessità di una connessione PC.
Supportel Centro risorse		Scarics

13. Tramite il cavo USB in dotazione, collegare il REANIBEX 100 al PC su cui è in esecuzione l'applicazione REANIBEX USB SYNC. Far scorrere il coperchio verso il basso per accedere al connettore USB dell'unità.



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100



14. Selezionare il numero di serie del dispositivo al quale è collegato e fare clic sull'icona di sincronizzazione. L'applicazione REANIBEX USB SYNC controllerà che i dati siano corretti e

verificherà la presenza di aggiornamenti in sospeso. L'icona

indica i dispositivi che

indica che la sincronizzazione non è

richiedono l'aggiornamento, mentre l'icona necessaria.

Seleziona	un Dispos	itivo da Sino	cronizzare				
Gercáre				٩			,
(!) E neces informa	più dispositivi dev aario aggiomare uno o zioni aggiomate sullo	rono essere aggior più dispositivi. Si cons atato del dispositivo e d	mati Iglia di sincronizzare an Jella batteria, sull'utilizzo	che gli altri dispositivi. Doj o del dispositivo e altre inf	vo la sinoronizzazione, la piattaform ormazioni utili per la menutenzione	na Reanibes Data Net for del dispositivo.	nina
(!) E neces informa	più dispositivi dev sario aggiornare uno o cioni aggiornate sullo Programmi	rono essere aggior più dispositivi. Si cons atato del dispositivo e d Gruppi	mati iglia di aineronuzzare arr iella batteria, sull'utilizzo Nome	che gli altri dispositivi. Doj o del dispositivo e altre infi Software	so la sinoronizzazione, la piattaifom ormazioni utili per la manutenzione Ultima Sincronizzazione	na Reanibes Data Net for del diapositivo. Sincronizzare	nirs Wi-Fi
C!) E neces informa Numero di Serie 200799982	più dispositivi dev aario aggiornare uno o ztoni aggiornare sullo Programmi Test B	vono essere aggior più dispositivi. Si cons atato del dispositivo e d Gruppi Group Test B	mati iglia di amoronizzare an tella batteria, sull'utilizzo Nome Equipo_9	che gli altri dispositivo e altre inf a del dispositivo e altre inf Software 0206	so la senoronizzazione, le pierteform ormazioni utili per la manutenzione Ultima Sincronizzazione 05/03/2022 16:27:40	na Reaniber Data Net for del diapositivo Sincronizzare	WI-FI
Uno o Enecess information Numero di Serie 200799982 200799985	più dispositivi dev aario aggiornare uno o zioni aggiornate sullo Programmi Teat B I+D	vono essere aggior più dispositivi. Si cons atato del dispositivo e Gruppi Group Test B Ongarai	mati liglia di aincronezzare an liglia balicronezzare an liglia balicronezzare Nome Equipo_9 Equipo_2	che gli altri dispositivi. Do del dispositivo e altre inf Software 0206 0207	vo la sinemonizzazione, la pietraform minizzani luita per la manufamizzazione Ultima Sincronizzazione 05/03/2022 16:27:40 Dett di fabbrica	na Reember Data Net for del dispositivo. Sincronizzare (0) (0)	Wi-FI
Uno of Enecose informa Numero di Serie 200799985 200799986	pîù dispositivi dev aario aggiormare uno o citori aggiormare auto Programmi Teat B I+D Teat B	vono essere aggior i più dispositivi 31 cone itatici del dispositivo e d Gruppi Group Teat B Ongaral Group Teat B	mati agita di ainerontezare an elefa battena, edfunitze Nome Equipo_9 Equipo_2 Equipo_3	che gli altri dispositivi Dod o del dispositivo e altre inf Software 0205 0207 0207	o la seconomizzazione, la postizi form ormazioni utili per la marciarnoiché Ultima Sincronizzazione 05/03/2022 16:27:40 Dati di fabbrica 01/10/2022 17:27:40	Sincronizzare	Wi-Fi ©

C

15. Fare clic sul pulsante Sincronizza

\$15

. USB Sync avvierà la procedura di sincronizzazione.



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100



16. Fare clic sul pulsante "**Comprobar dispositivo**" (Controlla dispositivo) e attendere il completamento della procedura di sincronizzazione.

SINCRONIZZAZIONE			
Que	sta operazione potrebbe richiedere fino a 30 minuti. Non scollegare il dispositivo fino al completamento di tutti i passaggi.		
Sincronizzazione degli episodi in corso		ଔ	
Sincronizzazione dei test in corso		ଁ	
Sincronizzazione della configurazione in cosso		ଁ	
Controllo degli aggiornamenti in corso		େ	
5 Download del software in corso	Stato di sincronizzazione La sincronizzazione de file è terminata con successo. Permere il putiante "Avvia aggiornamento" per terminare il processo di aggiornamento.	0	
6 Download della configurazione in corso		0	
Download degli audio in corso		Non necessario	
8 Controllo dei file in corso		େ	

17. Una volta terminata la procedura di sincronizzazione, fare clic sul pulsante " Avvia aggiornamento" per avviare il processo e seguire i passaggi indicati dall'applicazione USB Sync.

IMPORTANTE: la procedura di aggiornamento del dispositivo potrebbe durare diversi minuti. Non spegnere il dispositivo, né rimuovere la batteria durante la procedura. In caso contrario, il dispositivo potrebbe diventare inutilizzabile.



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

Sollegare il auro USB dal dispositivo e accenderio in modalità di prova. A tal fine, accendere il dispositivo tienendo premuto il pulsante di accensione ei il pulsante pediatrico finche i pulsanti non iniziano a lampeggian () () () () () () () () () () () () () (O AGG	BIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO
Set dispositivo eventa un vergitale acuatico che inchiede di collegare i pad, collegare i pad, collegare i pad, collegare i pad, collegare i nuori pad o l'aggiornamento non versi sengato. Image: Set dispositivo eventa un vergitale acuatico che inchiede la collegare i pad, collegare i nuori pad o l'aggiornamento non versi sengato. Una volta attivata la modalità di prova, fare clici sul pulante "Avanti".	Scolle	egare il cavo USB dal dispositivo e accenderio in modalità di prova. A tal fine, accendere il dispositivo do premuto il pulsante di accensione e il pulsante pediatrico finche i pulsanti non iniziano a lampeggiane.
Se il dispositivo entetta un registale acuatico che richtede di collegare i pad, collegare i pad o l'aggiornamento non vensi eseguto. Se il dispositivo riproducer un audo une richtede la sontituzione de pat, collegare i nuori pad o l'aggiornamento non vensi eseguto: Una volte attivata la modalità di prova, fare clic sul pulsante "Avanti".		0 .
Se l'alaportere riprocazie un audo cifie infraide la sostitutione de part, collegare i nuorit pad o l'aggioremento non vena esepaño. Una volta attivata la modalità di prove, fare clic sul pulsante "Avanti".	So il dispositivo en	natta un engriale acustico che noblede di collegare i pad, collegare i pad o l'aggiornamiento non venti enegato,
Una volta attivata la modalità di prova, fare clic sul pulsante "Avanti".	Se II disponitivo	n rproducer en audio che represelte la sostituzioni dei pad cottogre i nuovi pad o Taggionestento non verza peoglatio.
Avanti IP		Uná volta attivata la modalità di prova, fare cilic sul pulsante "Avanti".

(5) "	"Aggiornamento in corso"
Tempo atimato ri	imarente: 05:27
1 Se fa	aggiornamento à stato effettuato correttamente, il dispositivo esegurà automaticiamente un test e invierà il risultato dello 80.
2 II dis dispo effet	spositivo avvierà il processo di aggiornamento. Questo processo richiederà diversi minuti. Dopo l'aggiornamento, il costivo emetterà un messaggio indicando il risultato dell'aggiornamento (Dispositivo pronto o aggiornamento non tituato).
3 Sef	aggiornamento è stato completato correttamente, il computer eseguirà automaticamente un test e invierò il risultato.
	Aspetta che venga emesso il messaggio di chiudere il coperchio e premi il pulsante SEGUENTE.
	4 Prezedente
	La procedura di aggiornamento potrebbe richiedere diversi minuti. Batteria durante la procedura per evitare che il dispositivo risulti inutilizzabile
	Nel caso in qui il processo non venna completato e prima di procedere al passannio successivo

18. Al termine dell'aggiornamento, fare clic sul pulsante "Avanti " per convalidare l'aggiornamento. Ricollegare il cavo USB e fare clic su (Convalida aggiornamento):
Verifica aggiornamento



Rif. FSCA: FSCA 0124 R100

Verifica aggiornamento
Ricollega II REANIBEX 100 al computer tramite il cavo USB e clicca su "Verifica aggiornamento".
Verifica aggiornamento
I Precedente Avanti ()

19. L'applicazione USB Sync avvierà il processo di convalida. Al termine del processo di convalida,

fare clic su (Home) per tornare alla schermata principale.

- 20. Al termine del processo, scollegare il cavo USB dal REANIBEX 100 e chiudere l'applicazione REANIBEX USB SYNC.
- 21. Chiudere il coperchio e verificare che l'indicatore di stato lampeggi ogni 10 secondi. In caso contrario, contattare il Servizio Tecnico Autorizzato.
- 22. Confermare lo stato del REANIBEX 100 online. A tal fine, accedere all'account REANIBEX Data Net e verificare che il dispositivo sia stato correttamente aggiornato.

NOTA: una volta completata la procedura di aggiornamento del dispositivo, la licenza di visualizzazione degli episodi e la licenza del lettore NFC sono disponibili gratuitamente.