

WICHTIGE INFORMATIONEN – PRODUKTRÜCKRUF

Sie haben sich für unsere Produkte **Globe-Trotter** und **Globe-Trotter+** entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Wir möchten Sie hiermit über ein **Nichtkonformitätsrisiko** im Zusammenhang mit unseren Krücken **Globe-Trotter** und **Globe-Trotter+** informieren.




Bis heute wurden unsere Produkte für ein **Höchstgewicht** von **150 kg empfohlen**. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir beschlossen, dieses **Höchstgewicht auf 130 kg zu senken**.

Infolgedessen:

Falls Sie **mehr als 130 kg wiegen, beenden Sie die Verwendung unserer Produkte und bringen Sie sie zu Ihrem Lieferanten zurück**.

Falls Sie **weniger als 130 kg** wiegen, können Sie unsere Produkte weiterhin verwenden. Setzen Sie sich jedoch mit Ihrem Lieferanten in Verbindung, der Ihnen einen **Zusatz** (ergänzende Informationen) zu Ihrer Gebrauchsanleitung sowie den nachstehenden **Aufkleber** aushändigt, den Sie auf das Aluminiumrohr kleben.

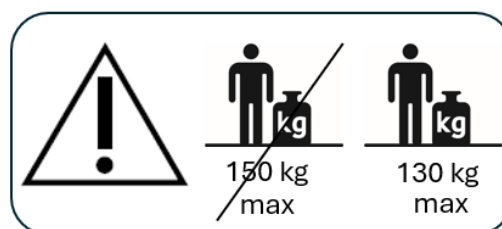

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten aufgrund dieser Maßnahme. Wir bemühen uns mehr denn je um die Patientensicherheit. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei eventuellen Fragen zur Verfügung.

www.thuasne.com

www.thuasne.com/global-contact



THUASNE

120, rue Marius Auphan
92300 Levallois-Perret
France

©Thuasne – Ref – (JJJJ-MM)

+ Ajouter les pictos de tri :



mais avec le symbole



Feuille 3



avec ou sans imprim vert à valider avec les achats