

INFORMAZIONI IMPORTANTI – RICHIAMO PRODOTTO

La ringraziamo per aver scelto i nostri prodotti **Globe-Trotter** e **Globe-Trotter+**.

Desideriamo informarla del **rischio di non conformità** delle nostre stampelle **Globe-Trotter** e **Globe-Trotter+**




I nostri prodotti **finora** erano **consigliati** per un peso **massimo** di **150 kg**. Precauzionalmente abbiamo deciso di ridurre questo **peso massimo a 130 kg**.

Di conseguenza:

Se il suo **peso è superiore a 130 kg**, la **preghiamo di non utilizzare più i nostri prodotti e riportarli al suo fornitore**.

Se il suo peso è **inferiore a 130 kg**, può continuare ad utilizzare i nostri prodotti. Si rivolga comunque al suo fornitore, che le fornirà un **addendum** alle istruzioni per l'uso e l'**adesivo** sottostante da applicare sul tubo di alluminio.

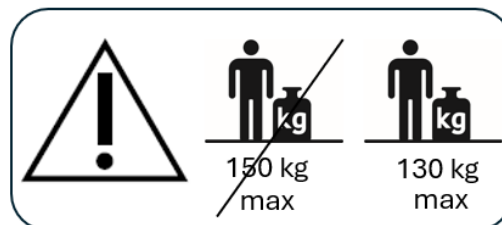

La preghiamo di accettare le nostre scuse per l'inconveniente causato da questa operazione. Oggi più che mai siamo impegnati nel garantire la sicurezza dei pazienti. Rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi domanda.

www.thuasne.com

www.thuasne.com/global-contact



©Thuasne – rif – (2024 - 06)

