

Sameda GmbH • Am Petersberg 36 • D-29389 Bad Bodenteich

An die zuständige Abteilung

Sameda GmbH

Am Petersberg 36
D-29389 Bad Bodenteich
Germany

Tel.: +49-(0)5824 98 555-0
Fax.: +49-(0)5824 98 555-20

E-Mail: info@semeda.de
www.semeda.de

Dringende Sicherheitsinformation

Betroffene Produkte

Fußabduktionsschienen

- ALFA-Flex
- BETA-Flex

Potenzieller Schaden

Gefahr der Verletzung oder Tod durch Verschlucken von sich lösenden Kleinteilen

Information relevant für

- Leistungserbringer (z.B. Orthopädie-Techniker)
- Betreuer / Eltern von mit den Produkten behandelten Kindern

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, zusätzlich zu den in der den Produkten beigefügten Gebrauchsanweisung, mit denen die betroffenen Produkte weiterhin gefahrlos und ordnungsgemäß eingesetzt werden können.

Bitte geben Sie diese Information an die Eltern der von Ihnen mit den genannten Produkten versorgten Kinder weiter. Es ist wichtig, dass diese Personen die Bedeutung dieser Benachrichtigung verstehen.

Bitte bewahren Sie diesen Brief für Ihre Unterlagen auf.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sameda hat aufgrund von Marktrückmeldungen Kenntnis über potenzielle Sicherheitsrisiken erlangt, die bei der Anwendung der Fußabduktionsschienen auftreten können.

Das Problem hängt damit zusammen, dass Produktbestandteile bei unsachgemäßer Produktverwendung/-wartung oder bei außerordentlicher Belastung aus dem Produkt herausgerissen werden können.

1. Worin besteht das Problem und unter welchen Umständen kann es auftreten.

Über die durch Sameda durchgeführte Marktbeobachtung wurde festgestellt, dass in seltenen Fällen Schrauben und andere Befestigungselemente aus den Fußabduktionsschienen herausgerissen werden können und sich dann als lose Kleinteile im Aktionsradius von Kleinkindern befinden können.

In den bei Sameda bekannt gewordenen Fällen lösten sich Schrauben bzw. Befestigungsteile unter folgenden Bedingungen:

- bei unsachgemäßem Betätigen von Schraubverbindungen entgegen den Handhabungs-, Wartungs- und Einstellvorschriften des Herstellers
- Aufbringung von großen Kräften und Momenten auf die Schraubverbindungsstellen der Fußabduktionsschienen, z.B. durch übermäßiges Toben des Kindes; oder durch das Drauftreten eines Erwachsenen auf die am Boden liegende Schiene, sowie anderen anwendungsfremden Belastungen.

Beispielbilder von gelösten Kleinteilen:



2. Risiko, das mit dem Problem verbunden ist

Lose Kleinteile im Aktionsradius kleiner Kinder können durch die Kinder verschluckt werden. Ein Verschlucken von Kleinteilen kann im ungünstigen Fall zu Verletzungen führen oder zum Tod durch Ersticken.

Sameda hat seit Einführung der Produkte im Markt bis Juli 2024 noch keine Berichte über derartige Schäden am Menschen erhalten.

3. Vom Kunden / Anwender zu ergreifende Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefährdung von Patienten oder Anwendern oder Dritten.

- Unbeschädigte Produkte können weiterhin gemäß Ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden.
- Eltern bzw. Betreuer von mit den oben genannten Produkten behandelten Kindern sollen die Produkte regelmäßig (täglich) auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.
 - Bei fehlenden Produktbestandteilen ist sicherzustellen, dass diese sich nicht im Aktionsradius von Kindern befinden.
- Schraubverbindungen am Produkt dürfen ohne Anweisung des Herstellers (Sameda) weder vom Anwender noch vom Orthopädiemechaniker manipuliert werden (unter anderem dürfen Schrauben nicht eigenständig festgezogen werden, da dies die Schraubbefestigung in der Schiene beschädigen kann).

- Ergänzen Sie die bei der Versorgung überreichten Gebrauchsanweisungen zu den Produkten durch eine Kopie dieser dringenden Sicherheitsmitteilung, wenn der von Sameda bereitgestellte Beileger mit dem entsprechenden Sicherheitshinweis bei dem Produkt noch nicht enthalten war. Das betrifft Produkte, die vor dem 25.06.2024 in Verkehr gebracht wurden.
- 4. Administrative Anforderungen an die Leistungserbringer der Versorgung (Orthopädie-Techniker)**
- Übermitteln Sie eine Kopie dieser dringenden Sicherheitsmitteilung an alle Eltern / Betreuer von mit den oben genannten Produkten in den letzten drei Jahren versorgten Kindern. Das betrifft die Produkte, bei denen der von Sameda bereitgestellte Beileger mit dem entsprechenden Sicherheitshinweis noch nicht enthalten ist (also Produkte, die Sie vor dem 25.06.2024 erhalten haben).
- Archivieren Sie Ihr Anschreiben an die betroffenen Eltern / Betreuer (Brief oder E-Mail) zu behördlichen Kontrollzwecken bei den Versorgungsunterlagen zu den betroffenen Patienten.
- Füllen Sie das beigefügte Antwortformular aus und senden Sie es zeitnah, spätestens jedoch 30 Tage nach Erhalt an Sameda zurück. Mit dem Ausfüllen dieses Formulars bestätigen Sie
 - den Erhalt der dringenden Sicherheitsmitteilung,
 - dass Sie das Problem und die erforderlichen Maßnahmen verstanden haben
 - die Eltern / Betreuer der betroffenen Patienten informiert haben.

Kontaktperson

Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung im Zusammenhang mit diesem Problem benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Sameda Ansprechpartnerin:

Lara Ueckerseifer
Tel.-Nr.: 05824/9855514

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat eine Kopie dieser „Dringenden Sicherheitsinformation“ erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

B. Wichers

[B. Wichers \(Aug 1, 2024 16:38 GMT+2\)](#)

Beate Wichers

Geschäftsführung Sameda GmbH

2024-07-19 FSN-final. v1.0 de

Final Audit Report

2024-08-01

Created:	2024-08-01
By:	Lara Ueckerseifer (l.ueckerseifer@semeda.de)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAyY4I8u-hOBq9KbR14Gri_Q6kts_z-gNe

"2024-07-19 FSN-final. v1.0 de" History

 Document created by Lara Ueckerseifer (l.ueckerseifer@semeda.de)

2024-08-01 - 12:51:54 PM GMT

 Document emailed to b.wichers@semeda.de for signature

2024-08-01 - 12:51:59 PM GMT

 Email viewed by b.wichers@semeda.de

2024-08-01 - 2:38:14 PM GMT

 Signer b.wichers@semeda.de entered name at signing as B. Wichers

2024-08-01 - 2:38:34 PM GMT

 Document e-signed by B. Wichers (b.wichers@semeda.de)

Signature Date: 2024-08-01 - 2:38:36 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-08-01 - 2:38:36 PM GMT