

# DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION - AKTUALISIERUNG



Erstellungsdatum des Schreibens

GE HealthCare Ref.-Nr. 34136-TRM

An: Administrator des Gesundheitswesens / Risikomanager  
Leitung der Krankenpflege  
Direktor der Biomedizintechnik

Betreff: **Aktualisierung des dringenden Sicherheitshinweises zu den GE HealthCare-Anästhesiegeräten Aisys CS<sup>2</sup>, Avance CS<sup>2</sup>, Avance CS<sup>2</sup> Pro, Aisys, Avance, Amingo, Aespire 100, Aespire View, Aespire 7900 und Aespire 7100, ausgestattet mit allgemeinem Zusatzgasausgang (Auxiliary Common Gas Outlet, ACGO)**

Sehr geehrter Kunde,

Als Folgemaßnahme zum beigefügten Dringende Sicherheitsinformation von GE HealthCare (Ref-Nr. 34136) stellen wir technische Referenzhandbücher (Technical Reference Manuals, TRMs) zur Verfügung, die die Anforderungen für den Austausch des Anschlusses und der Abdeckung des ACGO-Schalters enthalten.

Verwenden Sie bei der Durchführung geplanter Wartungsarbeiten an einem Anästhesiesystem von GE HealthCare die Checkliste für geplante Wartungsarbeiten und die Anweisungen in den TRMs. Um auf die TRMs für die Anästhesiesysteme von GE HealthCare zuzugreifen, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um die neueste Version des TRM herunterzuladen. Sollten Sie Probleme beim Zugriff auf die Dokumente haben oder eine gedruckte Version bevorzugen, wenden Sie sich bitte an GE HealthCare.

Anweisungen:

1. Rufen Sie das Kundendokumentationsportal von GE HealthCare über den nachstehenden Link oder QR-Code auf.

Dokumentationsportal von GE HealthCare:  
<https://www.gehealthcare.com/support/manuals>



2. Suchen Sie die entsprechende TRM-Dokumentennummer in der nachstehenden Tabelle.

**Dokumentennummern nach Produkt:**

Produkt	TRM
Aespire 7100/Aespire 100	M1110140
Aespire 7900	1009-0541-000
Aespire View	M1170027
Aisys	M1046983
Aisys CS <sup>2</sup>	2069137-001
Amingo	1009-0357-000
Avance	1009-0357-000
Avance CS <sup>2</sup> /CS <sup>2</sup> Pro	M1222131

3. Geben Sie die TRM-Dokumentennummer in die Suchleiste des Portals für Kundendokumentation ein, und drücken Sie auf die Schaltfläche „Search“ (Suchen).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche um mit dem Herunterladen des Dokuments zu beginnen, und akzeptieren Sie die Urheberrechtsinformationen.

Wenn Sie das Bestätigungsformular in dem beigefügten Dringende Sicherheitsinformation von GE Healthcare noch nicht ausgefüllt und zurückgesendet haben, füllen Sie es bitte aus und senden Sie es an [FMI34136.ACGO@gehealthcare.com](mailto:FMI34136.ACGO@gehealthcare.com).

Wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die Ihnen unter Umständen aus dieser Korrekturmaßnahme entstehen, und bedanken uns sehr für Ihre Zusammenarbeit und Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen



Laila Gurney  
Chief Quality & Regulatory Officer  
GE HealthCare