



Rev. 01 / November 2024
FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

Date / Datum: 09.12.2024

Field Safety Notice
Dringende Sicherheitsmitteilung
Intermediate ceiling construction
Zwischendeckenkonstruktion

Contact details of the legal manufacturer <i>Kontaktdaten des legalen Herstellers</i>
KLS Martin SE & Co. KG KLS Martin Platz 1 78532 Tuttlingen Mail: vigilance@klsmartin.com Quality Management Ingo Leukart Person Responsible for Regulatory Compliance (PRRC) Mail: ingo.leukart@klsmartin.com Product Management Sven Zehnder Director Product Management Mail: sven.zehnder@klsmartin.com

Dear customer,

with this FSN we would like to inform you as a precautionary measure about a possible safety risk with Intermediate ceiling construction and ask you to take the measures described below. We thank you for your cooperation and apologize for any inconvenience this matter may cause.

Sehr geehrter Kunde,

mit dieser FSN möchten wir Sie vorsichtshalber über ein mögliches Sicherheitsrisiko mit Operationsleuchten Zwischendeckenkonstruktion informieren und Sie bitten, die unten beschriebenen Maßnahmen einzuleiten. Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die diese Angelegenheit verursachen könnte.

KLS Martin SE & Co. KG Standort Tuttlingen KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193 info@klsmartin.com · www.klsmartin.com	Bankverbindungen Kreissparkasse Tuttlingen: IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34 BIC SOLADES1TUT Deutsche Bank Tuttlingen: IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00 BIC DEUTDE33 Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 BIC COBADEFF694	Kommanditgesellschaft KLS Martin SE & Co. KG KLS Martin Platz 1 78532 Tuttlingen · Germany Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen Registergericht: Stuttgart Handelsregister: HRA 450196 USt.-Id.-Nr.: DE 142930777 WEEE-Reg.-Nr. 40473755	Persönlich haftende Gesellschafterin KLS Martin Verwaltungs SE KLS Martin Platz 1 78532 Tuttlingen · Germany Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen Registergericht: Stuttgart Handelsregister: HRB 791599 Geschäftsführende Direktoren: Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp Verwaltungsrat: Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger
---	--	---	---



Rev. 01 / November 2024
FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

1	Information on Affected Devices/ Angaben zu den betroffenen Produkten		
1.1	Clinical purpose of the product / Klinische Zweckbestimmung des Produkts		
	N/A: Product False ceiling construction has no clinical purpose of its own. It is part of the operating theatre lighting system N/A: Produkt Zwischendeckenkonstruktion hat keine eigene Klinische Zweckbestimmung. Sie ist Teil des OP-Leuchtensystems.		
1.2	Article number medical device / Artikelnummer Medizinprodukt		
	Number / Nummer	Description / Beschreibung	UDI-DI / UDI-DI
	89-800-00-00	OR light system marLED E	405760515ND
	89-903-00-00	OR light system marLED X	405760516NF
	89-000-00-00	OR light system	n/a
	Article number affected assembly group / Artikelnummer betroffene Baugruppe		
	Number / Nummer	Description / Beschreibung	UDI-DI / UDI-DI
	89-960-03-04	Intermediate ceiling constr. 300mm	n/a
	89-960-04-04	Intermediate ceiling constr. 400mm	n/a
	89-960-05-04	Intermediate ceiling constr. 500mm	n/a
	89-960-06-04	Intermediate ceiling constr. 600mm	n/a
	89-960-07-04	Intermediate ceiling constr. 700mm	n/a
89-960-08-04	Intermediate ceiling constr. 800mm	n/a	
89-960-10-04	Intermediate ceiling constr. 1000mm	n/a	
89-960-11-04	Intermediate ceiling constr. 1100mm	n/a	
89-960-12-04	Intermediate ceiling constr. 1200mm	n/a	

KLS Martin SE & Co. KG
Standort Tuttlingen
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34
BIC SOLADES1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00
BIC DEUTDE33

Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00
BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft
KLS Martin SE & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin
KLS Martin Verwaltungs SE
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 791599

Geschäftsführende Direktoren:
Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp

Verwaltungsrat:
Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger



Rev. 01 / November 2024
FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

	89-960-13-04	Intermediate ceiling constr. 1300mm	n/a
	89-960-14-04	Intermediate ceiling constr. 1400mm	n/a
	89-960-15-04	Intermediate ceiling constr. 1500mm	n/a
	89-960-16-04	Intermediate ceiling constr. 1600mm	n/a
	89-960-17-04	Intermediate ceiling constr. 1700mm	n/a
1.3	Batch / Charge		
	Number / Nummer	Delivery note / Lieferschein	
	89-960-03-04	81258134 / 81258135 / 81331321 / 81350406 / 81350407 / 81350408 / 81356231 / 81356232 / 81469072 / 81469074 / 81469075 / 81469076	
	89-960-04-04	81332337 / 81353570 / 81353571 / 81394749 / 81420421 / 81420422 / 81420423 / 81420424 / 81421498 / 81421499 / 81421500 / 81453459 / 81453460 / 81453461 / 81498418 / 81498419 / 81502455 / 81639328 / 81685984 / 81830561 / 81830562	
	89-960-05-04	81276726 / 81334525 / 81334527 / 81334528 / 81334529 / 81334531 / 81334532 / 81335352 / 81335353 / 81472081 / 81490206 / 81606091 / 81606093 / 81834212 / 81834213 / 81834214 /	
	89-960-06-04	81247083 / 81278233 / 81278234 / 81314822 / 81314823 / 81314824 / 81334397 / 81334398 / 81369858 / 81410094 / 81410095 / 81410096 / 81428849 / 81469078 / 81469079 / 81472080 / 81498422 / 81510151 / 81510153 / 81510156 / 81510157 / 81525858 / 81525859 / 81563196 / 81563197 / 81601383 / 81602876 / 81602877 / 81602878 / 81602879 / 81675591 / 81675592 / 81689785 / 81689786 / 81689787 / 81793662 / 81834211 /	
89-960-07-04	81276724 / 81276725 / 81484169 / 81490207 / 81570877 / 81570878 / 81570880 / 81570882 / 81570883 / 81570884 /		

KLS Martin SE & Co. KG
Standort Tuttlingen
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34
BIC SOLADES1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00
BIC DEUTDE33

Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00
BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft
KLS Martin SE & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin
KLS Martin Verwaltungs SE
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 791599

Geschäftsführende Direktoren:
Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp

Verwaltungsrat:
Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger



Rev. 01 / November 2024

FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

		81598809 / 81598811 / 81598812 / 81598815 / 81614748 / 81614749 / 81614750 / 81614751 / 81614752 / 81614753 / 81620267 / 81654312 / 81654313 / 81654314 / 81677210 / 81710468 /
	89-960-08-04	81220458 / 81277521 / 81277522 / 81295901 / 81388693 / 81464864 / 81483984 / 81518387 / 81529324 / 81539326 / 81539327 / 81543818 / 81544283 / 81582759 / 81584679 / 81584680 / 81653183 / 81653184 / 81728479 / 8176963 / 81769637 / 81769638 / 81769639 / 81816064 / 81839477
	89-960-10-04	81276036 / 81276037 / 81276038 / 81297647 / 81309659 / 81309660 / 81310840 / 81353573 / 81360791 / 81360792 / 81360793 / 81369857 / 81384587 / 81384589 / 81384590 / 81384591 / 81384592 / 81395953 / 81395954 / 81422881 / 81422882 / 81473661 / 81480066 / 81480067 / 81480068 / 81505162 / 81520343 / 81537667 / 81553520 / 81579665 / 81579671 / 81579677 / 81579679 / 81579681 / 81579684 / 81579688 / 81579694 / 81579698 / 81579705 / 81579708 / 81579713 / 81579714 / 81579717 / 81579724 / 81579727 / 81579731 / 81579733 / 81579734 / 81579737 / 81579739 / 81579742 / 81579745 / 81591713 / 81591714 / 81591715 / 81591716 / 81591717 / 81592328 / 81592329 / 81592330 / 81598777 / 81598780 / 81598783 / 81598785 / 81598787 / 81598801 / 81598803 / 81598804 / 81598807 / 81620758 / 81631338 / 81648960 / 81648965 / 81668682 / 81668683 / 81668685 / 81668697 / 81669129 / 81671252 / 81671253 / 81685007 / 81707455 / 81715019 / 81724520 / 81724521 / 81724523 / 81724524 / 81724525 / 81724526 / 81782599 / 81782600 / 81794312 / 81794313 / 81801225 / 81828660 /
	89-960-11-04	81230394 / 81230395 / 81255437 / 81255446 / 81285160 / 81312835 / 81313220 / 81313376 / 81313378 / 81313856 / 81313857 / 81313859 / 81313860 / 81313862 / 81313865 / 81314138 / 81314145 / 81314147 / 81314336 / 81314337 / 81314338 / 81345883 / 81404121 / 81480697 / 81494100 / 81494101 / 81498420 / 81530643 / 81565359 / 81565360 / 81565361 / 81565362 / 81584149 / 81584150 / 81598797 / 81598800 / 81610998 / 81610999 / 81615091 / 81641144 /

KLS Martin SE & Co. KG

Standort Tuttlingen

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany

Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany

Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193

info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen

Kreissparkasse Tuttlingen:

IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34

BIC SOLADES1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen:

IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00

BIC DEUTDE33

Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:

IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00

BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft

KLS Martin SE & Co. KG

KLS Martin Platz 1

78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen

Registergericht: Stuttgart

Handelsregister: HRA 450196

USt.-Id.-Nr.: DE 142930777

WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin

KLS Martin Verwaltungs SE

KLS Martin Platz 1

78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen

Registergericht: Stuttgart

Handelsregister: HRB 791599

Geschäftsführende Direktoren:

Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp

Verwaltungsrat:

Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger



Rev. 01 / November 2024

FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

	81641145 / 81674656 / 81751540 / 81751541 / 81751542 / 81751543 / 81751544 / 81751545 / 81751548 / 81751549 / 81751550 / 81751551 / 81751552 / 81751553 / 81751555 / 81751557 / 81751559 / 81751560 / 81751562 / 81751564 / 81751565 / 81751566 / 81751568 / 81751569 / 81751570 / 81763547 / 81800896 / 81801228 / 81828658 / 81828659 / 81828661 / 81828664
89-960-12-04	81251163 / 81296097 / 81371783 / 81493854 / 81493855 / 81521402 / 81550653 / 81550654 / 81550655 / 81550656 / 81550657 / 81550658 / 81582085 / 81582086 / 81606437 / 81671364 / 81738460 / 81738461 / 81774806 / 81774808
89-960-13-04	81227510 / 81227513 / 81227514 / 81455659 / 81455660 / 81494107 / 81494108 / 81494109 / 81534401 / 81580126 / 81585228 / 81606374 / 81658353 / 81658354 / 81760795 / 81766395
89-960-14-04	81227499 / 81227503 / 81227506 / 81227508 / 81339750 / 81340117 / 81340913 / 81475179 / 81493813 / 81624918 / 81624919 / 81842188 / 81842189
89-960-15-04	81232581 / 81232583 / 81251153 / 81251155 / 81251156 / 81251157 / 81251164 / 81292401 / 81292402 / 81292403 / 81292404 / 81292405 / 81315672 / 81334494 / 81388153 / 81388154 / 81388155 / 81388156 / 81388157 / 81388158 / 81388178 / 81395950 / 81395951 / 81395952 / 81425230 / 81425232 / 81493850 / 81493852 / 81493853 / 81528974 / 81528976 / 81544182 / 81544182 / 81548474 / 81548475 / 81548476 / 81548477 / 81556638 / 81556639 / 81556641 / 81585038 / 81596620 / 81716108 / 81751539
89-960-16-04	81364349 / 81364350 / 81503838 / 81734647 / 81734651 / 81790750
89-960-17-04	81242561 / 81242562 / 81242563 / 81255447 / 81255448 / 81288870 / 81288871 / 81370393 / 81370394 / 81370395 / 81370396 / 81390525 / 81390526 / 81390562 / 81480353 / 81480354 / 81515501 / 81581497 / 81581499 / 81607361 / 81614745 / 81685395 / 81685397 / 81734649 / 81734652 / 81738830 / 81843939 / 81843940 / 81843941 / 81843943 /

KLS Martin SE & Co. KG
Standort Tuttlingen
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34
BIC SOLADES1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00
BIC DEUTDE33

Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00
BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft
KLS Martin SE & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin
KLS Martin Verwaltungs SE
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

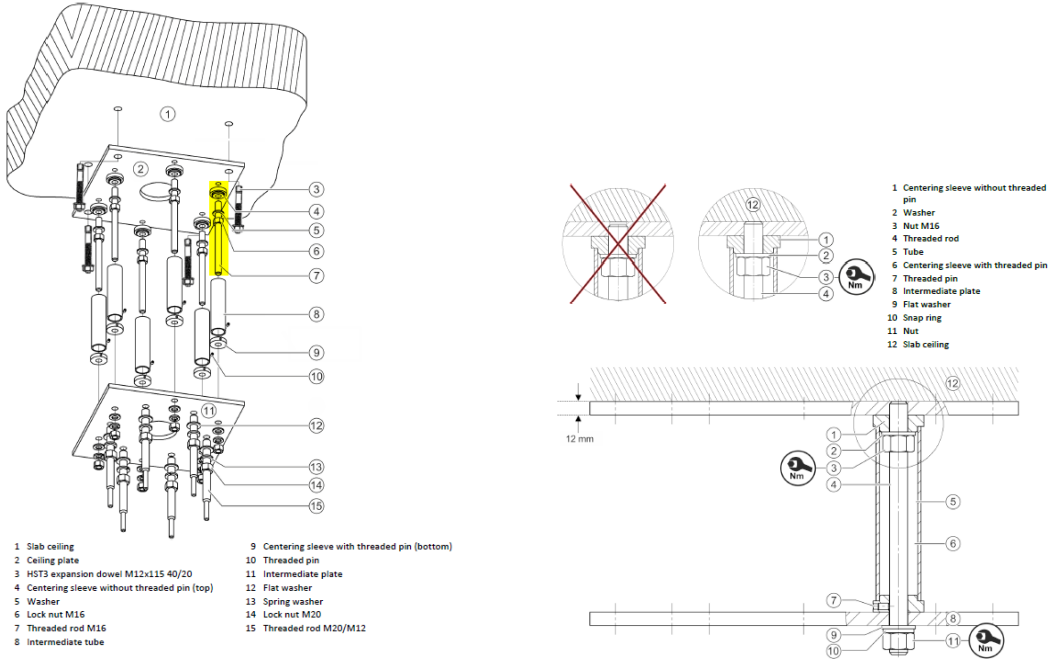
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 791599

Geschäftsführende Direktoren:
Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp

Verwaltungsrat:
Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger

Rev. 01 / November 2024
FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

	81843944 / 81843945 / 81843946 / 81843948 / 81843951 / 81843952 / 81850227
2	Reason for Field Safety Corrective Action / Grund für die Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld (FSCA))
2.1	Description of the problem / Problembeschreibung Incorrect tightening torques are specified in the installation instructions in relation to the suspended ceiling construction. In 2020 the tightening torques have been increased by mistake. The correct torque is 65 Nm for M16 bolts and 105 Nm for M20 bolts. <i>In der Montageanleitung sind falsche Anzugsdrehmomente in Bezug auf die abgehängte Deckenkonstruktion angegeben. Im Jahr 2020 wurden die Anzugsdrehmomente irrtümlich erhöht. Das richtige Anzugsmoment für M16-Schrauben beträgt 65 Nm und für M20-Schrauben 105 Nm.</i>
2.2	Images on the topic / Bilder zum Thema 

KLS Martin SE & Co. KG
Standort Tuttlingen
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34
BIC SOLADES1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00
BIC DEUTDE33

Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00
BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft
KLS Martin SE & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin
KLS Martin Verwaltungs SE
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 791599

Geschäftsführende Direktoren:
Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp

Verwaltungsrat:
Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger



Rev. 01 / November 2024
FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

2.3	Hazards giving rise of the FSCA / Gefährdungen, die den FSCA auslösen Due to the damaged plate and threaded rod, there is a risk of connecting elements (screws) coming loose and components, accessories or connected devices (e.g. crossbar, TFT monitor) falling down as a result <i>Durch die beschädigte Platte sowie die Gewindestange besteht die Gefahr, dass sich Verbindungselemente (Schrauben) lösen und dadurch Bauteile, Zubehör oder angeschlossene Geräte (z.B. Traverse, TFT-Monitor) herunterfallen können</i>

3	Type of action to mitigate the risk / Art der Maßnahmen zur Minderung des Risikos
3.1	Action to be taken by the User / Vom Anwender zu ergreifende Maßnahmen ☒ Identify Device / Produkt identifizieren ☐ Return Device / Gerät zurückgeben ☐ Destroy Device / Gerät zerstören ☒ Take note of amendment of Assembly Instructions and Service Manual/ <i>Beachten Sie die Änderung der Montageanweisungen und des Servicehandbuches</i> ☒ Other ☐ None Forward this FSN to all customers who have been supplied with the affected products. The customer must check his system on site in accordance with the specifications in the service manual (Chapter 13.3.1 Inspection instructions). If damage is detected, the lighting system must be blocked or dismantled and a KLS Martin technician must be informed immediately.

KLS Martin SE & Co. KG Standort Tuttlingen KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193 info@klsmartin.com · www.klsmartin.com	Bankverbindungen Kreissparkasse Tuttlingen: IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34 BIC SOLADES1TUT Deutsche Bank Tuttlingen: IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00 BIC DEUTDE33 Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 BIC COBADEFF694	Kommanditgesellschaft KLS Martin SE & Co. KG KLS Martin Platz 1 78532 Tuttlingen · Germany Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen Registergericht: Stuttgart Handelsregister: HRA 450196 USt.-Id.-Nr.: DE 142930777 WEEE-Reg.-Nr. 40473755	Persönlich haftende Gesellschafterin KLS Martin Verwaltungs SE KLS Martin Platz 1 78532 Tuttlingen · Germany Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen Registergericht: Stuttgart Handelsregister: HRB 791599 Geschäftsführende Direktoren: Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp Verwaltungsrat: Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger
--	--	---	---



Rev. 01 / November 2024

FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

	<i>Weiterleitung dieser FSN an alle Kunden, die mit den betroffenen Produkten beliefert wurden. Der Kunde hat sein System vor Ort gemäß den geänderten Vorgaben im Servicehandbuch (Kapitel 13.3.1 Prüfanweisungen) zu überprüfen, bei Feststellung von Schäden ist das Leuchtensystem zu sperren bzw. zu demontieren und ein KLS Martin Techniker umgehend zu informieren.</i>	
3.2	Is customer Reply required? <i>Ist eine Antwort des Kunden erforderlich?</i>	Yes Ja
3.3	Action to be taken by the Manufacturer / Vom Hersteller zu ergreifende Maßnahmen ☐ Product removal / <i>Entfernung des Produkts</i> ☐ Software upgrade / <i>Softwareaktualisierung</i> ☐ IFU or labelling change / <i>IFU oder Kennzeichnungsänderung</i> ☒ Other ☐ None Change of assembly instructions and Service Manual <i>Änderung der Montageanleitungen und Servicehandbuch</i>	

4	General Information / Allgemeine Informationen	
4.1	FSN Type / <i>FSN Typ</i>	New / <i>Neu</i>
4.2	For updated FSN, reference number and date of previous FSN. / <i>Für aktualisierte FSN, Referenznummer und Datum der vorherigen FSN.</i>	N/A
4.3	For Updated FSN, key new information as follows: / <i>Für Aktualisierte FSN, neue Informationen wie folgt eingeben:</i> N/A	

KLS Martin SE & Co. KG Standort Tuttlingen KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193 info@klsmartin.com · www.klsmartin.com	Bankverbindungen Kreissparkasse Tuttlingen: IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34 BIC SOLADES1TUT Deutsche Bank Tuttlingen: IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00 BIC DEUTDESS653 Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen: IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00 BIC COBADEFF694	Kommanditgesellschaft KLS Martin SE & Co. KG KLS Martin Platz 1 78532 Tuttlingen · Germany Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen Registergericht: Stuttgart Handelsregister: HRA 450196 USt.-Id.-Nr.: DE 142930777 WEEE-Reg.-Nr. 40473755	Persönlich haftende Gesellschafterin KLS Martin Verwaltungs SE KLS Martin Platz 1 78532 Tuttlingen · Germany Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen Registergericht: Stuttgart Handelsregister: HRB 791599 Geschäftsführende Direktoren: Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp Verwaltungsrat: Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger
---	--	--	--



Rev. 01 / November 2024
FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

4.4	The Competent (Regulatory) Authority of your country has been informed about this communication to customers. / <i>Die zuständige (Regulierungs-)Behörde Ihres Landes wurde über diese Mitteilung an die Kunden informiert.</i>	
4.5	List of Attachements: / <i>Liste der Anhänge:</i>	Updated Assembly Instructions Updated Service Manual Relevant delivery notes / <i>aktualisierte Montageanleitungen</i> <i>aktualisiertes Servicehandbuch</i> <i>relevante Lieferscheine</i>

5	Transmission of this Field Notice / Übermittlung der vorliegenden Bekanntmachung
5.1	This notice needs to be passed on all those who need to be aware within your organisation or to any organisation where the potentially affected devices have been transferred. <i>Dieser Hinweis muss an alle Personen weitergegeben werden, die in Ihrer Organisation davon Kenntnis haben müssen, bzw. an alle Organisationen, an die die potenziell betroffenen Geräte weitergegeben wurden.</i> Please transfer this notice to other organisations on which this action has an impact. <i>Bitte leiten Sie diese Mitteilung an andere Organisationen weiter, auf die sich diese Maßnahme auswirkt.</i> Please maintain awareness on this notice and resulting action for an appropriate period to ensure effectiveness of the corrective action. <i>Bitte halten Sie das Bewusstsein für diese Mitteilung und die daraus resultierenden Maßnahmen für einen angemessenen Zeitraum aufrecht, um die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen zu gewährleisten.</i> Please report all device-related incidents to the manufacturer, distributor or local representative, and the national Competent Authority if appropriate, as this provides important feedback.

KLS Martin SE & Co. KG
Standort Tuttlingen
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34
BIC SOLADES1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00
BIC DEUTDE33

Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00
BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft
KLS Martin SE & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin
KLS Martin Verwaltungs SE
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 791599

Geschäftsführende Direktoren:
Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp

Verwaltungsrat:
Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger



Rev. 01 / November 2024

FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

Bitte melden Sie alle produktbezogenen Vorfälle dem Hersteller, dem Händler oder dem örtlichen Vertreter und gegebenenfalls der zuständigen nationalen Behörde, da dies wichtige Rückmeldungen liefert.

i.V.

Signiert von:

Ingo Leukart



Name des Unterzeichners: Ingo Leukart
Signiergrund: Ich genehmige dieses Dokument
Signierzeit: 2024-12-17 | 8:00 AM PST
26A686138A4847D59515B9DDE784255A

i.V.

Signiert von:

Sven Zehnder



Name des Unterzeichners: Sven Zehnder
Signiergrund: Ich genehmige dieses Dokument
Signierzeit: 2024-12-17 | 8:05 AM PST
C48EC613A8F041DB98D48FE56BE08415

Ingo Leukart

Person Responsible for
Regulatory Compliance

Sven Zehnder

Director Product Management
Surcigal Lights

KLS Martin SE & Co. KG
Standort Tuttlingen
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34
BIC SOLADES1TUT
Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00
BIC DEUTDE33
Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00
BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft
KLS Martin SE & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin
KLS Martin Verwaltungs SE
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 791599
Geschäftsführende Direktoren:
Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp
Verwaltungsrat:
Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger



Rev. 01 / November 2024
FSN Ref: 200063277 / Distributor

FSCA Ref: 200063277

Acknowledgement Form
Bestätigungsformular

Please check your luminaire systems to see if you have installed one of the affected products.
Bitte überprüfen Sie Ihre Leuchtensysteme, ob Sie eines der betroffenen Produkte verbaut haben.

Note, this corrective action only applies to the affected catalogue number and lot listed above and does **NOT** apply to any other products.
Bitte beachten Sie, dass diese Korrekturmaßnahme nur für die betroffene Katalognummer und das betroffene Los gilt, die oben aufgeführt sind, und **NICHT** für andere Produkte.

- ☐ We hereby confirm that we have read and understood this letter.
Wir bestätigen hiermit, dieses Schreiben gelesen und verstanden zu haben.
- ☐ We have carried out the measures recommended by the manufacturer
Wir haben die vom Hersteller empfohlenen Maßnahmen durchgeführt.
- Quantity / Menge

Please send the completed form to: vigilance@klsmartin.com
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:

Name of Company / Hospital: Name Unternehmen / Klinik:	
Department: Abteilung:	
Name / Title (in block letters): Name / Titel (Blockschrift):	/.....
E-Mail: E-Mail:	
Date / Signature: Datum / Unterschrift:	 /

KLS Martin SE & Co. KG
Standort Tuttlingen
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

Bankverbindungen
Kreissparkasse Tuttlingen:
IBAN DE15 6435 0070 0000 0102 34
BIC SOLADES1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen:
IBAN DE25 6537 0075 0218 4000 00
BIC DEUTDESS653

Commerzbank AG, Filiale Tuttlingen:
IBAN DE88 6944 0007 0241 2153 00
BIC COBADEFF694

Kommanditgesellschaft
KLS Martin SE & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRA 450196
USt.-Id.-Nr.: DE 142930777
WEEE-Reg.-Nr. 40473755

Persönlich haftende Gesellschafterin
KLS Martin Verwaltungs SE
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen · Germany

Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Registergericht: Stuttgart
Handelsregister: HRB 791599

Geschäftsführende Direktoren:
Christian Leibinger, Michael Martin, Thomas Hipp

Verwaltungsrat:
Christian Leibinger (Vorsitzender), Karl Leibinger