

URGENTE Avviso di Sicurezza **Richiesta azione immediata**

MICROPURE 123 e ISOPURE123 presentano una maggiore resistenza durante l'iniezione

Rif. Avviso di Sicurezza: FSN-24-010

Rif. azione correttiva di sicurezza sul campo: FA-24-010

Tipo di Avviso di Sicurezza: Primo Avviso di Sicurezza

18 Dicembre, 2024

Gentile Cliente,

Le scriviamo per informarLa di un'azione correttiva di sicurezza sul campo (anche riferita come FSCA. Field Safety Corrective Action) relativa alle lenti intraoculari ISOPURE 123 e MICROPURE 123 (IOL) consegnate in cartucce precaricate. Queste lenti acriliche sono progettate per l'impianto nella sacca capsulare dopo la rimozione della cataratta e servono a sostituire la funzione ottica del cristallino naturale della cataratta.

Motivo della notifica

BVI è venuta a conoscenza del fatto che, a volte, si osserva una maggiore resistenza durante l'iniezione di lenti intraoculari (IOL) precaricate. L'aumento della resistenza può indurre gli utilizzatori a esercitare una forza eccessiva causando l'inceppamento dell'iniettore o della IOL.

Vorremmo sottolineare che le lenti intraoculari ISOPURE 123 e MICROPURE 123 funzionano secondo la destinazione d'uso prevista. In particolare, l'aumento della forza di iniezione osservato rimane per la maggiorparte dei prodotti entro i normali parametri operativi.

Rischio per la salute

I dati post-commercializzazione valutati fino ad oggi indicano che la conseguenza più comune di una maggiore resistenza durante l'iniezione è un blocco della IOL/iniettore, che impedisce la progressione dell'impianto e richiede l'uso di un secondo dispositivo. Inoltre, in rari casi, una forza eccessiva durante l'iniezione può causare danni alla superficie della IOL (graffi) con possibili ulteriori complicazioni della procedura. Evitare un'eccessiva forza di iniezione aiuta gli utilizzatori a prevenire potenziali danni al paziente.

Azione richiesta

Le nostre registrazioni mostrano che avete ricevuto uno o più prodotti inerenti alla presente notifica. È possibile determinare se il prodotto interessato è in Vostro possesso esaminando i numeri di lotto presenti nella Tabella 1, Allegato I. I numeri di lotto possono essere trovati sull'etichetta del prodotto. Il numero di lotto è ricavato dalle prime cinque o sei cifre del numero di serie (SN) stampato sull'etichetta. Chiediamo gentilmente la vostra collaborazione nei seguenti passaggi per affrontare la situazione in questione:

1. Assicuratevi che le lenti MICROPURE 123 e ISOPURE 123 siano utilizzate secondo le attuali istruzioni per l'uso (IFU) disponibili all'indirizzo internet <https://ifu.bvimedical.com/>.
Inoltre, se si incontra una resistenza eccessiva durante la spinta dello stantuffo dell'iniettore, interrompere immediatamente l'uso. Smaltite il prodotto e passare a un'altra IOL.
2. Assicuratevi che questo avviso sia distribuito a tutti gli utilizzatori dei prodotti interessati e al personale pertinente della Vostra organizzazione.
3. Se avete ulteriormente distribuito questo prodotto, Vi preghiamo di avvisare i Vostri clienti di questa situazione. Considerate tutti i potenziali utilizzatori di questo prodotto della Vostra catena di distribuzione. Si consiglia di utilizzare una copia di questa lettera di notifica quando contattate i Vostri clienti.
4. Confermate la ricezione del presente Avviso di Sicurezza utilizzando il Modulo di Risposta fornito qui di seguito.

Si prega di **compilare e restituire immediatamente** il Modulo di Risposta allegato.

BVI riconosce il valore della Vostra attività e continuerà a fornirVi prodotti di qualità. Se avete domande in merito, non esitate a contattarci.

Agnieszka Drzewiecka
Global CVP Manager

Modulo di Risposta

Si prega di compilare e restituire il presente Modulo di Risposta entro e non oltre il 20 gennaio 2025.

PUNTO 1

☐ Ho letto le informazioni riportate nel documento 'Avviso di Sicurezza nr. FSN-24-010' e ho capito quali prodotti sono coinvolto. Confermo che l'avviso è stato distribuito a tutti gli utilizzatori dei prodotti interessati.

PUNTO 2

Nome cliente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Nome del contatto: _____

Titolo: _____ E-mail: _____

Data di completamento: _____

PUNTO 3

Si prega di **restituire** a BVI il **presente Modulo di Risposta compilato entro il 20 gennaio 2025** inviandolo all'indirizzo di posta elettronica BVIPreloadedIOL@sedgwick.com

****Grazie per il Vostro supporto****

Allegato I

Tabella 1 – Numeri di Lotto dei prodotti coinvolti							
24FPED	24GCLB	24GFFB	24HCIB	24HSN	24HTG	24HCWC	24JETD
24FRHE	24GYKE	24GTDC	24HXTD	24HSQB	24HXG	24HDCCD	24GQMB
24FNJE	24GCLE	24GJEC	24HRVD	24HBRB	24HPI	24HZYD	24GXDE
24FPGF	24GOLE	24GRHE	24HOCB	24HHRB	24HWSC	24HNJE	24HPB
24GCE	24HXL	24GVHE	24HOIB	24HKCC	24HATC	24HVJE	24HQF
24GOW	24HDO	24GGIE	24HAJB	24HEGC	24HEVC	24HHKE	24HHH
24GVW	24IIXC	24GJIE	24HPVD	24GVY	24HAXC	24HMLE	24HFSB
24GDGB	24GUYD	24GNIE	24HUVD	24GRGC	24HIBD	24HQLE	24HUSB
24GGLE	24GQZD	24GPJE	24HDXD	24GTTD	24HOUD	24HCME	24HUTC
24GWLE	24HHZ	24GXJE	24ISG	24GXUD	24IWG	24HOME	24HKUC
24HDL	24HNZ	24FAG	24IQJ	24HMC	24IECE	24IO	24HOUC
24HEED	24HZZ	24GUCB	24ITJ	24HYD	24IICE	24IUQ	24HSWC
24HCGE	24HCAB	24GCDB	24GYEC	24HSH	24JPDF	24HEMB	24HEZC
24FSAC	24HOAB	24GCFB	24GCFC	24HTGC	24JKTD	24HEVD	24HMZC
24FAAD	24HOSD	24GJFB	24GJDD	24GPTD	24JPUD	24HMYD	24HTBD
24FJAD	24IBQC	24GPGB	24GXSD	24HEC	24ISY	24IIH	24HNRD
24FYAD	24FBDD	24GVBC	24GUUD	24HTC	24IRNB	24IMH	24IEB
24FHCD	24FAGF	24GDCC	24GAVD	24HQD	24IFPB	24ICL	24IGC
24FAED	24FJHF	24GHCC	24HMB	24HRP	24INAE	24IEN	24ILYC
24GJE	24FTHF	24GOCC	24HVQ	24HPQB	24IABE	24ILN	24JIK
24GKLE	24GDX	24GTGE	24HHR	24HYQB	24JYFD	24IYW	24HTI
24GEME	24GMXC	24GFHE	24HMEC	24HQEC	24JWTD	24IOZ	24HMRB
24HNJ	24HNF	24HKCE	24HSIB	24INMF	24HLIF	24IMM	24HOFC
24HZM	24HDK	24FHE	24HJWD	24JAOB	24IAK	24IQM	24HQXC
24FJZB	24HKK	24FQF	24HAYD	24FQFF	24IUM	24ISEE	24HUXC
24FMPC	24HPO	24FFAD	24HCHF	24GVFC	24IXM	24IWEE	24HQZC
24FXPC	24IDQB	24FLDD	24HDIF	24GCGC	24ION	24HDI	24HOAD
24FQDD	24IEAE	24FOFD	24HPIF	24GGGC	24IMX	24HGCD	
24FYHF	24IKAE	24FKGF	24HTIF	24GUXC	24IQY	24HLKE	
24GEEB	24FFED	24FUGF	24IFH	24GBWD	24IXLB	24HAOE	
24GZFB	24FCFF	24GVFB	24IQH	24GTDE	24IYJ	24IS	
24GLCC	24FZGF	24GJKB	24HXGB	24HYI	24IUK	24IWAB	

24GVCC	24GEKC	24GREC	24HWIB	24HJQ	24IEM	24IYC
24GDXC	24GSLE	24GBHE	24HYJB	24HNQ	24IVW	24JSL
24GBKE	24HZJ	24GVIE	24HSUD	24HXR	24IRZ	24JZL
24GFKE	24HDN	24FICF	24IQI	24HEDC	24IBLB	24HGKB
24IAS	24HLO	24FHDF	24IMJ	24GGWD	24IONB	24HGWD
24FSGB	24HVP	24GJHC	24IWJ	24HHF	24GKCD	24HZWD
24FQPC	24HTR	24GNHC	24JWTB	24HRK	24HVVH	24HYGF
24FEFD	24FIBB	24GIXD	24HQJB	24HIDC	24HJS	24HEHF
24GEKB	24GBUD	24GLXD	24HUJB	24HCFC	24HWCC	24IHI
24GYKC	24HHI	24GGZD	24HSKB	24HXGC	24HADC	24IULB
24GIXC	24HZK	24GKZD	24HYSD	24HJHC	24HIEC	24HXF
24GEDD	24HHL	24HGY	24HKTD	24HNHC	24HSFC	24HBG
24GPGE	24HZQ	24HSY	24HKXD	24HQTC	24HIGC	24HBH
24GNKE	24HDR	24FXBD	24HMXD	24IRQ	24HMTD	24HEH
24HRJ	24HVQB	24GHGB	24HEYD	24GMLB	24HCUC	24HMVC
24HLL	24HGCC	24GRBC	24HMHF	24GBMB	24HWUC	24HQBD
24HHN	24HEEC	24GDDC	24HABB	24GKGC	24HKWC	24HKCD
24FEZB	24HYEC	24GXDC	24HGEB	24GQXC	24HETC	24HALE
24FVZC	24HGFC	24GFEC	24HDHB	24HHO	24HSYC	24HGNE
24FOAD	24FUOD	24GJHE	24HGHB	24HXO	24HMBD	24HIHF
24FRCD	24GCJC	24GNHE	24HSTD	24HZP	24HBRD	24HKHF
24FYFD	24GMYD	24GZHE	24HWUD	24HCQ	24HVYD	24HZHF
24FHFF	24HDY	24GDIE	24HIYD	24HFS	24HJJE	24IBX
24GZW	24HEBB	24FJFD	24HAHB	24GY	24HZJE	24IPX
24GRCC	24HXX	24GRIE	24HIIB	24GCZ	24HYLE	24ITX
24GTWC	24HEZ	24HGE	24HOKB	24GWEC	24HKME	24IFY
24HVK	24HWZ	24HVE	24HELB	24GOFD	24KBWB	24INY
24HTL	24HSAB	24HJM	24HQLB	24GOGC	24HBJ	24IKZ
24HRM	24HIBB	24HFP	24HLUD	24GDTD	24HSSC	24KYY
24HVM	24HCCB	24HNP	24HWHF	24GDWD	24HQVC	24GHFC
24HKZ	24HIDB	24HFQ	24HHIF	24HVC	24HUVC	24HZE
24HMBB	24HFIB	24HLR	24GAFC	24HIE	24HGPC	24HWI
24HUBB	24HVTD	24HQDC	24GKFC	24HDG	24HOYC	24HMQB
24HYBB	24FDIF	24HYDC	24GYFC	24GHLB	24HGAD	24HFHC
24HSCB	24GLW	24HBEC	24GWWC	24GUEC	24HSAD	24HGUC
24HEDB	24GKJC	24HUEC	24GATD	24GLTD	24HDZD	24HAVC
24FGDD	24GOKC	24HKFC	24GGUD	24GLDE	24HKZD	24HYVC
24GGAB	24GTSD	24IWMF	24GQUD	24GQKE	24HSZD	24HOWC

24GSKB	24HFM	24HIJB	24GQVD	24HPL	24HFJE	24HWWC
24GJUD	24HVN	24HMBJ	24HAC	24HBM	24HSME	24HAZC
24GPDE	24HBS	24HWKB	24HYC	24HTO	24HEXC	24HACD
24GXGE	24GVIC	24HILB	24HHG	24HOCC	24HMXC	24JBRF
24HJJ	24GZIC	24HYLB	24HPH	24HWHB	24HCYC	24GUCD
24HNK	24GQYD	24IMI	24HBP	24HCKB	24HGYC	24HQC
24HZN	24GYYD	24HADB	24GUVD	24HRSD	24HWYC	24HLG
24GNZD	24HOY	24HGSD	24HID	24HCTD	24HKAD	24HKSB
24HAY	24HGAB	24HKSD	24HLE	24HIUD	24HWAD	24HSUC
24HAZ	24FOHE	24HUSD	24HJP	24HDWD	24HABD	24HIVC
24HTZ	24GZCC	24HGTD	24HRQ	24HHXD	24HEBD	24HJRD
24HWAB	24GHDC	24HOTD	24HPR	24IJJ	24HWBD	24HRJE
24HXDB	24GPDC	24HAUD	24HSCC	24HBMB	24KEJB	24HDKE
24HAVD	24GZIE	24HEUD	24HMDC	24IZG	24HNWD	24HALB
24HMVD	24GDJE	24HRWD	24HADC	24IJX	24ICH	24IEJ
24FHCB	24GHJE	24HVWD	24HLGC	24IAZ	24IIN	24IYK
24FVFF	24GLJE	24FLDB	24HBHC	24IUZ	24IXX	24IGL
24FEHF	24GJKE	24GUJC	24GSFC	24ILNB	24IYKB	24ICPB
24FOHF	24HFJ	24GQWC	24GXTD	24IHDE	24IZMB	24GFFC
24GWLb	24HVJ	24GPSD	24GEUD	24JXED	24IDNB	24GZWC
24GUKE	24HNM	24GMUD	24HCD	24KAZ	24IQAE	24HSB
24GAME	24ILHB	24GEVD	24HMD	24HQXD	24GXDD	24HLI
24HLN	24FKDF	24HFD	24HCE	24HTXD	24HDS	24HRRB
24FMCD	24GFJC	24HUD	24HOE	24HWXD	24HKNE	24HWFC
24FWCD	24GIYD	24HDF	24GIVD	24HOHF	24ICD	24HAGC
24FKED	24GCZD	24HPG	24GMVD	24HSHF	24IABB	24HOSC
24FUED	24HKY	24HHK	24HIC	24ICI	24ILBD	24HITC
24FTFD	24HQZ	24HWCB	24HTF	24IUI	24IOBD	24HYTC
24FLFF	24HKAB	24HMDB	24HZH	24IAM	24JSJ	24IHNB
24FFGF	24GODB	24HOHB	24HPN	24IFX	24JAK	24JRED